

HARTMANN



Bacillo[®] 30 Sensitive

Unsere Vision:
Das Beste noch
besser zu machen.



Bacillo[®] 30 Sensitive

Fünf Highlights

Bacillo[®] 30 Sensitive
Sortiment

Bacillol® 30 Sensitive – das Ergebnis einer Vision

Bacillol® steht seit 1924 für Desinfektion und ist eine etablierte Größe im Markt. Im Laufe der Jahre ist eine Menge passiert und die Köpfe, die hinter der Marke stecken, haben stetig an ihrer Verbesserung gearbeitet. Ausschlaggebend waren dabei immer Markt- und Anwendungsveränderungen, an die das Bacillol® Sortiment fortwährend angepasst wurde.



Bacillol®

30 Sensitive

Der sensitive Hygiene-Held

Für schonenden
Allround-Hygienschutz
im Alltag



Wer Flächen desinfizieren will, muss sie verstehen

Für die Entwicklung des neuen Bacillol® 30 Sensitive war unser Anspruch kein geringerer, als den steigenden Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Entstanden ist ein Produkt, das leistungstärker und schonender kaum sein könnte.

Bacillol® 30 Sensitive – die Flächendesinfektion von morgen.



*So stark
und doch so
schonend*



Bacillo[®] 30 Sensitive: Fünf Highlights für Ihre Flächendesinfektion

1 Optimale Wirksamkeit

2 Hautverträglich

3 Materialverträglich

4 Zukunftsorientiert

5 Reichweitenstark



1

Optimale Wirksamkeit

Schnell, sicher, komfortabel: Bacillo® 30 Sensitive besticht im Praxistest durch **Top-Wirkzeiten** gegen Viren, Bakterien und Sprosspilze.*

NEU Wirksam gegen Coronaviren EN 14476 30 Sek.	NEU Begrenzt viruzid EN 16777 1 min	SCHNELLER Norovirus EN 14476 2 min	SCHNELLER Tuberkulozidie EN 14348 Mykobakterizidie EN 14348 3 min
Bakterizidie/Levurozidie EN 13727 / EN 13624 / EN 16615 / VAH* Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) EN 14476 / DVV / RKI Rotavirus EN 14476 1 min / *5 min (gelistete Zeit)		Begrenzt viruzid PLUS EN 14476 Adenovirus EN 14476 30 min	

*Getestet mit Bacillo® 30 Sensitive Tissues gemäß neuesten EN-Normen für medizinische Flächen, inklusive des 4-Felder-Tests (EN 16615).





2 Hautverträglich

Dermatologisch getestet und vom SGS Institut Fresenius* zertifiziert.

Wirksamkeit und Hautverträglichkeit schließen sich bei Flächen-Desinfektionsmitteln aus? Nein, denn Bacillo® 30 Sensitive ist **sehr gut hautverträglich** und **reizt nicht die Haut**.

* Das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen

Das gibt es nur selten – ein allergiker- und asthmatikerfreundliches Flächen-Desinfektionsmittel mit Auszeichnung.

Bacillo® 30 Sensitive hat das **ECARF-Qualitätssiegel** für allergiker- und asthmatikerfreundliche Produkte erhalten. Das Siegel wird vergeben durch die Europäische Stiftung für Allergieforschung (Stiftung ECARF).



3 Materialverträglich

Leistungsstärke in Perfektion – bei herausragender Materialverträglichkeit

Sensible Oberflächen verlangen nach schonender Behandlung – bei häufiger Desinfektion. Bacillo® 30 Sensitive mit seiner patentierten Formel ist besonders sanft, gleichzeitig aber wirksam, und zwar überall, wo es darauf ankommt, u. a. bei folgenden Anwendungen:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z. B. Mobiltelefone, Tablets
- Empfindliche, nicht invasive Medizinprodukte
- Makrolon®, Acrylglas und Polysulfon sowie Kunstleder

Die hervorragende Materialverträglichkeit von Bacillo® 30 Sensitive wurde durch extern durchgeführte Einlegeversuche und Spannungsrisstests bestätigt.




4 Zukunftsorientiert

Die Zukunft im Blick – besonders wenig Rückstände

Die innovative Wirkformel von Bacillol® 30 Sensitive ermöglicht die Verwendung von weniger Tensiden als bei Bacillol® 30. So leistet Bacillol® 30 Sensitive einen wichtigen Beitrag zu einem verantwortungsvollen, schonenden Wirkstoffeinsatz.

Rückstände in (g) per 1 m² desinfizierte Fläche

(Durchschnittswert einer Packung Desinfektionstücher)

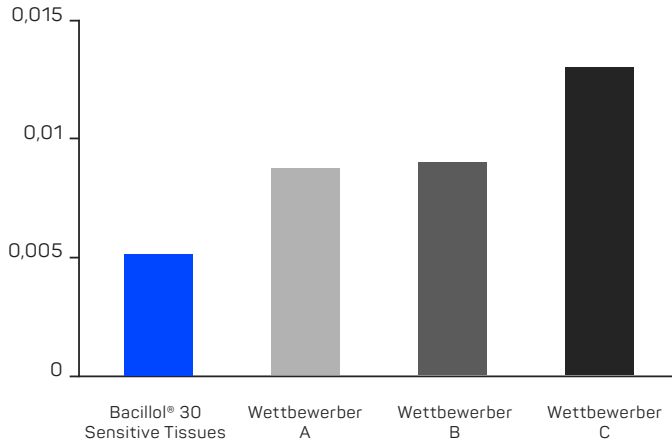

-60%
Tenside/Rückstände

Bacillol® 30 Sensitive Tissues hinterlassen pro Quadratmeter desinfizierter Fläche am wenigsten Rückstände: 0,0052g/m²




5

Reichweitenstark

Besonders sparsam dank enormer Reichweite

Im Testvergleich reinigt und desinfiziert eine Packung Bacillo® 30 Sensitive Tücher bis zu 30 m² mehr als vergleichbare Produkte.* Klingt viel? Ist es auch.

Das entspricht 19 Liegen oder 80 Bildschirmen mit einer Größe von 24".

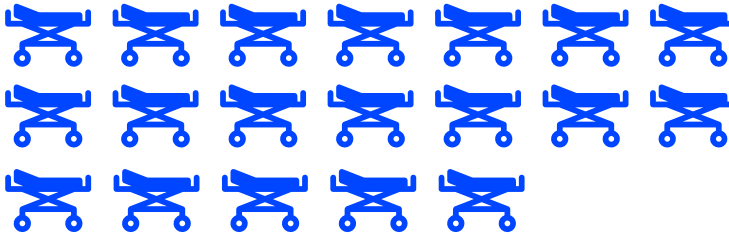

*Externe Studie 2020;
Flowpack mit 80 Tüchern.




5

Reichweitenstark

Reichweitenstudie

mit vorgetränkten niedrigalkoholischen Desinfektionstüchern

Eine praxisnahe Studie untersuchte die Flächenreichweite u. a. von vier handelsüblichen vorgetränkten niedrigalkoholischen Desinfektionstüchern. Die Prüfungen erfolgten durch die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) unter standardisierten Bedingungen (23 °C und 50 % relative Feuchtigkeit) auf einer zusammenhängenden Oberfläche. Es wurde das jeweils erste und jedes weitere fünfte Wischtuch einmal gefaltet, anschließend geprüft und aus den Ergebnissen der Mittelwert berechnet. Die Reichweite wurde im Gegenlicht beurteilt bis die Oberfläche nicht mehr vollständig benetzt war.

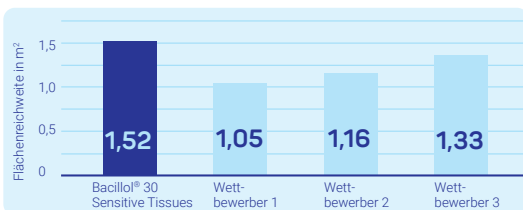

Gemessene durchschnittliche Flächenreichweite der geprüften Desinfektionstücher.

Ergebnis der Studie

Bacillo® 30 Sensitive Tissues haben mit durchschnittlich 1,52 m² pro Tuch im Vergleich mit handelsüblichen niedrigalkoholischen Desinfektionstüchern die beste Flächenreichweite im Test erzielt.

Quelle:
Manuskript in Erstellung durch die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF), Denkendorf, Deutschland.

HSB2_0030DE_0421_1

Wir forschen für den Infektionsschutz



Bacillo® 30 Sensitive Sortiment

Effektiv und sensibel: So wirkt das neue Bacillo® 30 Sensitive bei der Desinfektion von Oberflächen. Dabei ist es so bequem und einfach zu nutzen, wie man es von Bacillo® kennt.

Zusammensetzung: Ethanol 140 mg/g, Propan-2-ol 100 mg/g, Propan-1-ol 60 mg/g, Amine, N-C10-C16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure 2 mg/g.

		Packungsgröße	Art.-Nr.	PHZNR	VE
	Bacillo® 30 Sensitive Tissues				
	Flowpack	80 Tücher	981 693	5477793	6
	Flowpack	24 Tücher	981 866	5477770	12
	Bacillo® 30 Sensitive Tissues in XXL				
	Flowpack	40 Tücher	981 865	5477787	6
	Flowpack Wandhalter				
	Flowpack Wandhalter	1	981 205	4065893	1
	Bacillo® 30 Sensitive Foam				
	Flasche	750 ml	981 690	5477801	8
	Kanister	5 Liter	981 861	5477818	1





Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
2355 Wr. Neudorf
Tel.: +43 2236 646 30-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info



Wir forschen für
den Infektionsschutz

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Augenreizung, Kategorie 2, H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.



Bacillo® 30 Sensitive

Fünf Highlights

Bacillo® 30 Sensitive
Sortiment