

HARTMANN



Bacillo[®] 30 Sensitive

Leistungsstarke und schonende Flächendesinfektion



Neue Highlights:



Optimale Wirksamkeit

- Wirksam gegen Coronaviren
- Begrenzt viruzid
- Noroviruswirksam in 2 Minuten
- Tuberkulozid und mykobakterizid in 3 Minuten



Materialverträglich

- Für Displays, Tastaturen, Mobiltelefone, Tablets
- Empfindliche, nicht invasive Medizinprodukte
- Makrolon[®], Acrylglas, Polysulfon sowie Kunstleder



Reichweitenstark

- Studie belegt: Bacillo[®] 30 Sensitive Tissues desinfiziert bis zu 30 m² mehr als vergleichbare Produkte [1]



Beste Reinigungsleistung

- Studie belegt: Bacillo[®] 30 Sensitive Tissues haben die beste Reinigungsleistung im Vergleich mit dem Wettbewerb [2,3]



Hautverträglich

- Vom SGS Institut Fresenius* zertifiziert [4]
- ECARF-zertifiziert [5,6]: das erste professionelle allergiker- und asthmatikerfreundliche Flächen-Desinfektionsmittel
- Anwenderfreundlich, weil farbstoff- und parfümfrei und ohne Handschuhe verwendbar**

* Das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen

** Wenn Infektions- und Arbeitsschutz es erlauben.



Zukunftsorientiert

- Verantwortungsvoller, schonender Wirkstoffeinsatz mit 60 % weniger Tensiden/Rückständen***

*** im Vergleich zu Bacillo[®] 30

Bacillo® 30 Sensitive – Schnelldesinfektion auch für sensible Flächen mit außergewöhnlich guter Materialverträglichkeit, hohen Wirksamkeiten und besonderer Anwenderfreundlichkeit

Wirksamkeiten	
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) (EN 14476/DVV)	1 Min.
Begrenzt viruzid (EN 16777)	1 Min.
Bakterizid/levurozid (EN 13727/EN 13624/EN 16615/VAH)	1 Min.
Norovirus (EN 14476)	2 Min.
Tuberkulozid (EN 14348)	3 Min.
Mykobakterizid (EN 14348)	3 Min.
Begrenzt viruzid PLUS (EN 14476)	30 Min.
Adenovirus (EN 14476)	30 Min.
Rotavirus (EN 14476)	1 Min.



Das Bacillo® 30 Sensitive Sortiment

	Packungs- inhalt	Artikel- nummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Bacillo® 30 Sensitive Tissues	80 Tücher	981 693	16401468	6
	24 Tücher	981 866	16401480	12
Bacillo® 30 Sensitive Tissues in XXL	40 Tücher	981 865	16401474	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	09397045	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	–	10
Bacillo® 30 Sensitive Foam	750 ml Flasche	981 690	16401451	8
	5 Liter Kanister	981 861	17401045	1



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

- 1 Flowpack mit 80 Tüchern. DITF; Dienstleistungszentrum Prüftechnologien Schweins M, E-0130-TT-20 (2020). Unveröffentlichter Bericht – Daten bei der BODE Chemie GmbH.
- 2 Bei der Entfernung einer Fett-Staub-Anschmutzung, Untersuchungsbericht WL 2566A/21 vom 29.04.2021, „Vergleichende Untersuchung der Reinigungsleistung von 14 anwendungsfertigen feuchten Desinfektionstüchern“, wfK – Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld. Unveröffentlichte Studie – Daten bei der BODE Chemie GmbH.
- 3 Die getesteten anwendungsfertigen feuchten Desinfektionstücher repräsentieren mehr als 90 % des wertmäßigen Anteils (Stand Q1, 2021) des deutschen Marktes im Segment vorgetränkte Desinfektionstücher.
- 4 Segger D. (2021): SGS Study No. 204-01-0029. Unveröffentlichte Studie – Daten bei der BODE Chemie GmbH.
- 5 Zuberbier T (2021): ECARF Studie 033-R-21. Unveröffentlichte Studie – Daten bei der BODE Chemie GmbH.
- 6 Zuberbier T (2021): ECARF Studie 021-S-21. Unveröffentlichte Studie – Daten bei der BODE Chemie GmbH.

CE 0482



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. + 49 (0) 7321-36-0,
Fax + 49 (0) 7321-36-36 36
info@hartmann.info
www.hartmann.info