

# DEZINFEKČNÍ PROGRAM

OBLAST POUŽITÍ	PŘÍPRAVEK	KONCENTRACE	EXPOZIČNÍ DOBA	ÚČINNOST	ZPŮSOB POUŽITÍ		
RUCE	Hygienická dezinfekce	Sterillium®	konc.	30 s	AB <sub>1</sub> TM	vtírat do suchých rukou tak, aby byla pokožka smočena celou dobu působení se zvláštní důrazem na konečky prstů a palce	
		Sterillium® classic pure	konc.	30 s	AB <sub>1</sub> TM		
		Sterillium® med	konc.	30 s	ABTMV		
		Sterillium® Gel pure	konc.	30 s 60 s	AB <sub>1</sub> TMV ABTMV		
		Sterillium® Virugard	konc.	30 s	ABTMV		
		Manusept® basic	konc.	30 s	AB <sub>1</sub> T		
	Mýtí rukou	Baktolan® pure				na začátku pracovní směny; při viditelně znečištěných rukách; po použití toalety; před jídlem	
		Baktolan® lotion				po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (normální pokožka)	
		Baktolan® lotion pure				po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka)	
		Baktolan® balm				po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (suchá pokožka)	
		Baktolan® balm pure				po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka)	
		Baktolan® protect				při příchodu na směnu, před dlouhodobým použitím rukavic	
Péče o ruce	Baktolan® protect+ pure				k ochraně, regeneraci a výživě pokožky		
	Dezinfekce kůže	Cutasept® F	konc.	15 s	AB <sub>1</sub> T	před vpichy, zaváděním kanyl apod. na místech s malým počtem tukových žláz	
		Cutasept® G	konc.	1 min		před operačními zákroky na místech s malým množstvím tukových žláz	
	Eradikace MRSA - Dekontaminace těla a vlasů	Stellisept® med	konc.	30 s	A	1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nechat působit, poté opláchnout	
		Stellisept® med foam	konc.	60 s	A	1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nemusí se oplachovat	
		Stellisept® med gloves	konc.	60 s	A	1x denně otřít tělo a vlasy pacienta navlhčenými ubrousky, nemusí se oplachovat	
NÁSTROJE	Dekontaminace	Bomix® plus	0,5%	15 min	AB <sub>1</sub>	ponořit do pracovního roztoku tak, aby byly smočeny všechny části; po vyjmutí opláchnout tekoucí vodou a osušit	
			2%	5 min			
			3%	15 min			
		Korsolex® plus	2%	30 min	AB <sub>1</sub>		
			1%	60 min			
			1,5%	15 min			
	Korsolex® med AF	0,75%	30 min	AB <sub>1</sub> TM			
	Druhý stupeň dezinfekce	Korsolex® basic	1%	60 min	ABV	ponořit do pracovního roztoku tak, aby byly smočeny všechny části; po vyjmutí opláchnout tekoucí vodou a osušit	
			2%	15 min			
	Vyšší stupeň dezinfekce	Korsolex® PAA	konc.	15 min	ABCTMV	vyšší stupeň - ponořit tak, aby všechna dezinfikovaná místa byla smočena, po uplynutí expoziční doby vyjmout, opláchnout sterilní vodou a osušit	
		Korsolex® basic	5%	4 h	ABCTMV		
	Čištění nástrojů	Bodedex® forte	0,5% - 1%	5 - 10 min		čistit ponořené pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou	
	Dezinfekce odsávacích přístrojů	Mikrobac® dent	2%	30 min	AB <sub>1</sub> TV	1x denně - po skončení pracovní směny	
Strojový reprocessing endoskopů	Korsolex® Endo-Cleaner	0,5%	5 min		při teplotě 45 - 55 °C		
	Korsolex® Endo-Disinfectant	1%	5 min	ABCTMV	při teplotě 50 - 55 °C		
PLOCHY A POVRCHY	Rychlá dezinfekce postříkáním	Bacilloi® AF	konc.	30 s	AB <sub>1</sub> TM	nastříkat na suchou plochu, rozetřít	
		Bacilloi® 30 Foam	konc.	30 s	AB <sub>1</sub>		
	Rychlá dezinfekce otřením	Bacilloi® Tissues	utěrka	30 s	AB <sub>1</sub> TM	otřít plochu nebo předmět utěrkou tak, aby byly vlhké po celou expoziční dobu	
		Bacilloi® 30 Tissues	utěrka	30 s	AB <sub>1</sub>		
		Kohrsolin® extra Tissues	utěrka	2 h	ABTMV		
		Mikrobac® Tissues	utěrka	1 min	AB <sub>1</sub>		
	Čištění a dezinfekce	Mikrobac® forte	0,5%	1 h	AB <sub>1</sub>	vytřít nebo otřít, nechat zaschnout	
			1%	30 min	AB <sub>1</sub>		
			2,5%	1 h	AB <sub>1</sub> T		
		Kohrsolin® FF	0,5%	1 h	AB <sub>1</sub>		
			1%	15 min	AB <sub>1</sub>		
			1,5%	1 h	AB <sub>1</sub> T		
			4%	1 h	ABTMV		
			2%	6 h	ABCTMV		
			0,25%	1 h	AB <sub>1</sub>		
		Kohrsolin® extra	0,5%	15 min	AB <sub>1</sub>		
			2%	2 h	ABTM		
			3%	2 h	ABTMV		
			2%	4 h	ABCM		
			Dismozon® plus	0,4%	1 h		AB
				1,2%	30 min		ABT
		0,8%		1 h	ABC		
	0,8%	4 h		ABCTM			
Dismofix® G	0,25% - 100%				čištění toalet, koupelen, sanitárních místností		

## Vysvětlivky:

<b>A</b>	<b>baktericidní</b> (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>B</b>	<b>fungicidní na kvasinky</b> podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 ( <i>Candida albicans</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>B<sub>1</sub></b>	<b>virucidní</b> podle ČSN EN 14476 ( <i>Adenovirus, Poliovirus, MNV</i> )
<b>B<sub>1</sub></b>	<b>virucidní na obalené viry</b> vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN 14476 ( <i>Vacciniavirus</i> ) nebo podle DVV/RKI ( <i>Vacciniavirus, BVDV</i> )
<b>C</b>	<b>sporicidní</b> podle ČSN EN 14347 nebo na spóry <i>Clostridium difficile</i> ribotyp 027 (Kohrsolin® FF)
<b>T</b>	<b>tuberkulocidní</b> podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 ( <i>Mycobacterium terrae</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>M</b>	<b>mykobaktericidní</b> podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 ( <i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>V</b>	<b>fungicidní</b> podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 ( <i>Candida albicans, Aspergillus niger</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH