



Schaumverband  
Foam dressing  
Pansement en mousse  
Schuimverband  
Medicazione a schiuma  
Aposito de espuma  
Penso de espuma  
Επίθεμα από αφρώδες υλικό<sup>®</sup>

Pénový obvaz na rány  
Penový obváz na rány  
Opatrunek piankowy  
Habkötés  
Губчатая повязка  
Skumförband  
Skumförbindung  
Vaahitosidost  
Sårbandsasje  
泡沫塑料包扎紗布  
ضمادة اسفنجية القوام

使用说明

PermaFoam® 是一种具有透氣、防水、防菌聚氨基酯面層功能的泡沫

塑膠敷料。

《凹貼型PermaFoam》是一種具有透氣、防水、防菌聚氨基酯面層功能的

自黏泡塑膠敷料。它的邊緣同時塗有聚丙烯酸酯粘膠，可穩貼傷口

四周。

《空腔型PermaFoam》是一種不含面層的聚氨基酯泡沫塑膠敷料。

特性与作用

《PermaFoam®》能有效吸收滲液，並同時為傷口製造濕潤環境，加速

傷口愈合。

《PermaFoam®》吸收器秘密和刀刃一樣緊密，也可黏貼自如。

《PermaFoam®》備有黏貼邊，因此毋須多加固定敷料，也可黏貼自如。

《PermaFoam®》不會黏傷口。

適用於

《PermaFoam®》特別適用於處理中度至大量滲液傷口的治療。

《空腔型PermaFoam》適用於較深和裂開傷口。可搭接後用於創口

包括。

《氣管切開術型PermaFoam》適用於氣管切開術時的插管固定和其它

特殊應用場合。

使用方法

在更換敷料前需清潔傷口。應根據傷口的大小而選擇適合尺碼

的《PermaFoam》、《舒貼型PermaFoam》、《瓶椎型PermaFoam》

和《凹貼型PermaFoam》，敷料應與傷口邊緣重疊約1至2厘米。傷口

越大，敷料與傷口邊緣重疊的範圍越寬，需要時，可自行裁剪敷料。

《PermaFoam》將白色邊緣《PermaFoam》蓋在傷口上，米色的面層

朝上，隨後以紗布包扎固定。

《凹貼型PermaFoam》：當使用《PermaFoam》時，請勿撕開包裝紙，把白色邊緣膠蓋在傷口上，壓緊黏貼。

《瓶椎型PermaFoam》：撕開包裝紙，使用格氏氏溶液或其他溶液先行

濕潤，以減弱黏貼的黏力。

《空腔型PermaFoam》：撕開包裝紙，將《PermaFoam》直接黏貼在傷口上。

《氣管切開術型PermaFoam》：撕開包裝紙，將《PermaFoam》直接黏貼在傷口上。

《凹貼型PermaFoam》：撕開包裝紙，將《PermaFoam》直接黏貼在傷口上。

《瓶椎型PermaFoam》：撕開包裝紙，將《PermaFoam》直接黏貼在傷口上。

《空腔型PermaFoam》：撕開包裝紙，將《PermaFoam》直接黏貼在傷口上。

《氣管切開術型PermaFoam》：撕開包裝紙，將《PermaFoam》直接黏貼在傷口上。

《凹貼型PermaFoam》：撕開包裝紙，將《PermaFoam》直接黏貼在傷口上。