

**Veroval<sup>®</sup>**  
**medi.connect**  
***Návod k použití***

## Obsah

1.	Vytvoření účtu .....	4
2.	Vytvoření profilu hosta .....	11
3.	Proces přihlášení .....	13
4.	Změna hesla .....	14
5.	Zapomenuté heslo .....	16
6.	Připojení zařízení .....	19
7.	Odstranění zařízení .....	21
8.	Přenos dat .....	24
9.	Zvolení uživatelské paměti .....	27
10.	Hlavní menu .....	30
a.	Přehledy a oznámení .....	31
b.	Krevní tlak .....	34
a)	Analýza a vysvětlení symbol a grafů .....	34
b)	Manuální zadání hodnot .....	38
c)	Smazání hodnot .....	41
d)	Změna období měření .....	43
e)	Filtrování hodnot .....	45
f)	Úprava hodnot .....	47
g)	Vytvoření sdílených hodnot a hodnot ve formátu pdf .....	49
c.	EKG .....	51
a)	Analýza a vysvětlení symbolů a grafů .....	51
b)	Smazání hodnot .....	56
c)	Změna období záznamů .....	58
d)	Filtrace hodnot .....	60
e)	Úprava hodnot .....	62
f)	Vytvoření sdílených hodnot / hodnot ve formátu pdf .....	66
11.	Report .....	68
a.	Vytvoření celkového reportu .....	68
b.	Vytvoření filtrovaného reportu .....	71
12.	Medikace .....	74
a.	Přidání medikaci .....	74
b.	Smazání medikace medication .....	76
13.	Změna údajů v profilu .....	78
14.	Změna jazyka .....	80
15.	Nastavení připomínky .....	83
a.	Měření .....	83
b.	Medikace .....	86

<b>16.</b>	<b>Změna jednotek .....</b>	<b>88</b>
<b>17.</b>	<b>Změna formátu data .....</b>	<b>90</b>
<b>18.</b>	<b>Nejčastější dotazy .....</b>	<b>92</b>
<b>19.</b>	<b>Kontaktování podpory .....</b>	<b>94</b>
<b>20.</b>	<b>Předání zpětné vazby .....</b>	<b>96</b>
<b>21.</b>	<b>Odhlášení .....</b>	<b>98</b>
<b>22.</b>	<b>Smazání účtu .....</b>	<b>99</b>
<b>23.</b>	<b>Podmínky používání .....</b>	<b>101</b>

## 1. Vytvoření účtu

Veroyal® medi.connect

Přihlášení Čeština

E-mail \*

Heslo \*

[Zapomněli jste heslo?](#)

Přihlášení

Vytvořit účet

[Vytvořit profil hosta](#)

1. Otevřete aplikaci a klikněte na „Vytvořit účet“.

Souhlas

**Udělení souhlasů při používání aplikace:**

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (zejména kontaktních údajů a zdravotních údajů) společností Paul Hartmann AG v souvislosti s používáním aplikace Veroyal a s ní souvisejících služeb.

**Podrobné informace o jednotlivých postupech při zpracování údajů naleznete ve [zvláštním oznámení o ochraně osobních údajů](#).**

Souhlasím s [podmínky používání](#).

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (zejména kontaktních údajů a zdravotních údajů) za účelem odběru informačního zpravodaje a/ nebo jiných propagačních informací e-mailem od společnosti Paul Hartmann AG, a to i mimo oblast používání služeb aplikace Veroyal.

**Poznámka:** Vaše souhlasy jsou dobrovolné a můžete je kdykoli odvolat s platností do budoucna v rámci nastavení. Pokud bude

Uložit

2. Kliknutím na přepínač přijmete **zásady zpracování osobních údajů a podmínky používání** a klikněte na „Další“.

O2.CZ 12:24 33%

← Vytvořit účet

1 2

Přihlašovací údaje Údaje v profilu

E-mail \*

Heslo \*

8 a více znaků 1 velké písmeno  
1 speciální znak 1 číslo

Potvrzení hesla \*

Další

3. Do prázdných políček vyplňte osobní údaje.

O2.CZ 12:25 33%

← Vytvořit účet

✓ 2

Přihlašovací údaje Údaje v profilu

Jméno \*

Příjmení \*


Datum narození \*  
23/06/1998

Pohlaví \*

Vytvořit účet

4. Do prázdných políček vyplňte údaje vašeho profile a klikněte na „Vytvořit účet“.

02.CZ 12:26 33 %

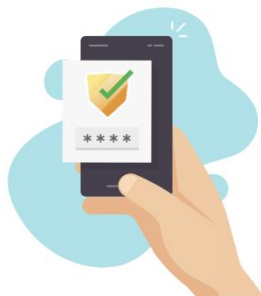

### Účet Veroval® medi.connect úspěšně vytvořen

Na e-mail jsme vám poslali zprávu. Kliknutím na odkaz v e-mailu prosím ověřte svůj účet do 24 hodin.

Přihlášení

5. Pokud bylo vytvoření účtu úspěšné, budete přesměrováni na výše uvedenou obrazovku. Klikněte na odkaz v e-mailové adrese. Po potvrzení účtu klikněte na „**Přihlášení**“.

#### Byl vám zaslán následující e-mail:

dekujeme za Váš zájem o naši aplikaci Veroval medi.connect.

Pro aktivaci uživatelského účtu klepnete na následující odkaz:

<https://veroval-mediconnect.info/cs-CZ/#/user/registration-completion/10949751-2614-4d63-be4f-f2fa4cfbae62>

V případě dotazu nebo problému napište na e-mailovou adresu:

[info@hartmann.cz](mailto:info@hartmann.cz)

Upozorňujeme, že uvedené odkazy jsou aktivní pouze 24 hodin po odeslání tohoto e-mailu.

S pozdravem

Váš tým Hartmann

Přihlášení

Čeština

E-mail \*

Heslo \*


[Zapomněli jste heslo?](#)

Přihlášení

Vytvořit účet

[Vytvořit profil hosta](#)

6. Vyplňte svůj e-mail a heslo a klikněte na „**Přihlášení**“.

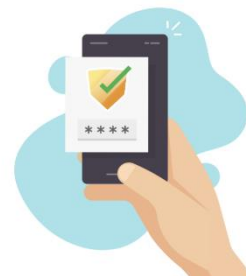


Vyberte zařízení Veroval® pro přenos dat

Vybrat zařízení

Přeskočit

7. Nyní máte dvě možnosti: kliknout buď na „**Vybrat zařízení**“ nebo na „**Přeskočit**“.

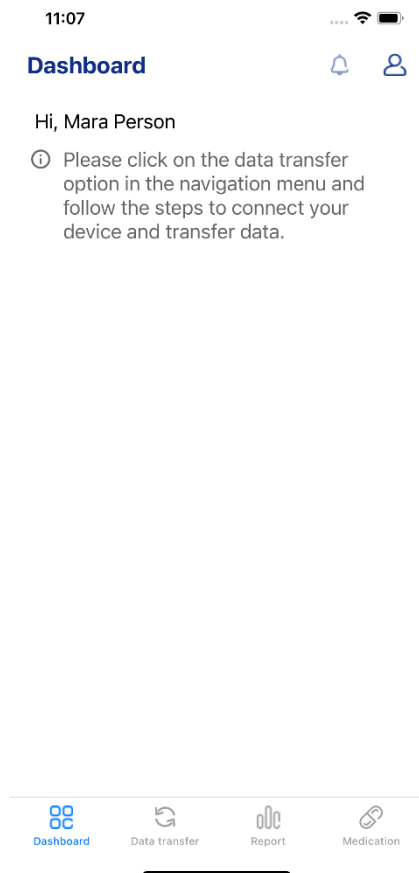

8. Pokud jste zvolili „**Přeskočit**“ budete přesměrováni na hlavní menu.




9. Pokud jste zvolili „**Vybrat zařízení**“, vyberte kliknutím své zařízení na něj a klikněte na „**Připojit zařízení**“. Ujistěte se, že je zařízení zapnuté, a umístěte jej do blízkosti mobilního telefonu. Pokud chcete proces přerušit, klikněte na „**Přejít na hlavní menu**“.





10. Vyberte uživatelskou paměť, do které jste uložili data v zařízení. Poté klikněte na „Přenos dat“. Pokud párování nebylo úspěšné, ujistěte se, že jste v mobilním telefonu zapnuli funkci Bluetooth, a zkuste to znovu.

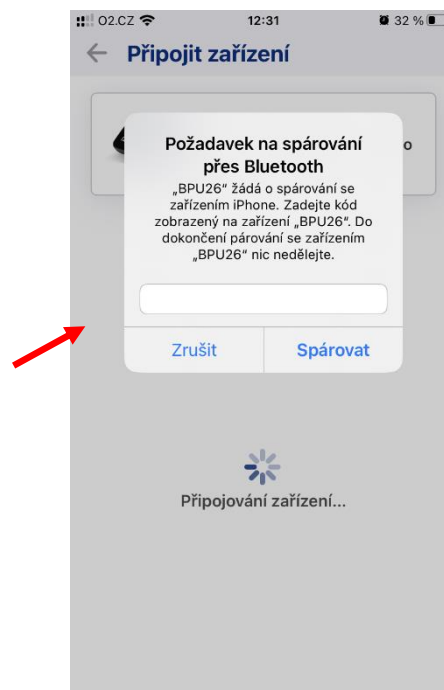

11. Zadejte šestimístný kód, který se zobrazí na vašem zařízení.

02.CZ 12:31 32%



**Úspěšné spárování s Veroval®  
compact + horní rameno**

12. Vyčkejte na dokončení přenosu dat. Ujistěte se, že je tlakoměr během celého procesu zapnutý. V závislosti na množství dat může tento proces trvat několik minut.

02.CZ 12:36 30%

**Hlavní menu**



Dobrý den, Jan Faltýnek

Přehledy

**Krevní tlak** [Informace](#)

23 června 2023 12:35 (Poslední měření)



Vaše hodnoty jsou na horní hranici normy.

SYS **132** mmHg

DIA **83** mmHg

Tepová frekvence **96** tepů/min

Hlavní menu

Přenos dat

Report

Medikace

13. Po úspěšném přenosu dat se zobrazí hlavní menu, kde uvidíte své poslední měření.

## 2. Vytvoření profilu hosta

O2.CZ 12:23 33%

Veroval®medi.connect

Přihlášení Čeština

E-mail \*

Heslo \*

[Zapomněli jste heslo?](#)

Přihlášení

Vytvořit účet

[Vytvořit profil hosta](#)

1. Otevřete aplikaci a klikněte na „Vytvořit profil hosta“.

O2.CZ 12:36 30%

Host

Vytvořte profil hosta a používejte Veroval® medi.connect.

Na jedno zařízení je povolen jeden uživatel. V případě poškození telefonu nebo aktualizace aplikace může dojít ke ztrátě dat.

Pokračovat

Zpět na přihlášení

2. Klikněte na „Pokračovat“.

O2.CZ 12:36 30 %

← Vytvořit uživatelský profil

Příjmení \*

Datum narození \*  
23/06/1998

Pohlaví \*  
 Muž    Žena    Ostatní

Výška      Hmotnost  
 170      cm      65,0      kg

Vytvořit uživatelský profil

3. Vyplňte do prázdných políček své osobní údaje a klikněte na „Vytvořit uživatelský profil“.



4. Klikněte na „Vybrat zařízení“ nebo „Přeskočit“ a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 1, krok 6-12.

### 3. Proces přihlášení

02.CZ 12:27 32%

Veroval®medi.connect

Přihlášení Čeština

E-mail \*

Heslo \*


Zapomněli jste heslo?

Přihlášení

Vytvořit účet


Vytvořit profil hosta

1. Otevřete aplikaci a vyplňte prázdná políčka. Poté klikněte na „Přihlášení“.

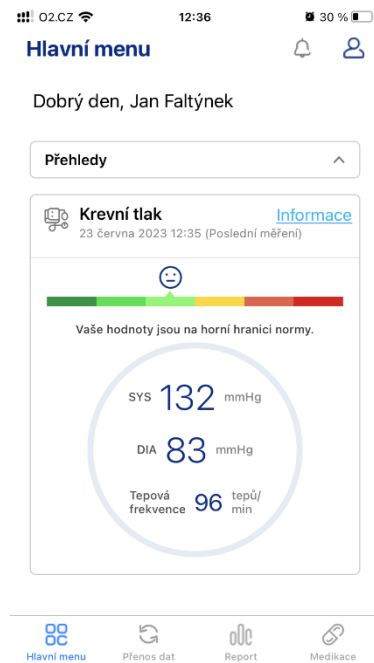


2. Pokud byl proces přihlášení úspěšný, budete přesměrováni do hlavního menu.

## 4. Změna hesla

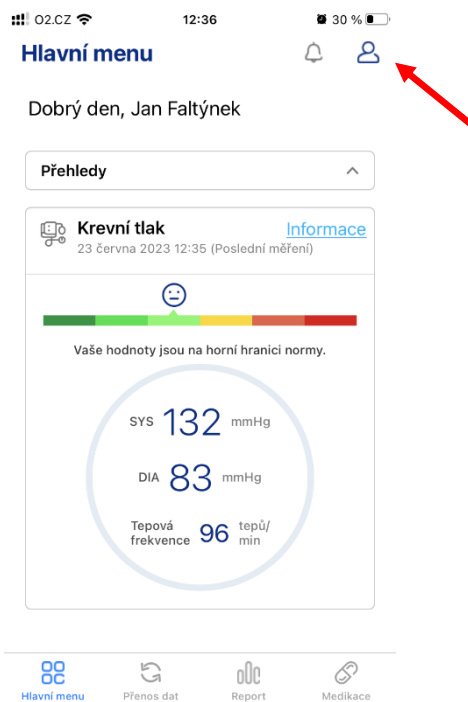

1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky v pravém horním rohu.

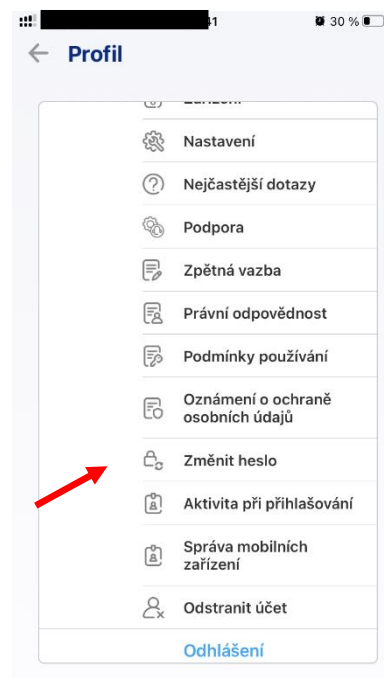

2. Klikněte na „Změnit heslo“.

Heslo k účtu Veroval® medi.connect  
změníte pomocí uvedeného  
formuláře.

Stávající heslo \*

Nové heslo \*

Potvrzení hesla \*

[Zapomněli jste heslo?](#)

Uložit

3. Vyplňte prázdná políčka a klikněte na „Uložit“.

Heslo k účtu Veroval® medi.connect  
změníte pomocí uvedeného  
formuláře.

Stávající heslo \*

Nové heslo \*

Fal

Potvrzení hesla \*

Fakofako.1919

[Zapomněli jste heslo?](#)


Uložit

**Veroval® medi.connect**  
Heslo bylo úspěšně změněno.


OK

4. Pokud jste heslo úspěšně změnil, zobrazí se potvrzovací okno. Klikněte na „OK“.

## 5. Zapomenuté heslo

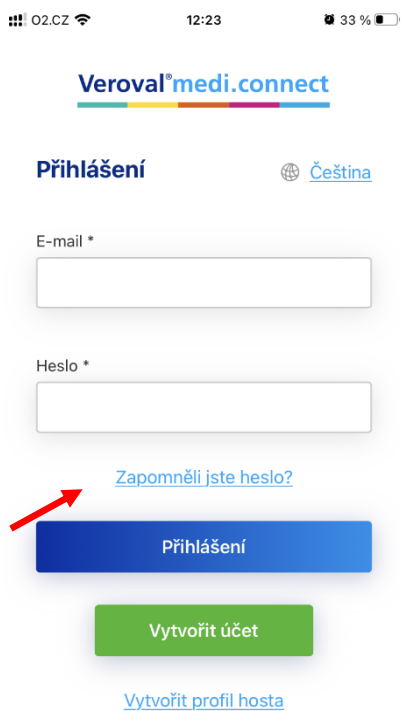

1. Otevřete aplikaci a klikněte na tlačítko „**Zapomněli jste heslo?**“

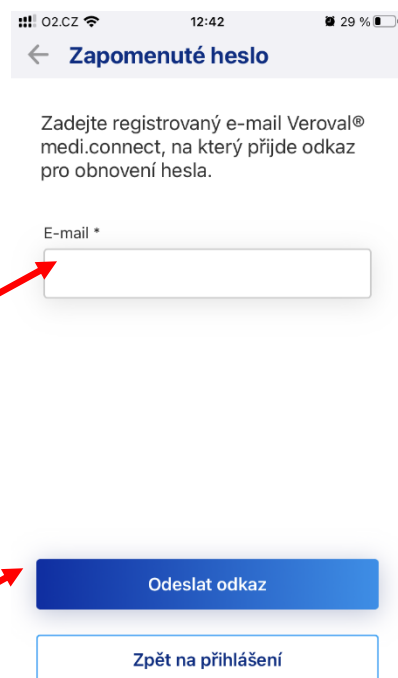

2. Zadejte svou registrovanou e-mailovou adresu a klikněte na „**Odeslat odkaz**“.





### Odeslat odkaz na obnovu hesla

Odkaz na obnovu hesla byl odeslán

**i** Otevřete si zprávu, která vám byla zaslána na váš registrovaný e-mail. Pokud e-mail ve své schránce nevidíte, podívejte se do spamu. Kliknutím na odkaz v e-mailu obnovíte své heslo.

Zpět na přihlášení

3. Pokud jste zadali správnou e-mailovou adresu, budete přesměrováni na výše uvedenou obrazovku. Klikněte na odkaz.

Byl vám zaslán následující e-mail:

požádal/a jste o obnovení hesla k Vašemu účtu. Klepněte prosím na dále uvedený odkaz, abyste obnovení hesla potvrdil/a:  
<https://veroval-mediconnect.info/cs-CZ#/authentication/reset-password/4ed2c4be-7361-4746-b373-23a2056eec21>

Při zadávání hesla dbejte na psaní velkých a malých písmen.

V případě otázek nebo problémů se s námi můžete spojit na této e-mailové adrese:  
[info@hartmann.cz](mailto:info@hartmann.cz)

Dovolujeme si připomenout, že vložené odkazy jsou platné pouze následujících 24 hodin od odeslání tohoto e-mailu.

S pozdravem,

Váš tým Hartmann

◀ Gmail 12:43 28 %  
veroval-mediconnect.info

**Veroval<sup>®</sup>medi.connect**

### Změnit Heslo

Nové heslo \*

8 a více znaků  
 1 velké písmeno  
 8 a více znaků  
 1 číslo



Zopakovat heslo \*

**Uložit**

Impresum | Oznámení o ochraně osobních údajů | Podmínky používání


4. Po kliknutí na odkaz v e-mailu budete přesměrováni na tuto obrazovku. Vyplňte prázdná políčka a klikněte na „Uložit“.

## 6. Připojení zařízení

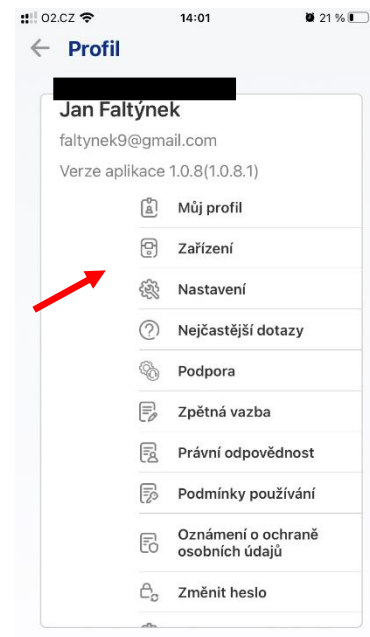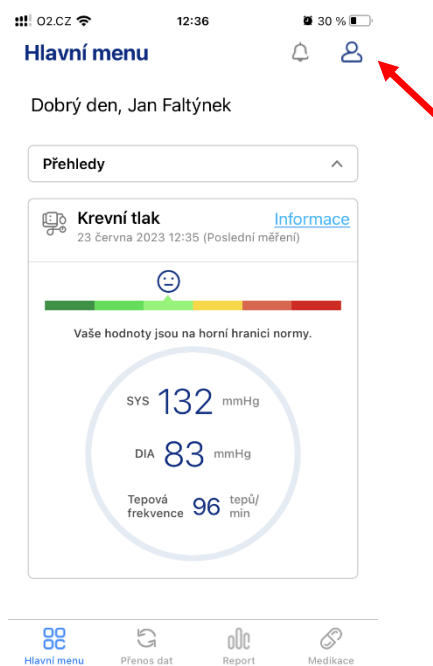

1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky v pravém rohu.

2. Klikněte na „Zařízení“.

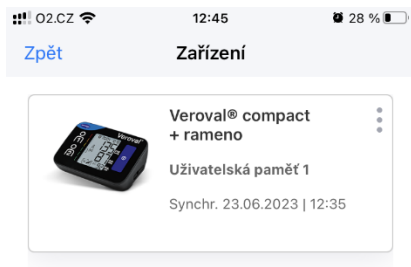


3. Klikněte na „**Přidat nové zařízení**“




4. Vyberte vaše zařízení, umístěte ho poblíž vašeho mobilního telefonu a klikněte na „**Připojit zařízení**“.  
Poté postupujte podle kroků v kapitole 1, kroky 10-12.

## 7. Odstranění zařízení

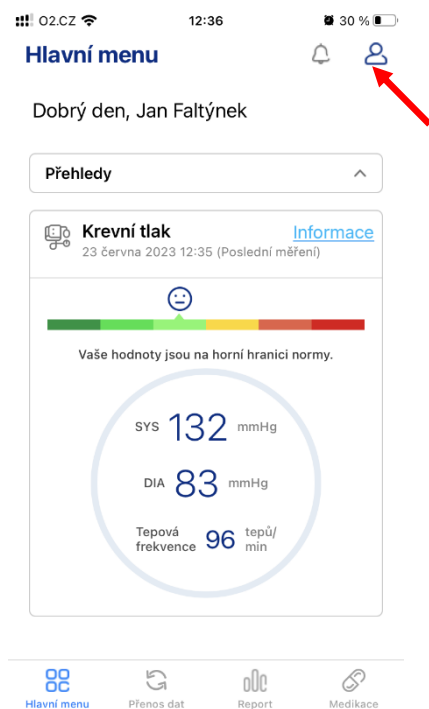

1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky v pravém rohu.

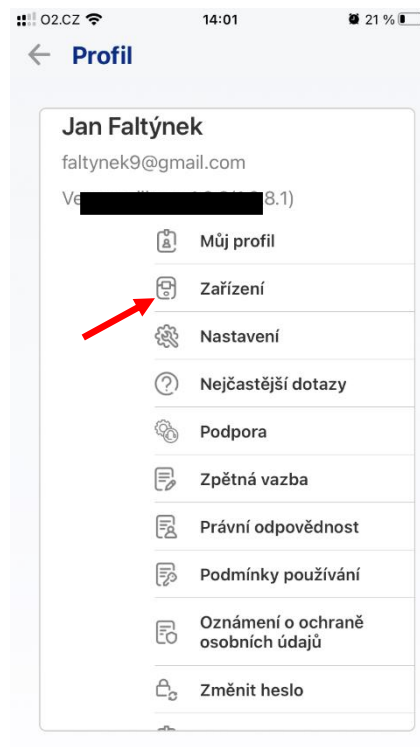


2. Klikněte na „Zařízení“.



Přidat nové zařízení

3. Vyberte zařízení, které chcete odstranit, kliknutím na tři tečky.

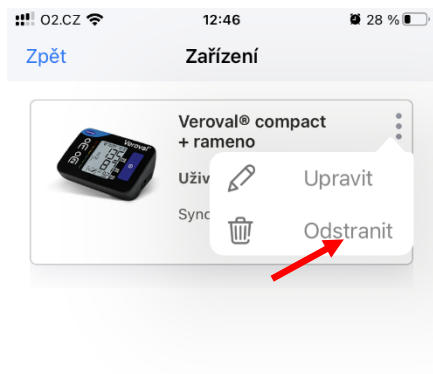


Přidat nové zařízení

4. Klikněte na „**Odstranit**“.




5. Proces dokončíte kliknutím na „**Odstranit**“.

## 8. Přenos dat

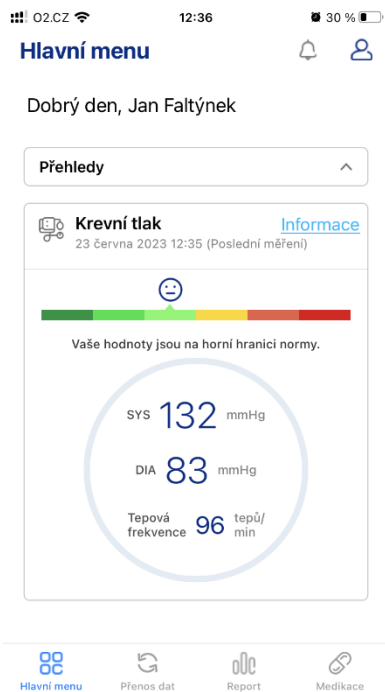

1. Otevřete aplikaci a klikněte na „Přenos dat“.

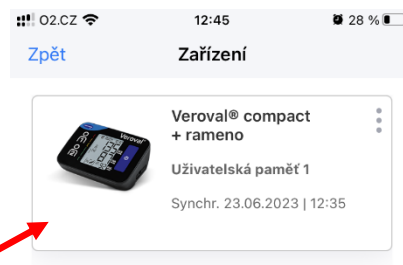



Přidat nové zařízení

2. Klikněte na zařízení, z něhož si přejete data přenést data.



## Přenos dat

Zařízení Veroval® musí být zapnuté. Zapněte ho stisknutím  nebo  a vyberte zařízení v aplikaci.



Veroval® compact  
+ rameno  
Uživatelská paměť 1  
Synchr. 23.06.2023 | 12:35

Přenos dat

3. Klikněte na „**Přenos dat**“.  
Zapněte zařízení a umístěte ho poblíž mobilního telefonu.



**Právě probíhá přenos dat  
z vašeho zařízení**



Stahování dat krevního tlaku 3



4. Vyčkejte do dokončení přenosu dat.



**Data byla úspěšně přenesena**

5. Pokud byl přenos dat úspěšný, zobrazí se následující obrazovka.

## 9. Zvolení uživatelské paměti

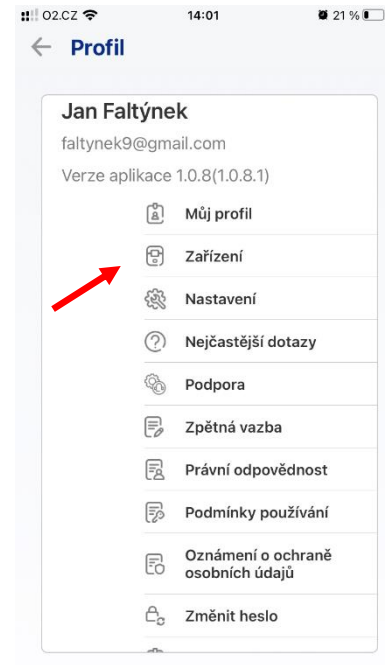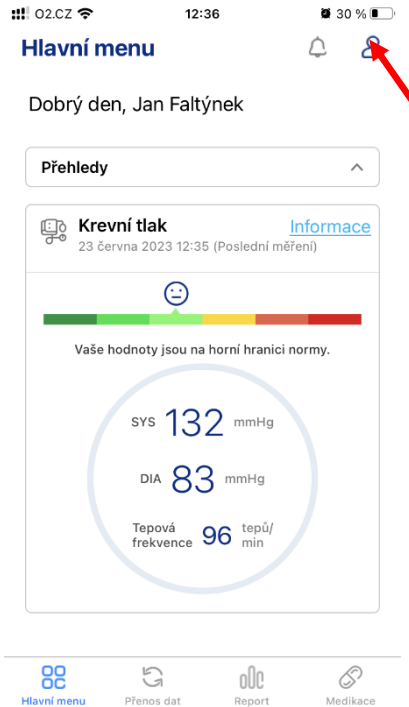


1. Otevřete zařízení a klikněte na ikonu v pravém rohu

2. Klikněte na „Zařízení“.



Přidat nové zařízení

3. Klikněte na tři tečky.

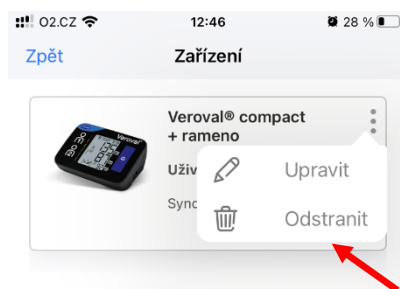

Přidat nové zařízení

4. Klikněte na „Upravít“.



Veroval® compact + rameno

Vyberte uživatelskou paměť

Uživatel 1

Uživatel 2



Veroval® compact + rameno

Vyberte uživatelskou paměť

Uživatel 1

Uživatel 2

Změnou uživatelské paměti se vaše nová vybraná data sloučí se starými daty, která již byla přenesena.


**Pokračovat v přenosu**



5. Vyberte uživatele zaškrtnutím kolečka.



6. Nyní můžete přenášet data od vybraného uživatele kliknutím na „**Pokračovat v přenosu**“. Postupujte podle kroků uvedených v kapitole 8, kroku 4 a 5.

## 10. Hlavní menu


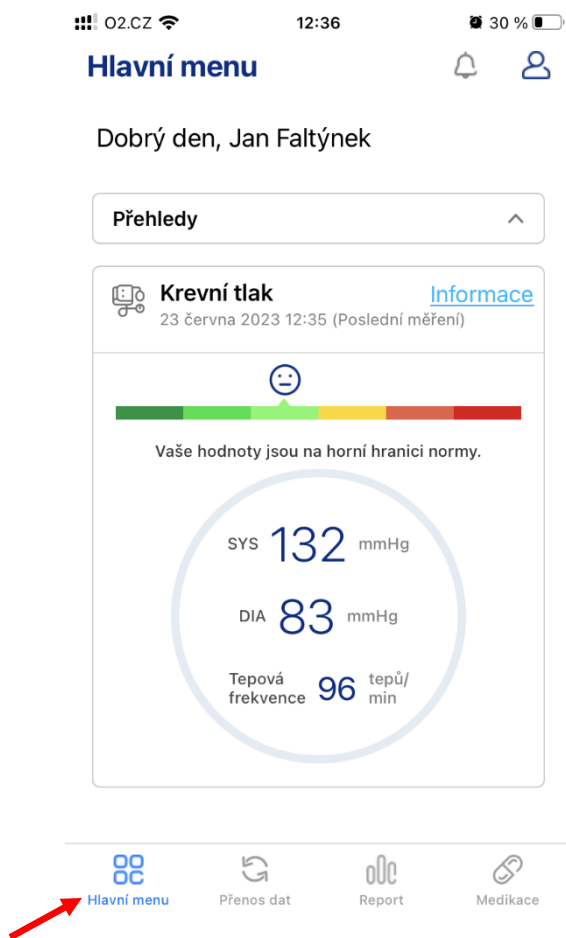


Po přihlášení se automaticky zobrazí hlavní menu. Hlavní menu lze také otevřít kliknutím na „**Hlavní menu**“.

## a. Přehledy a oznámení

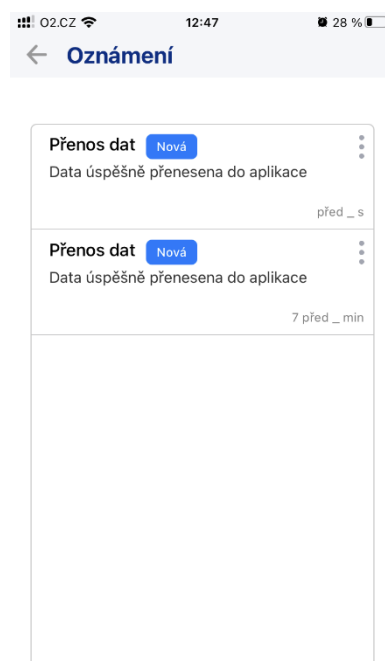
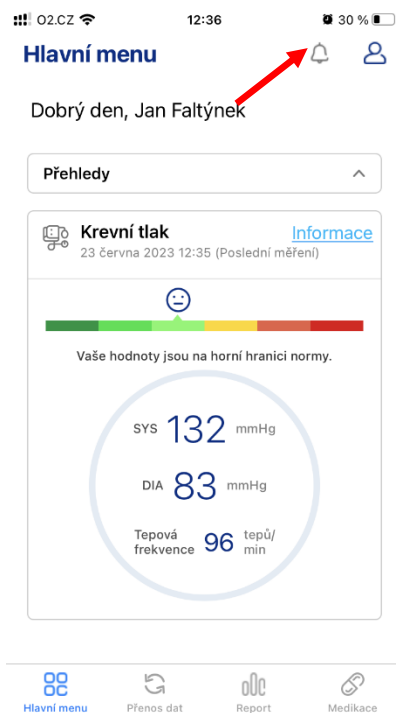


Oznámení se zobrazí po kliknutí na ikonu **zvonku**.

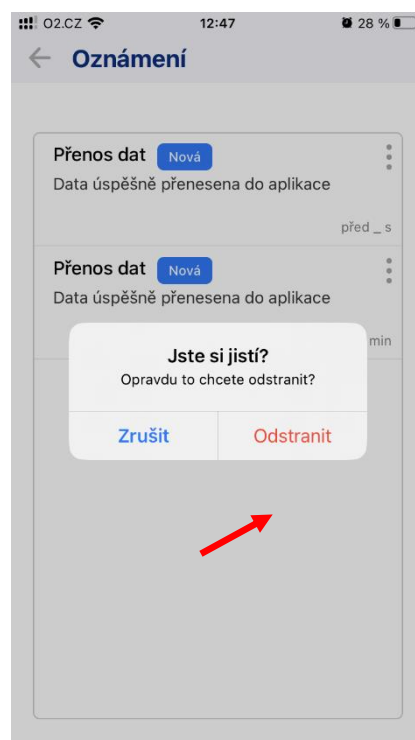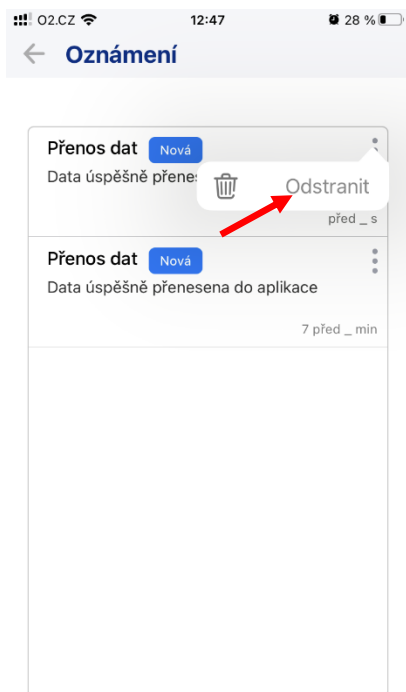

Oznámení lze smazat kliknutím na tři tečky a na „**Odstranit**“. Zobrazí se okno. Potvrďte smazání kliknutím na „**Odstranit**“.




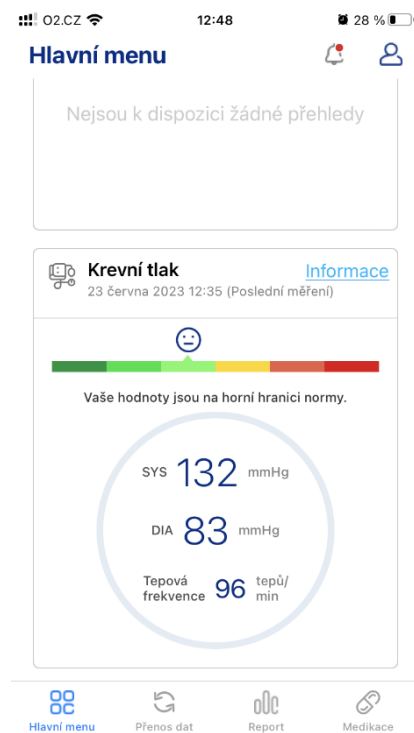
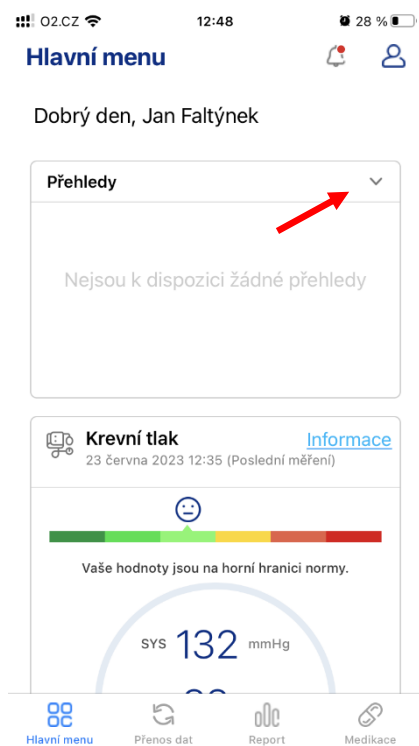


Kliknutím na "**Přehledy**" dojde k rozbalení okna. Přehledy poskytují informace o hodnotách a, pokud jsou naměřené hodnoty příliš vysoké, mohou zobrazit varování.



## b. Krevní tlak

### a) Analýza a vysvětlení symbol a grafů


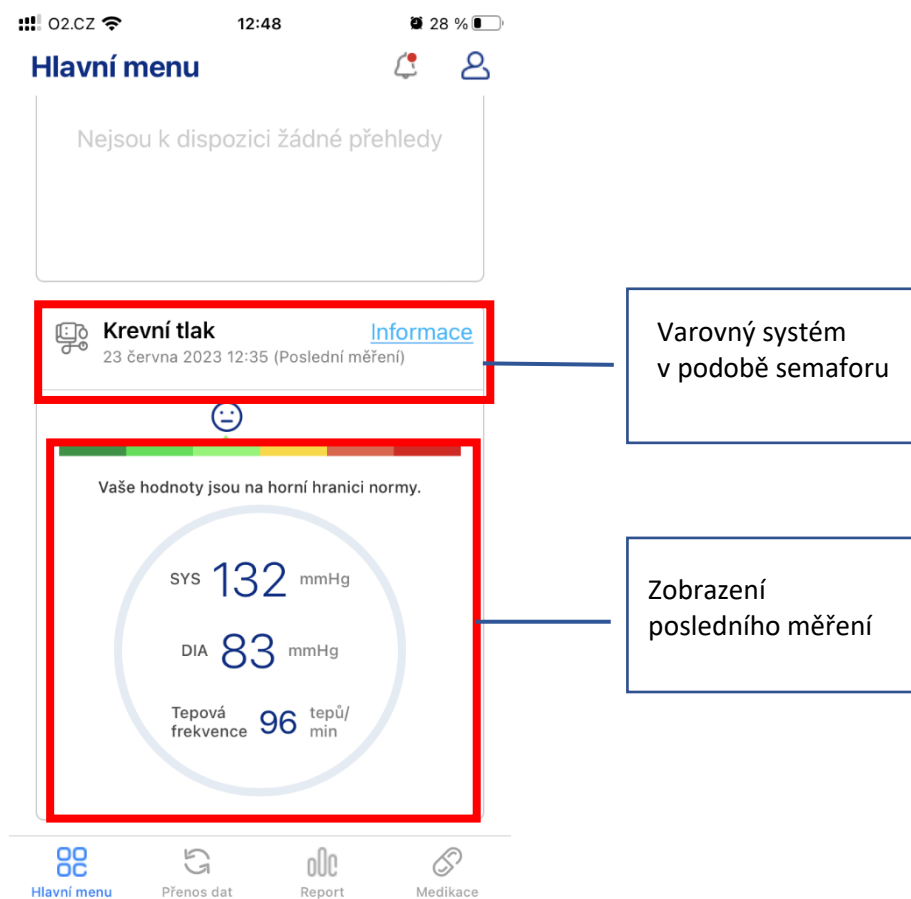


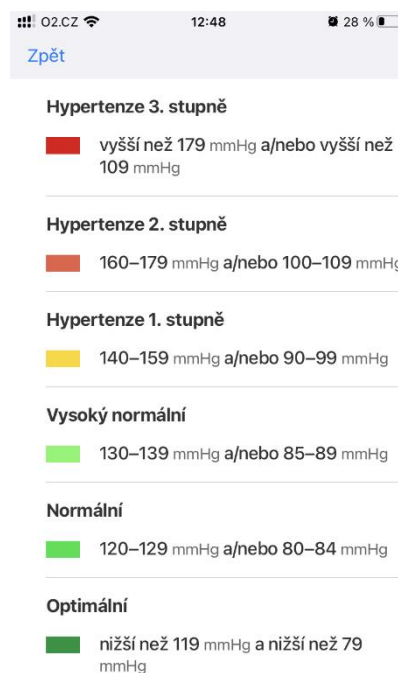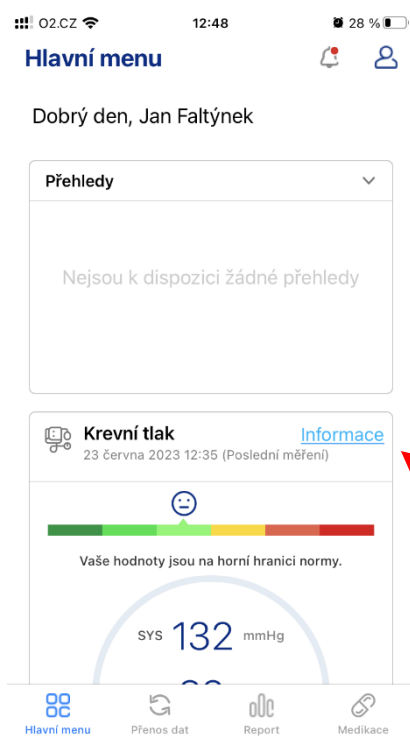

Chcete-li výsledky vašeho měření klasifikovat, po kliknutí na tlačítko „**Informace**“ se otevře soubor s informacemi na základě pokynů ECS / ESH.

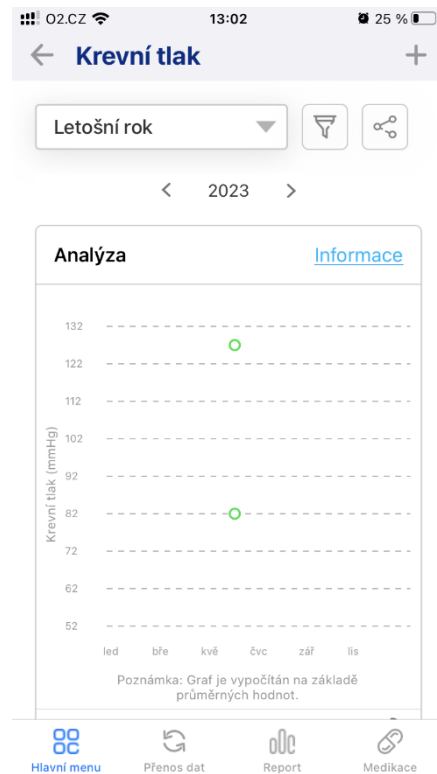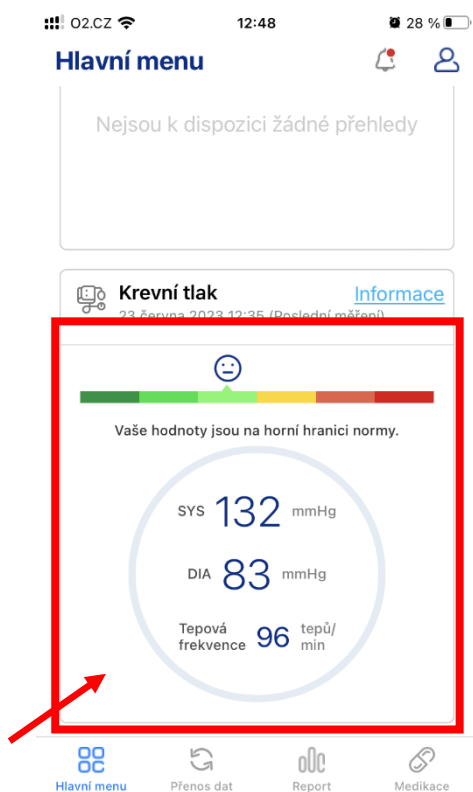


Kliknutím na obrazovku se otevře další obrazovka, která zobrazuje měření graficky.

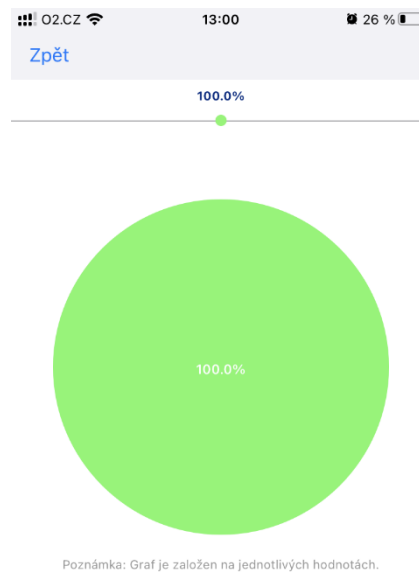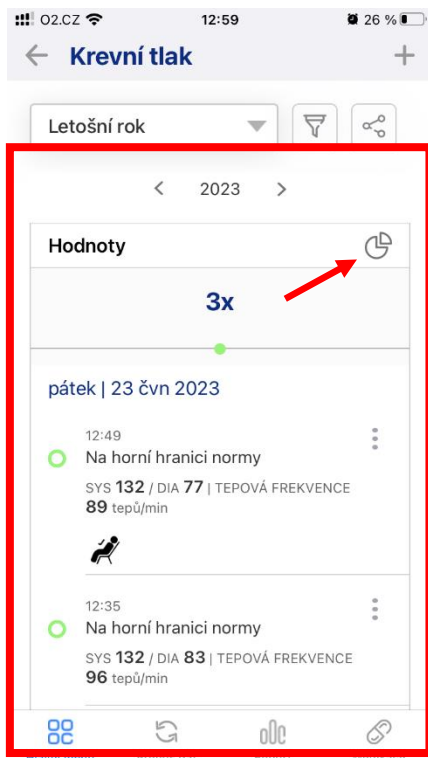


Sekce měření uvádí všechna měření v chronologickém pořadí, poskytuje informace a klasifikuje jejich hodnoty (optimální, hypertenze 1. stupně atd.). Kliknutím na ikonu v pravém rohu se zobrazí koláčový graf. Koláčový graf znázorňuje klasifikaci naměřených hodnot.

## b) Manuální zadání hodnot

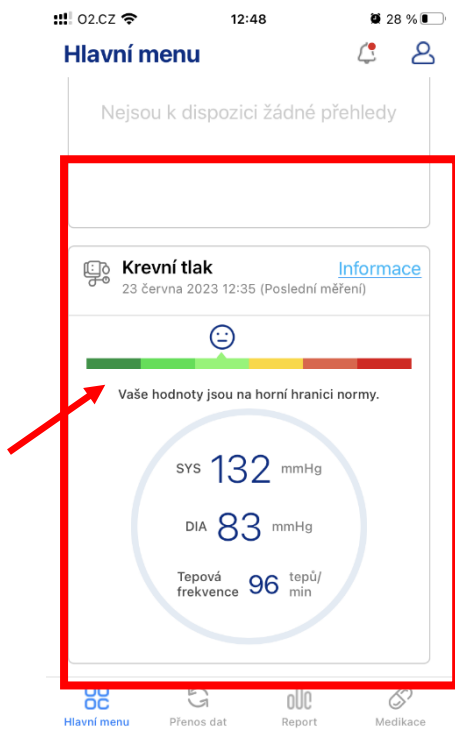

1. Klikněte na obrazovku s informacemi o vašem krevním tlaku.

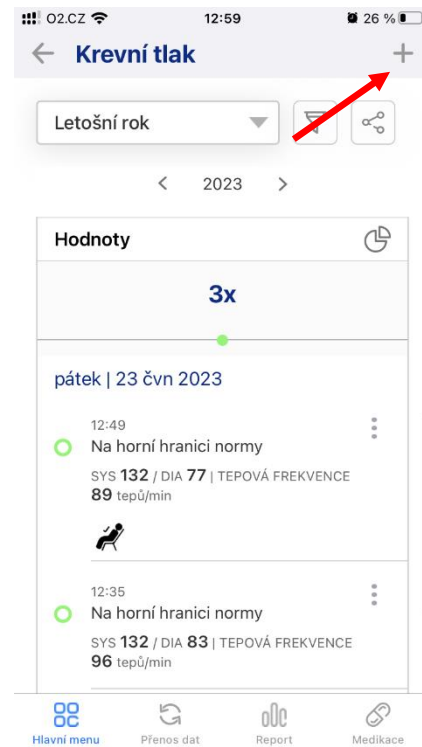

2. Otevře se další obrazovka. Klikněte na plus v pravém rohu.

02.CZ 13:01 25 %

Zpět Přidat měření Uložit

Datum \* 23.06.2023 Čas \* 13:01

Systola \* 120 mmHg Diastola \* 80 mmHg

Tepová frekvence \* 70 bpm

Přidat podrobnosti

Ukazatele

AFIB AFIB

Medikace

Nějaké příznaky?

02.CZ 13:01 25 %

Zpět Přidat měření Uložit

Ukazatele

AFIB AFIB

Medikace

Nějaké příznaky?

Závratě Ztížené dýchání

Poruchy vidění Bolesti hlavy

Bolest na hrudi

Komentáře

3. Zadejte datum, čas, systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak a puls. Kliknutím na „**Přidat podrobnosti**“ přidáte další informace.

4. Volitelně můžete přidat indikátory, léky, příznaky, které se vyskytly, nebo komentáře.

02.CZ 13:01 25 %

Zpět Přidat měření Uložit



Datum \* 23.06.2023 Čas \* 13:01

Systola \* 120 mmHg Diastola \* 80 mmHg


Tepová frekvence \* 70 bpm

Přidat podrobnosti

Ukazatele

AFIB   R3

Medikace


+ 

Nějaké příznaky?


5. Vyplňte prázdná políčka a klikněte na „Uložit“.




### c) Smazání hodnot

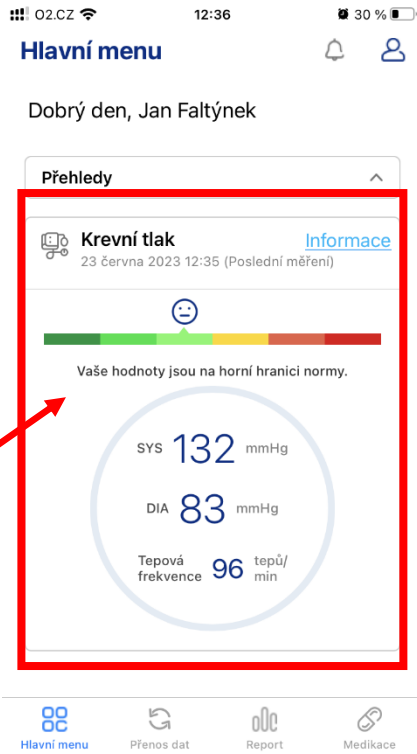


1. Klikněte na obrazovku s informacemi o vašem krevním tlaku.

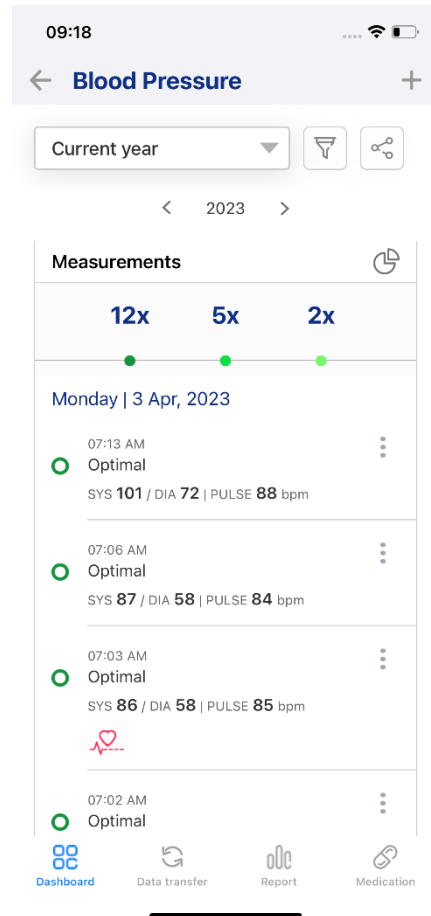

2. Přejděte dolů do sekce „Měření“.

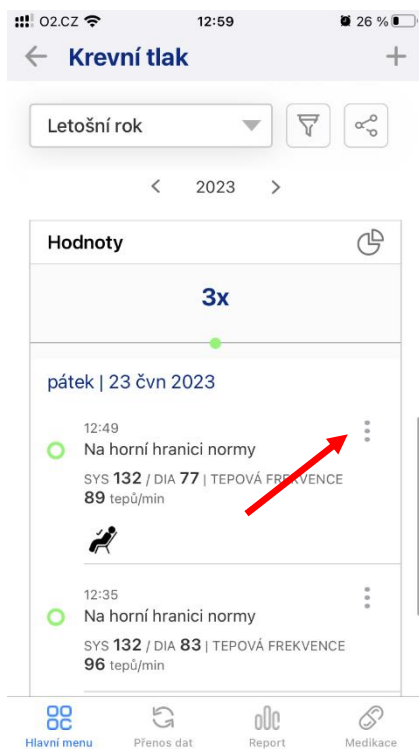


” 3. Klikněte na tři tečky. Poté klikněte na „**Odstranit**”.

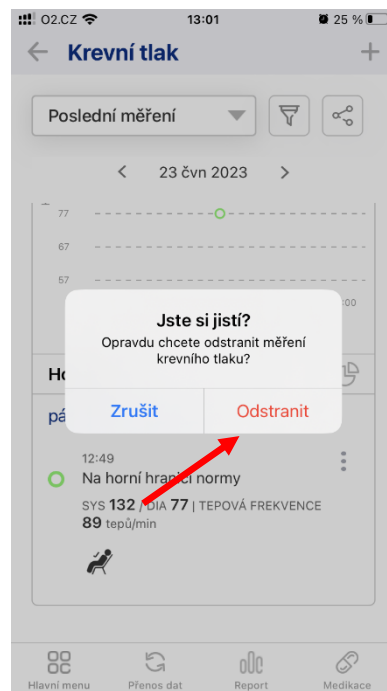


4. Klikněte na „**Odstranit**”.


#### d) Změna období měření

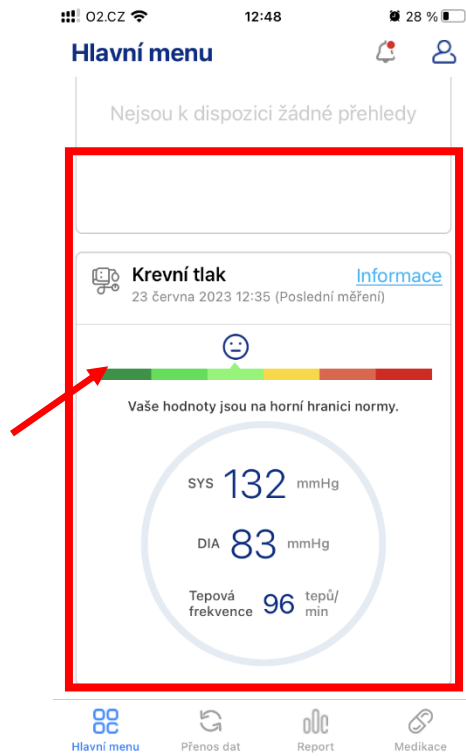


1. Klikněte na obrazovku s informacemi o vašem krevním tlaku.

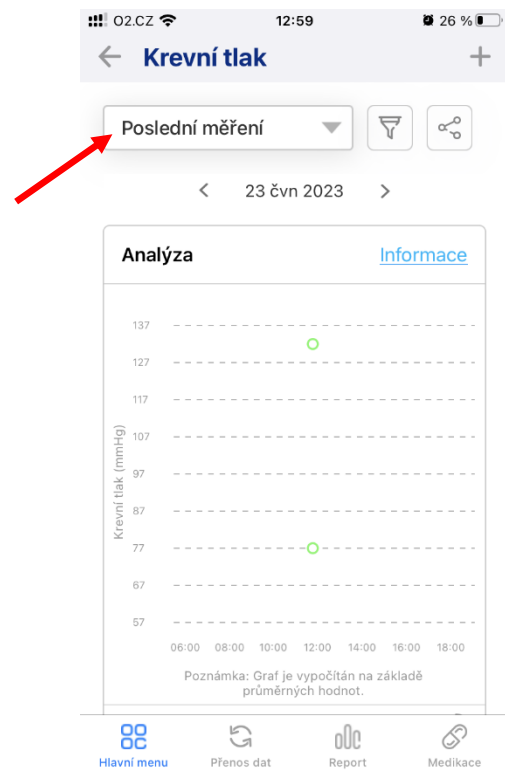

2. Klikněte na lištu nad grafem s analýzou.

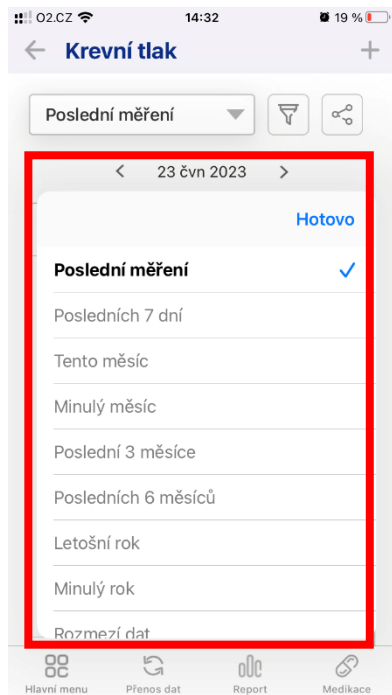


3. Kliknutím vyberte období měření.

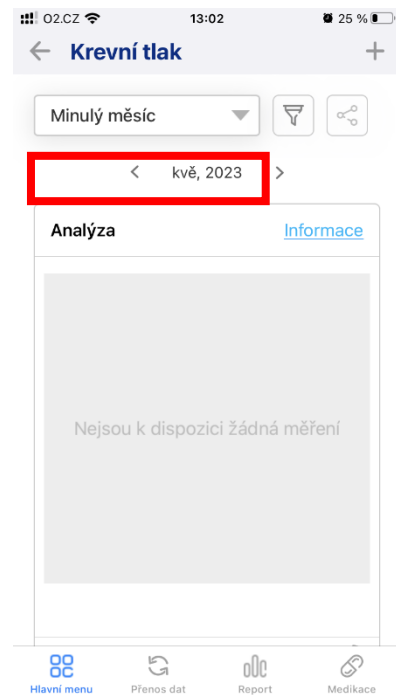


4. Lišta zobrazuje aktuální období dat.


## e) Filtrování hodnot

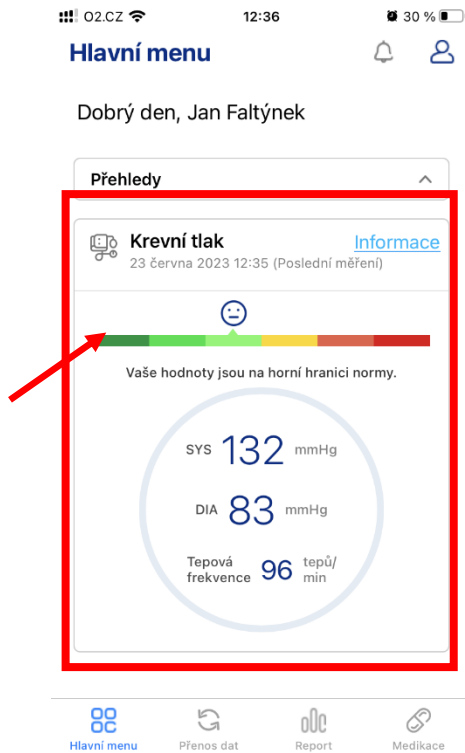

1. Klikněte na obrazovku s informacemi o vašem krevním tlaku.

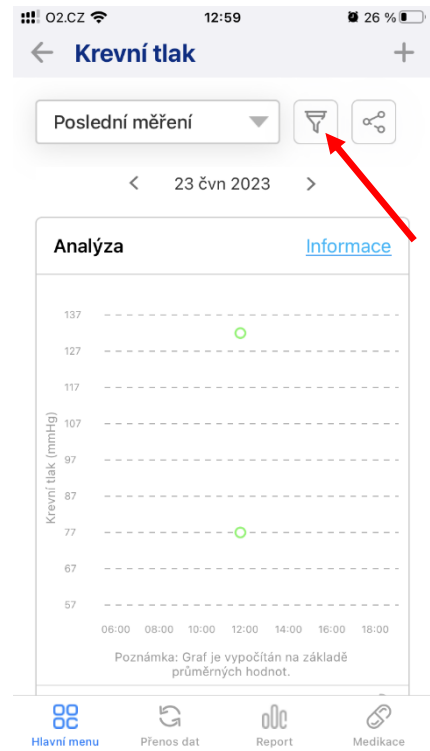


2. Klikněte na ikonu filtru.

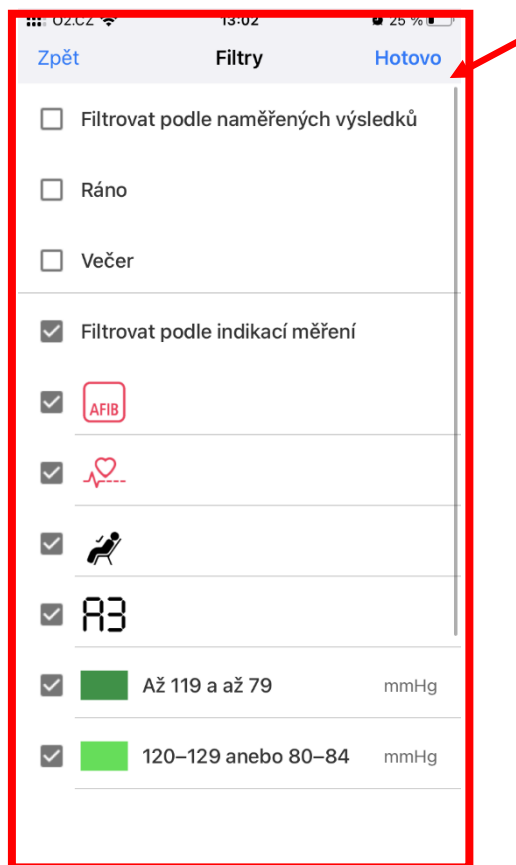


3. Otevře se další obrazovka. Kliknutím vyberte filtry. Poté klikněte na „Hotovo“.

## f) Úprava hodnot

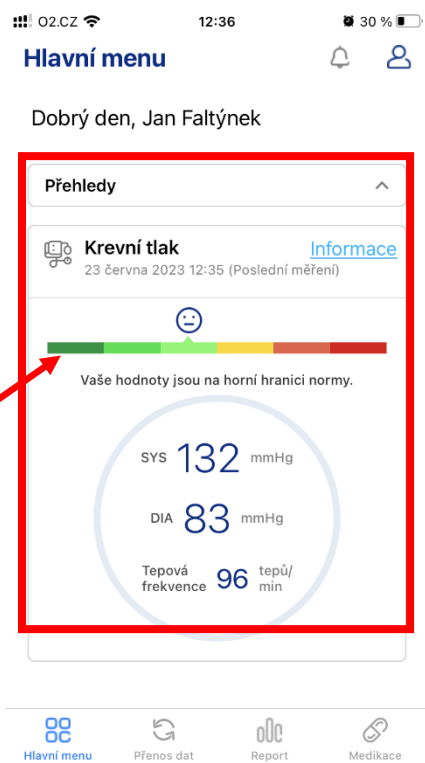

1. Klikněte na obrazovku s informacemi o vašem krevním tlaku.

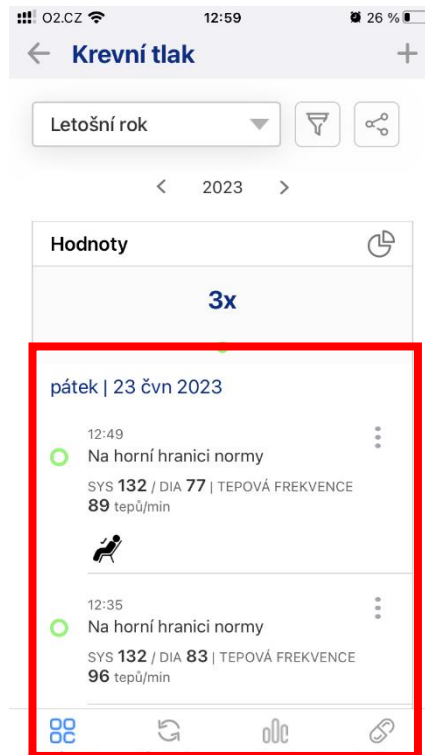

2. Klikněte na hodnotu, kterou si přejete změnit.

O2.CZ 13:02 25 %

Zpět Upravit měření Uložit

Datum \* 23.06.2023 Čas \* 12:49

Systola \* 132 mmHg Diastola \* 77 mmHg

Tepová frekvence \* 89 bpm

Přidat podrobnosti

Ukazatele


Medikace

Nějaké příznaky?

3. Kliknutím na položku můžete změnit informaci. Poté klikněte na „Uložit”.




g) Vytvoření sdílených hodnot a hodnot ve formátu pdf

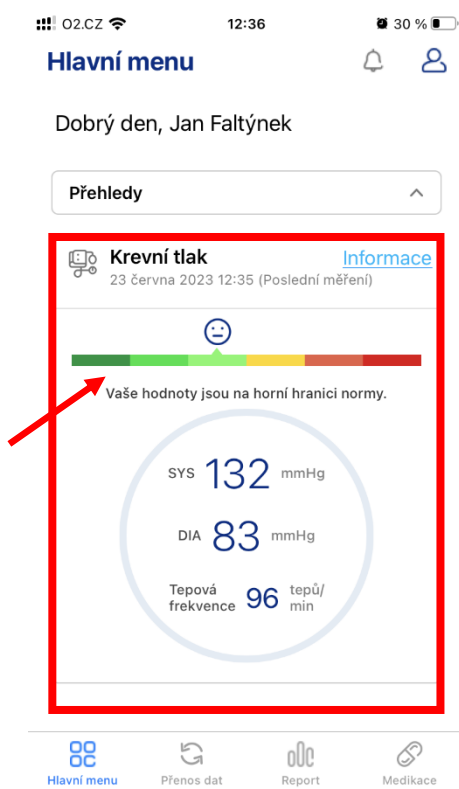

1. Klikněte na obrazovku s informacemi o vašem krevním tlaku.



2. Klikněte na ikonu sdílení.

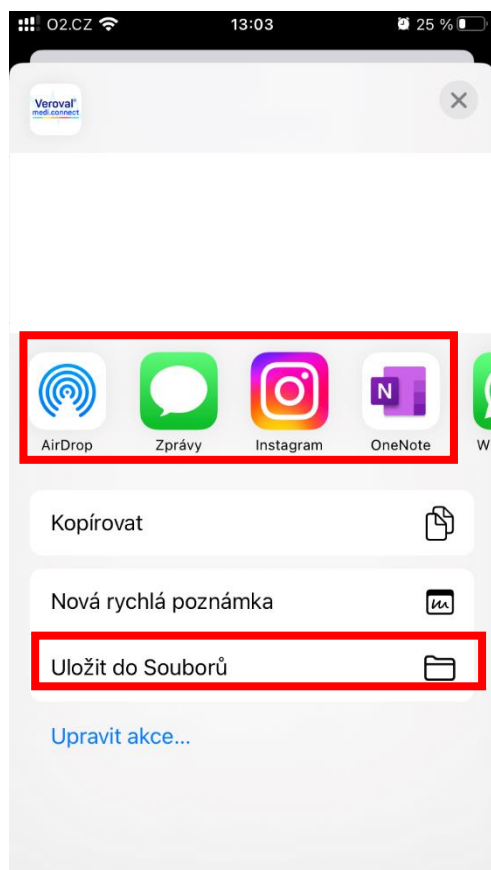


Poslat informace ostatním



Uložit informace do zařízení

3. Objeví se vyskakovací okno. Zprávu můžete sdílet e-mailem kliknutím na „Mail“. Pokud se rozhodnete vytvořit PDF, uložte ho do svých dokumentů.



- c. EKG
- a) Analýza a vysvětlení symbolů a grafů

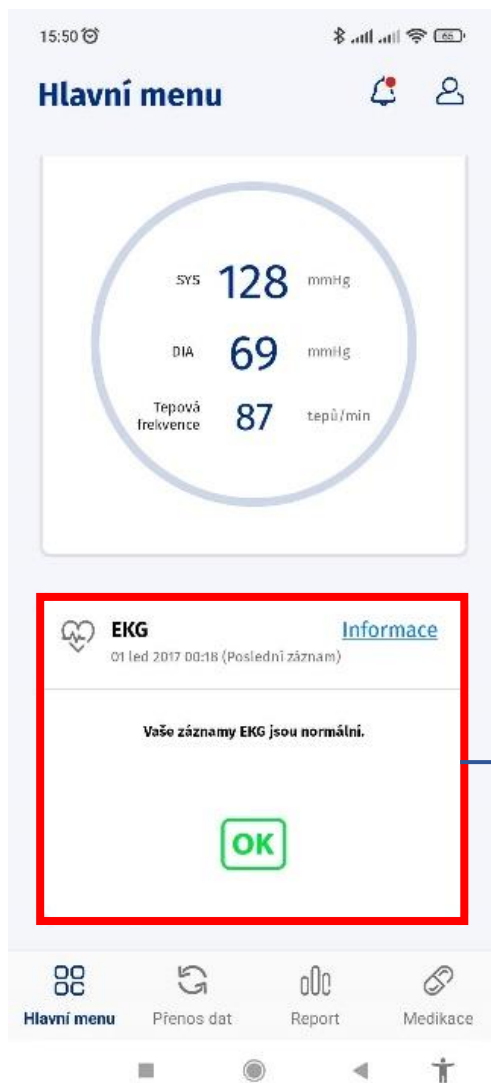


Informace o hodnotách EKG

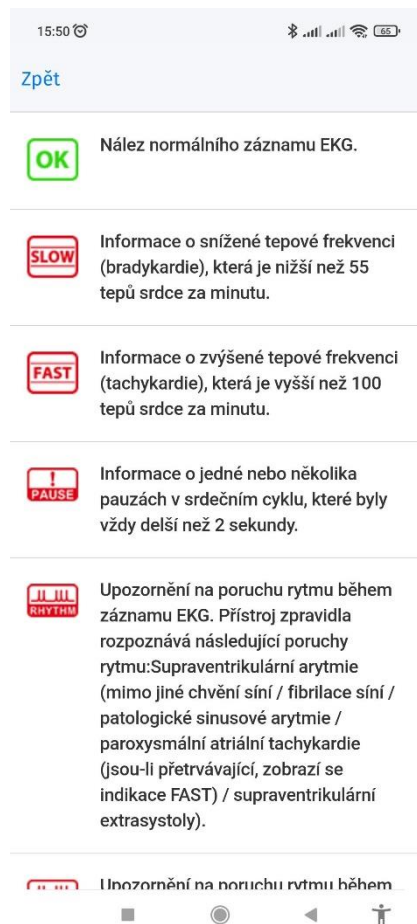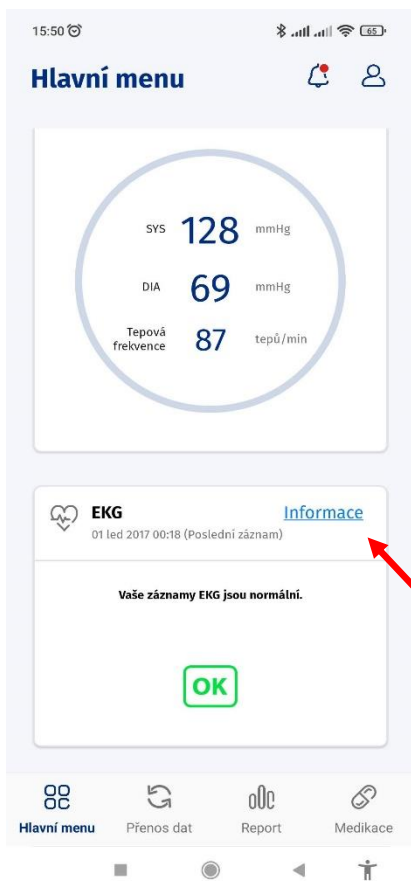

Po kliknutí na „**Informace**“ se otevře obrazovka s vysvětlením symbolů a jejich významu.

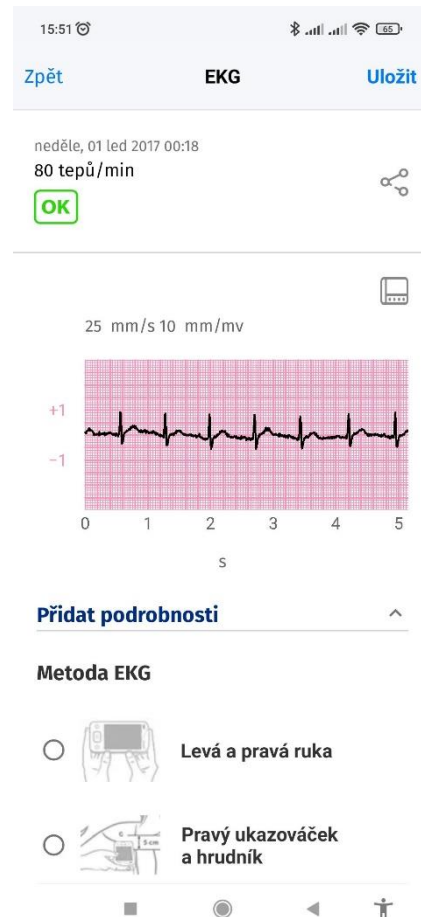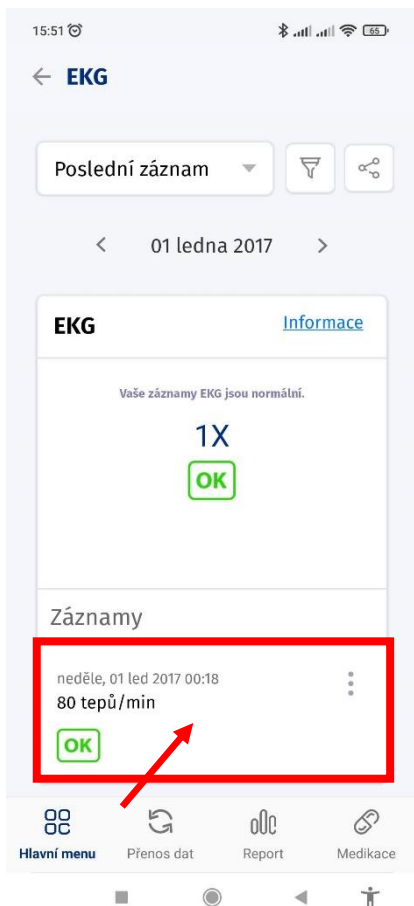

Kliknutím na záznam získáte podrobnější informace.

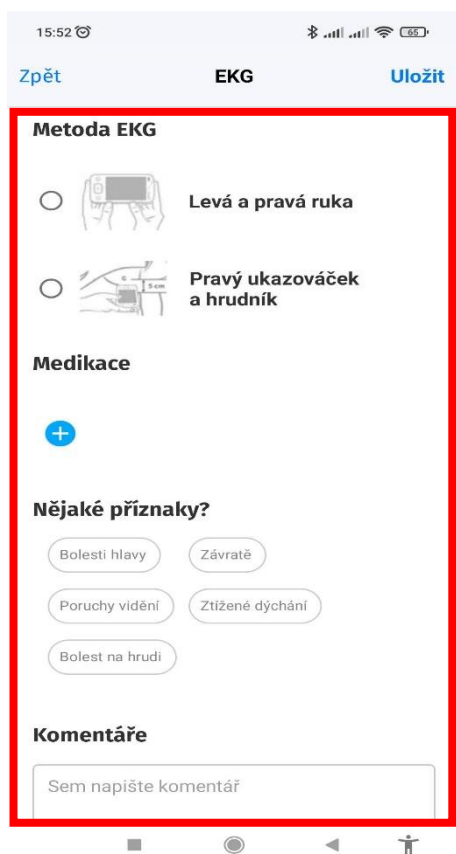

Přejděte dolů, kde můžete k záznamu přidat další informace.

15:52

Zpět EKG Uložit

neděle, 01 led 2017 00:18  
80 tepů/min

**OK**

25 mm/s 10 mm/mv

0 1 2 3 4 5  
s

**Přidat podrobnosti** ^

**Metoda EKG**



Levá a pravá ruka

Pravý ukazováček a hrudník




Kliknutím na ikonu v pravém rohu můžete záznam zobrazit na celou obrazovku.

## b) Smazání hodnot

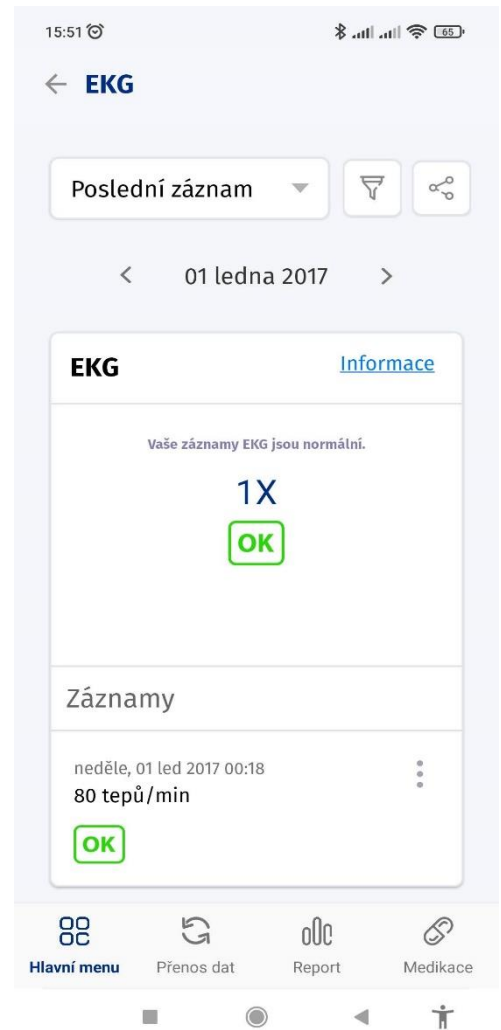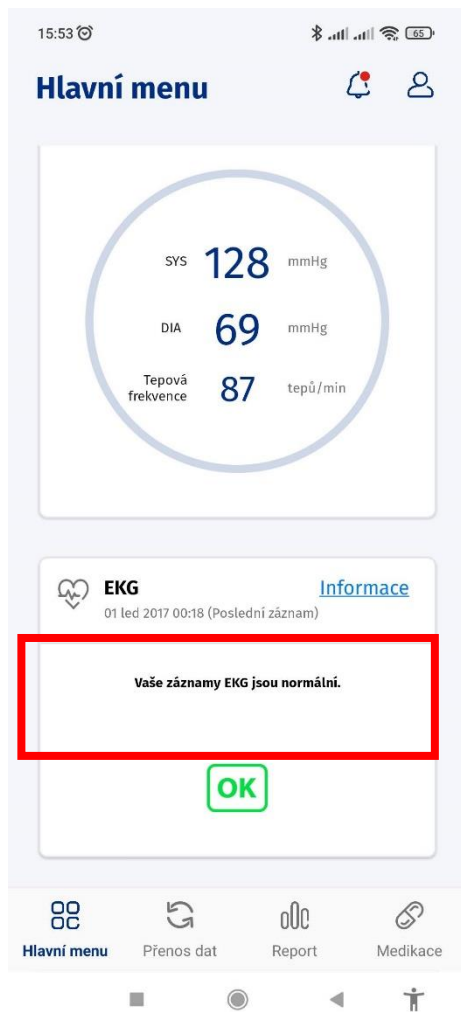


1. Klikněte na obrazovku s informacemi o vašich záznamech EKG.



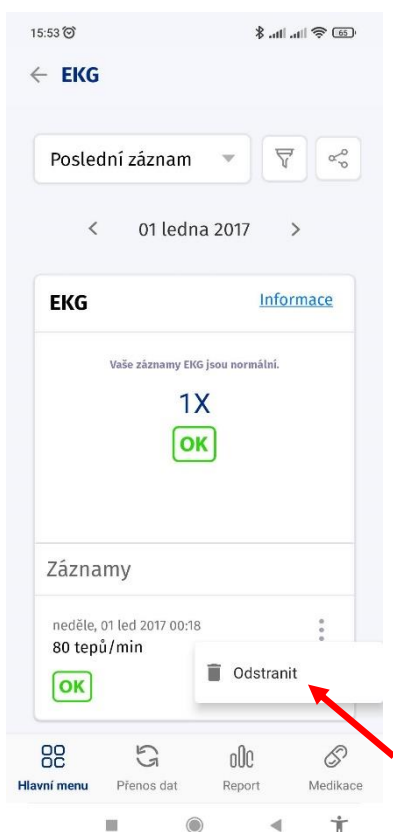


2. Klikněte na tři tečky pod záznamem, který si přejete odstranit. Poté klikněte na „Odstranit”.

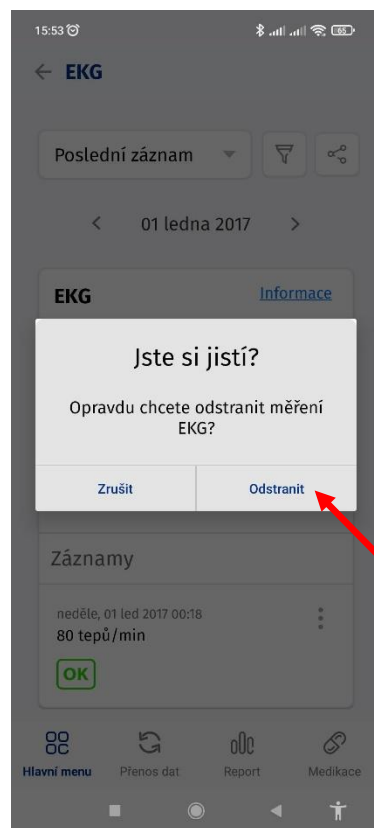


3. Otevře se vyskakovací okno. Potvrďte smazání kliknutím na „Odstranit”.


### c) Změna období záznamů

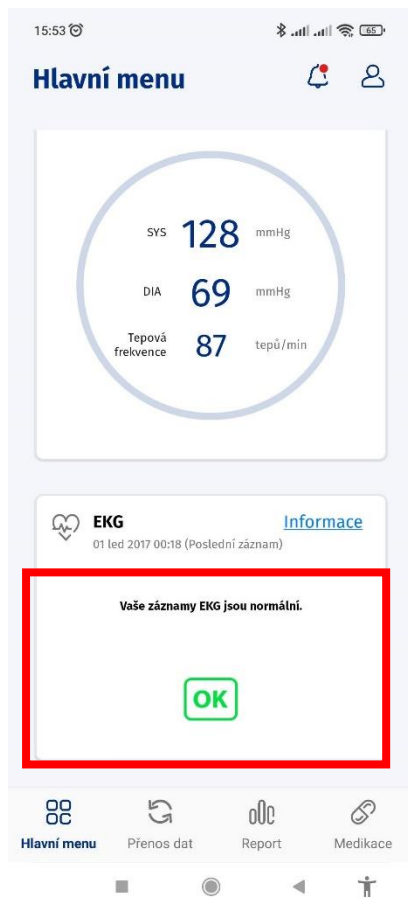

1. Otevřete aplikaci a klikněte na záznamy EKG.

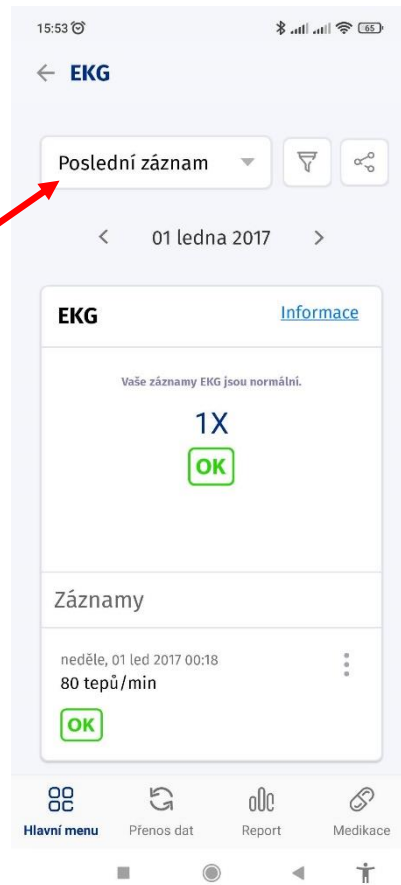


2. Klikněte na lištu nad záznamy.

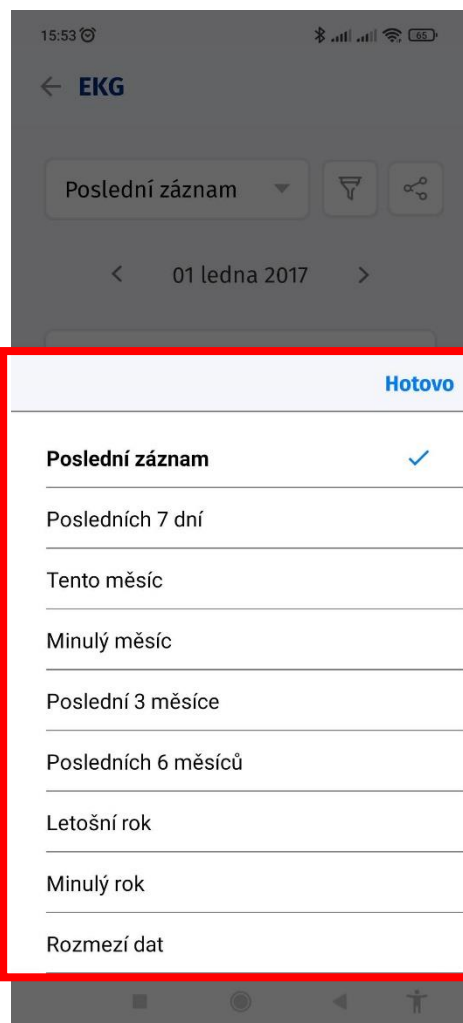


2. Kliknutím vyberte období dat.

#### d) Filtrace hodnot

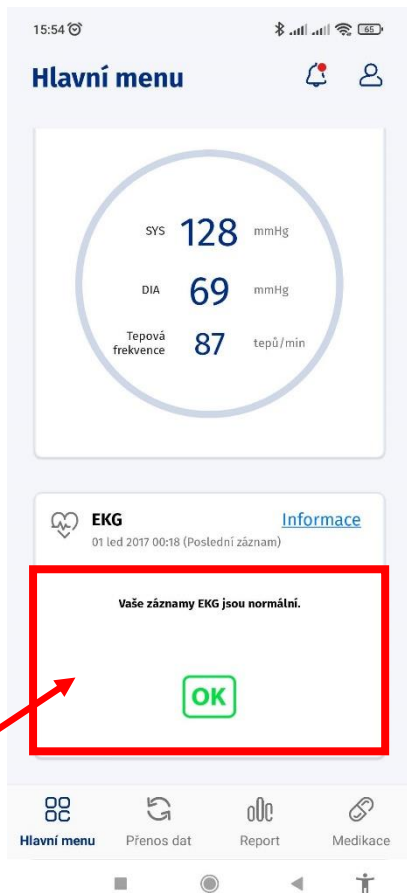

1. Klikněte na záznamy EKG.

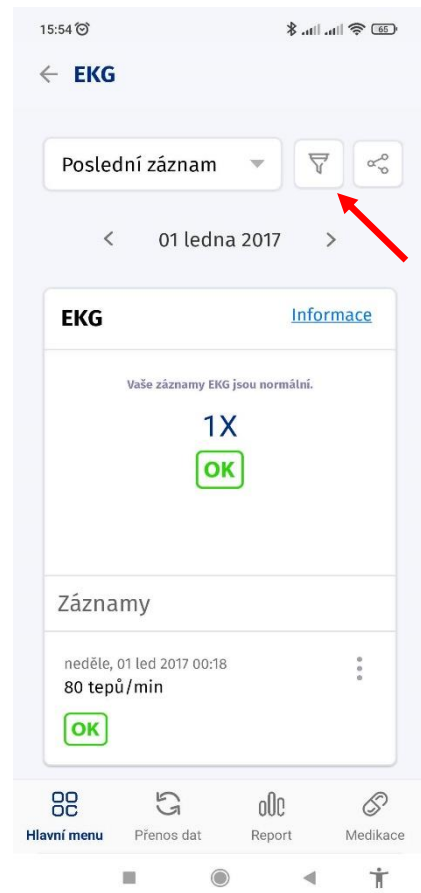


2. Klikněte na ikonu filtru nad záznamy.




3. Kliknutím vyberte filtr. Poté klikněte na „**Hotovo**”.

## e) Úprava hodnot

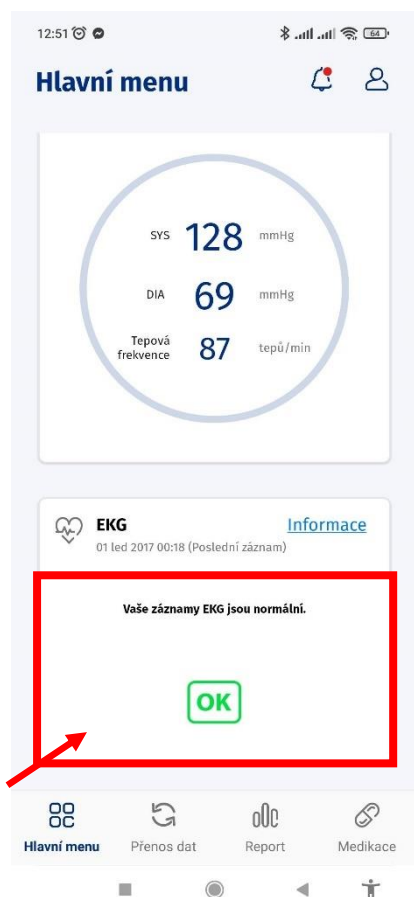

1. Klikněte na záznamy EKG.

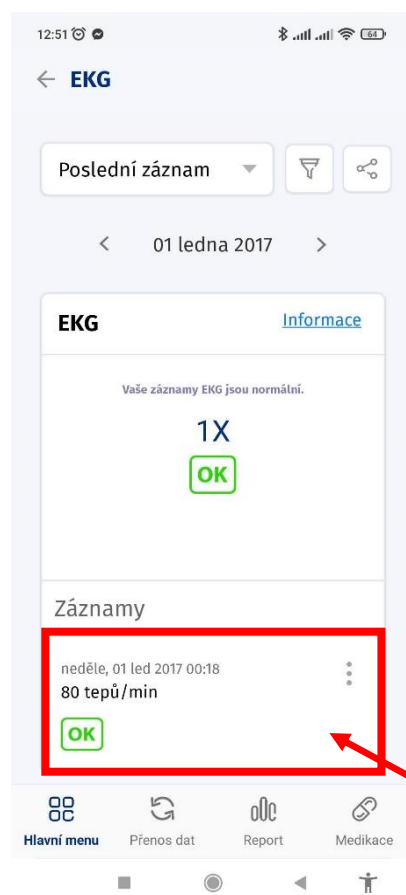

2. Klikněte na záznamy EKG, které si přejete upravit.

12:52

Zpět EKG Uložit

**Metoda EKG**

Levá a pravá ruka

Právý ukazováček a hrudník

**Medikace**

**Nějaké příznaky?**

Bolesti hlavy  Závratě

Poruchy vidění  Ztížené dýchání

Bolest na hrudi

**Komentáře**

3. Zde můžete zvolit metodu EKG, přidat medikaci, symptomy a komentáře.

12:52

Zpět Přidat medikaci Hotovo

Název \*

Dávkování

mg

Typ

Tobolky

Způsob podání

Orálně

Množství Podání

1 Po jídle

nastavení připomínky

4. Pokud si přejete přidat medikaci, vyplňte informace do prázdných

12:52

Zpět Přidat medikaci Hotovo

Množství Podání

1 Po jídle

nastavení připomínky

Ráno Poledne Večer

Začátek \* Konec \*

12.07.2023 12.07.2023

Záznamy o medikaci budou automaticky přidány ke každému měření ve zvoleném časovém období.

Upomínka

+

Komentáře

Sem napište komentář


5. Kromě toho lze nastavit připomínku a přidat komentář. Poté klikněte na „Hotovo“.






6. Klikněte na „Uložit“.


f) Vytvoření sdílených hodnot / hodnot ve formátu pdf

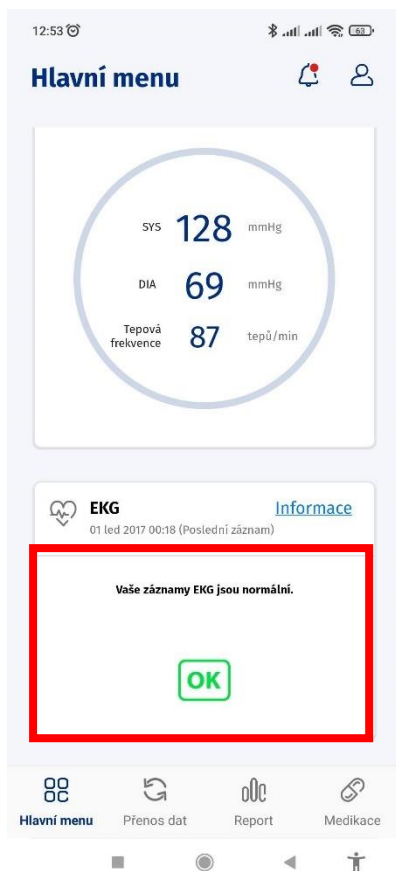


1. Klikněte na záznamy EKG.

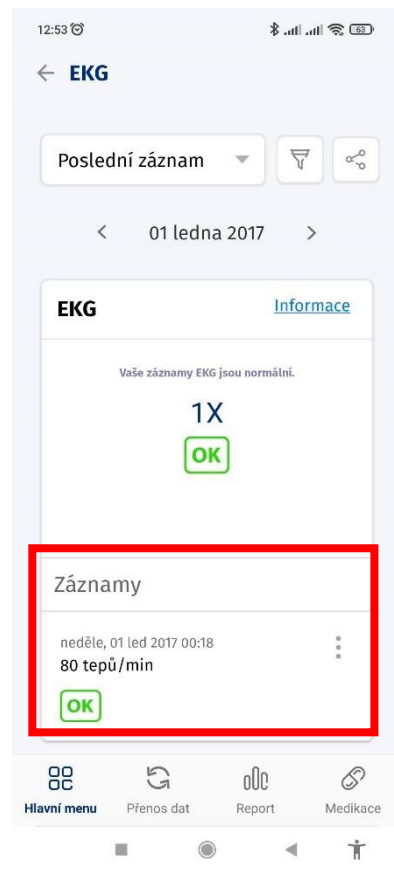

2. Klikněte na záznam, který si přejete sdílet.

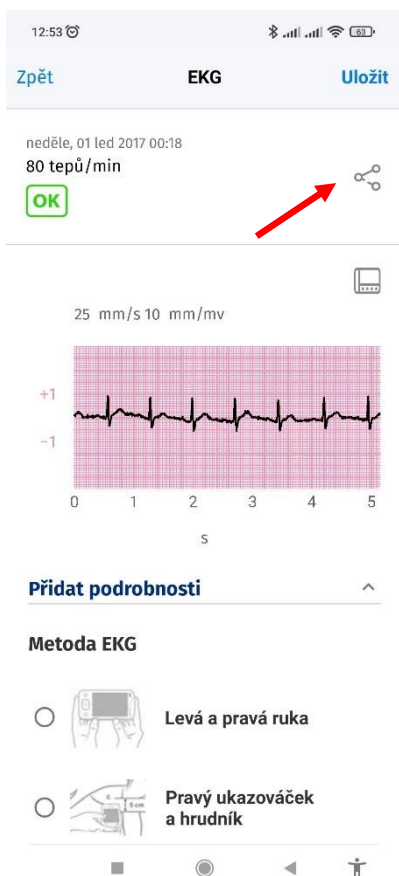

3. Klikněte na ikonu sdílení

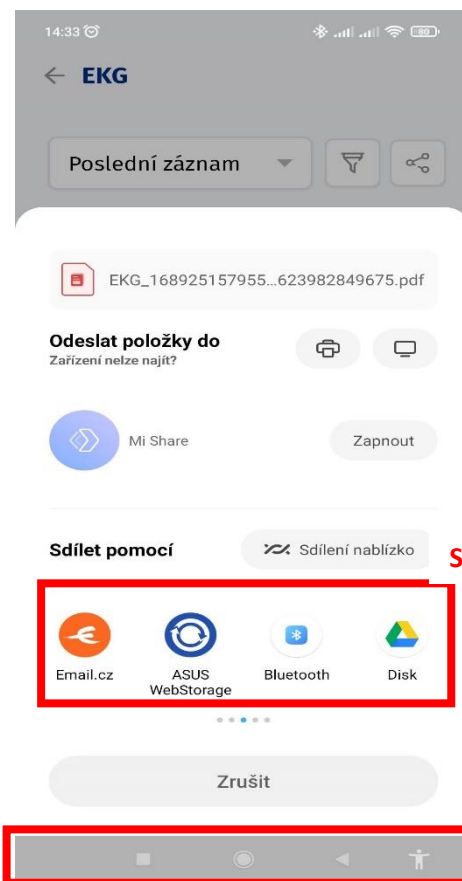


Sdílet s ostatními

Uložení do vlastního zařízení


4. Objeví se vyskakovací okno. Své záznamy můžete sdílet e-mailem kliknutím na „Mail“. Pokud zvolíte vytvoření souboru pdf, uložíte hodnoty do svých dokumentů.

## 11. Report


### a. Vytvoření celkového reportu

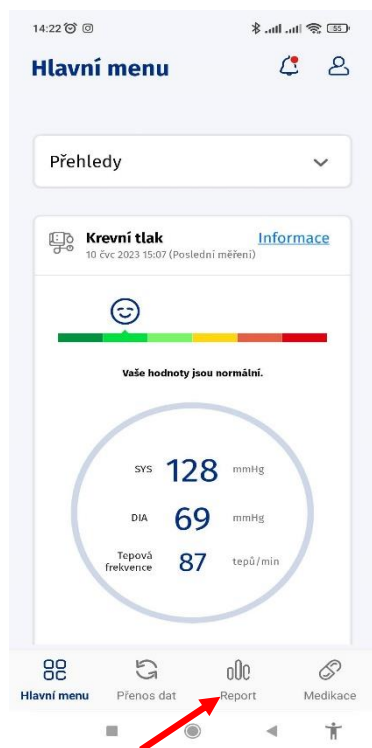


1. Otevřete aplikaci a klikněte na „Zpráva“.

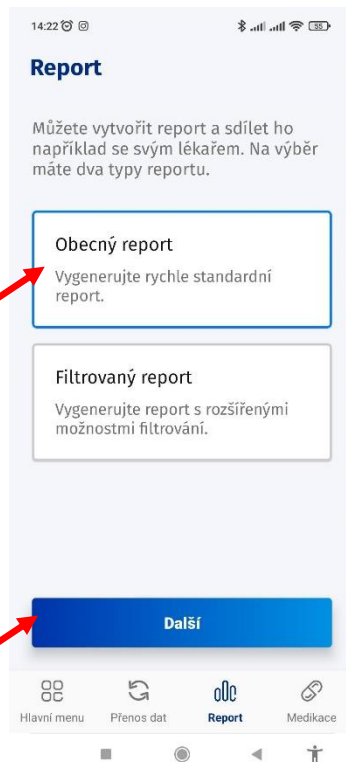


2. Klikněte na „obecný report“.  
Poté klikněte na „Další“.

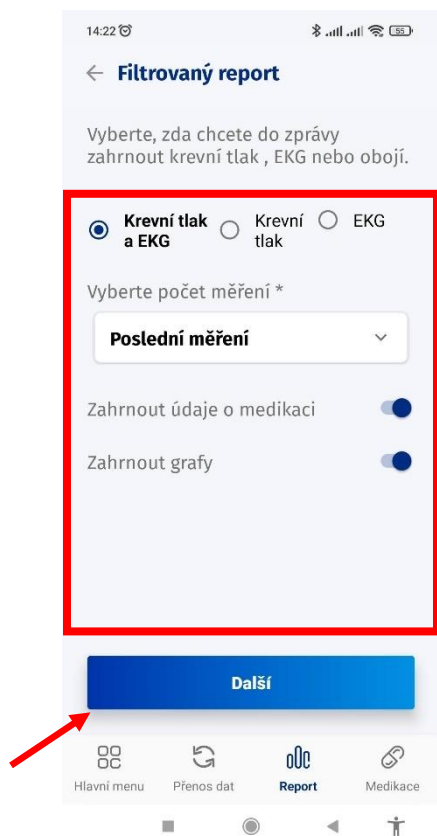

3. Doplňte další informace a klikněte na „**Další**“.

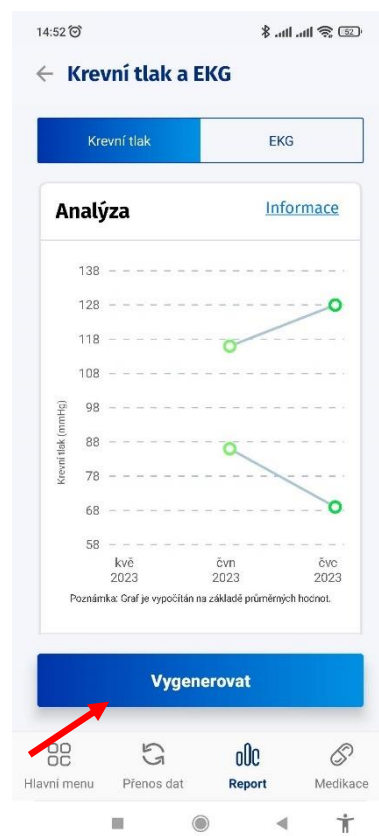

4. Klikněte na „**Vygenerovat**“.

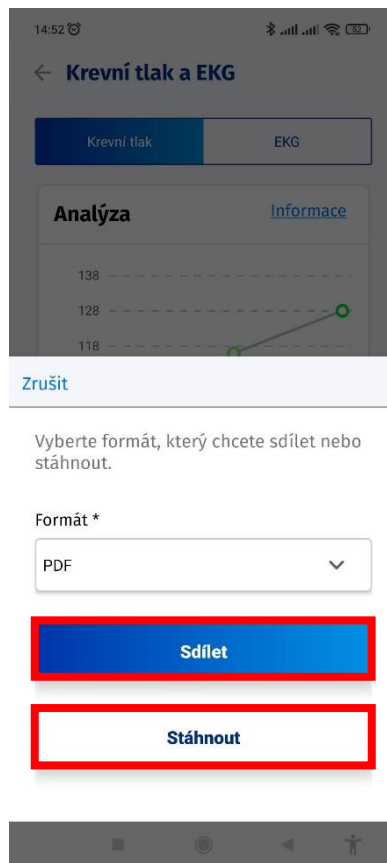

**Sdílet s ostatními**


**Uložení do vlastního zařízení**

5. Objeví se vyskakovací okno. Svoji zprávu můžete sdílet pomocí e-mailu kliknutím na „Mail“. Zprávu si také můžete uložit do


## b. Vytvoření filtrovaného reportu




1. Otevřete aplikaci a klikněte na „**Report**“.

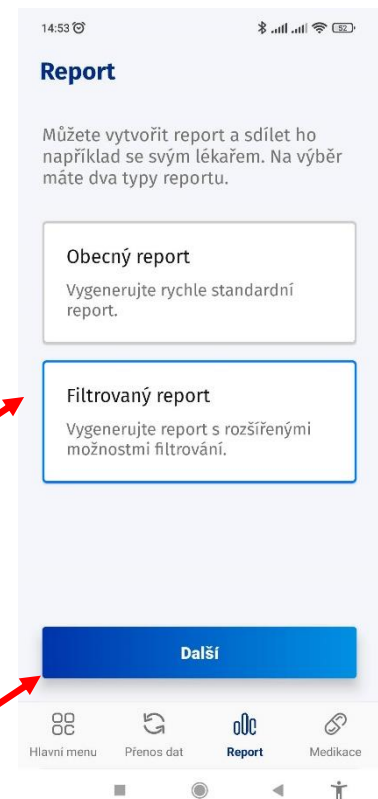

2. Klikněte na „**Filtrovaný report**“.  
Poté klikněte na „**Další**“.

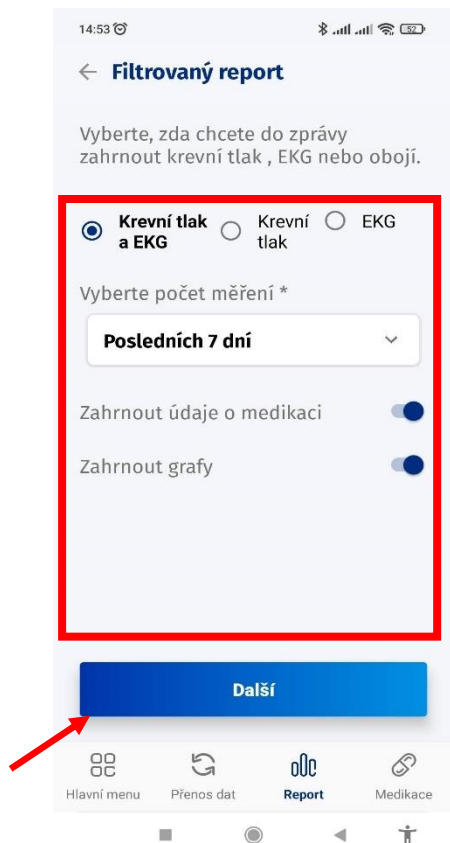

3. Přidejte další informace a klikněte na „Další“.

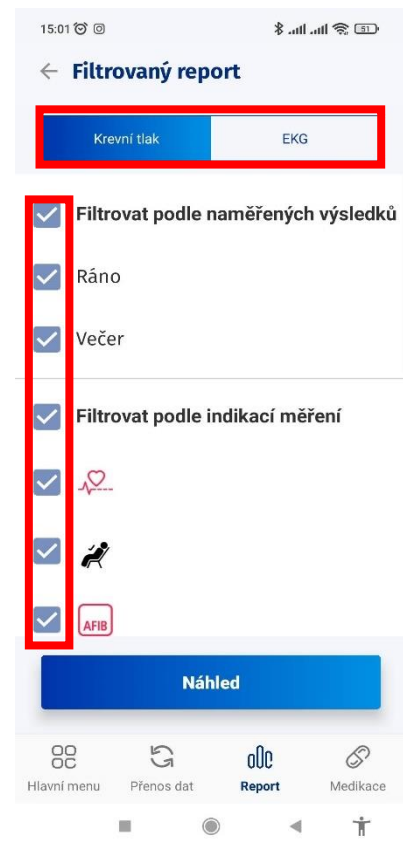


4. Vyfiltrujte informace použité ve zprávě. Kliknutím na políčka odstraníte zaškrtnutí. Nad zaškrťovacími políčky si můžete vybrat mezi hodnotami krevního tlaku a záznamy EKG. Poté klikněte na „Náhled“.






5. Klikněte na „Vygenerovat“.

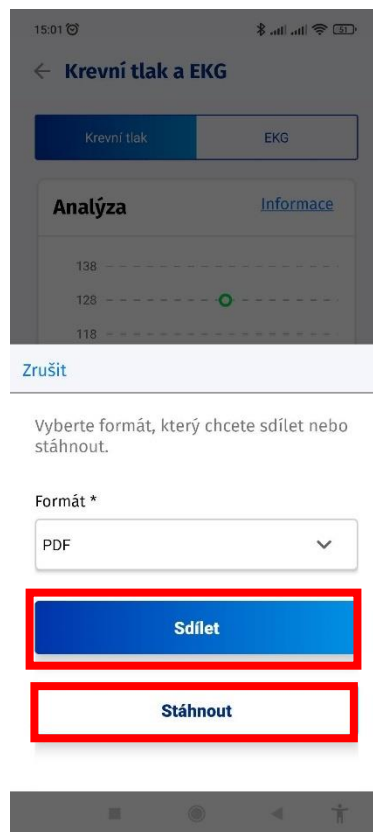

6. Objeví se vyskakovací okno. Svoji zprávu můžete sdílet pomocí e-mailu kliknutím na „Mail“.  
Zprávu si také můžete uložit do svého zařízení.

## 12. Medikace

### a. Přidání medikaci

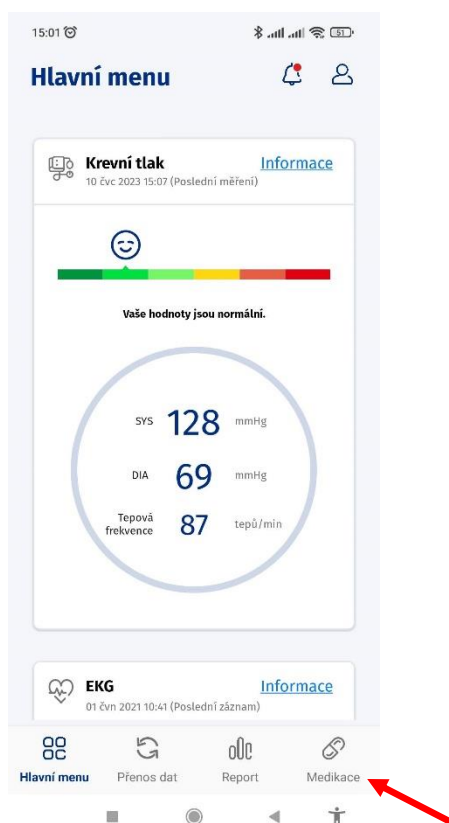

1. Otevřete aplikaci a klikněte na „**Medikace**“.



2. Klikněte na symbol plus v pravém rohu.

15:02

Zpět Přidat medikaci **Hotovo**

Název \*

Dávkování

mg

Typ

Tobolky

Způsob podání

Orálně

Množství Podání

- 1 + Po jídle

Hlavní menu Přenos dat Report **Medikace**

3. Doplňte informace do prázdných políček. Po posunutí dolů můžete nastavit připomínku a přidat komentář. Poté klikněte na „**Hotovo**”.

15:02

**Medikace** +


**ibuprofen**

1 Tobolky | Po jídle


Hlavní menu Přenos dat Report **Medikace**

4. Budete přesměrováni na obrazovku zobrazenou výše.


## b. Smazání medikace medication

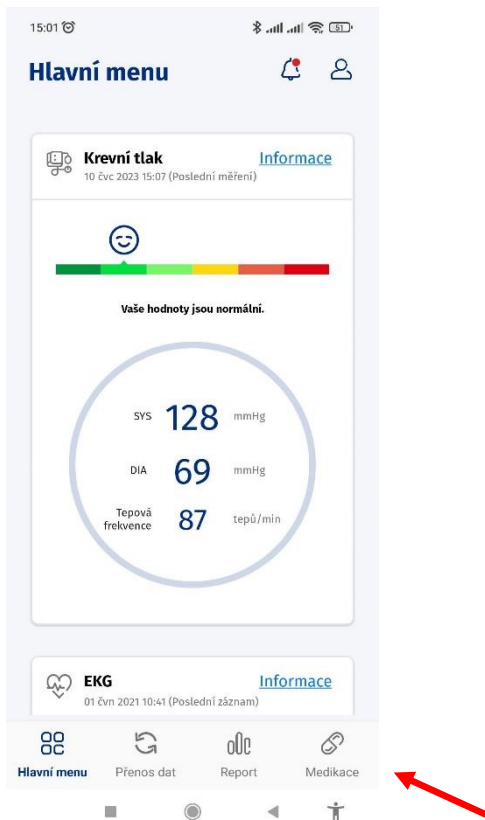


1. Otevřete aplikaci a klikněte na „**Medikace**“.

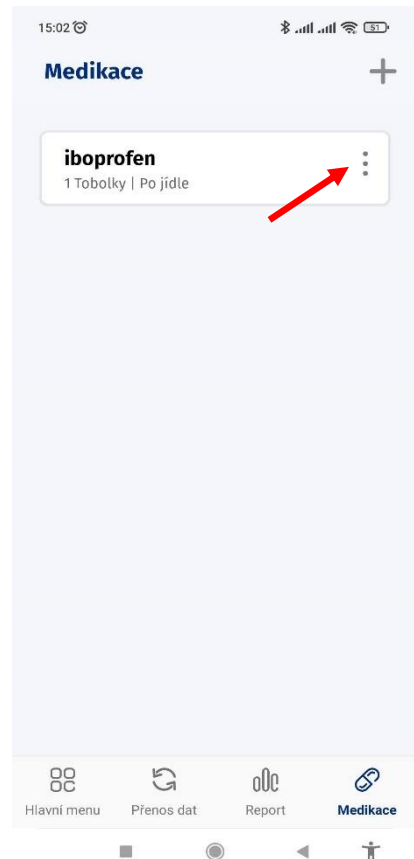

2. Klikněte na tři tečky.

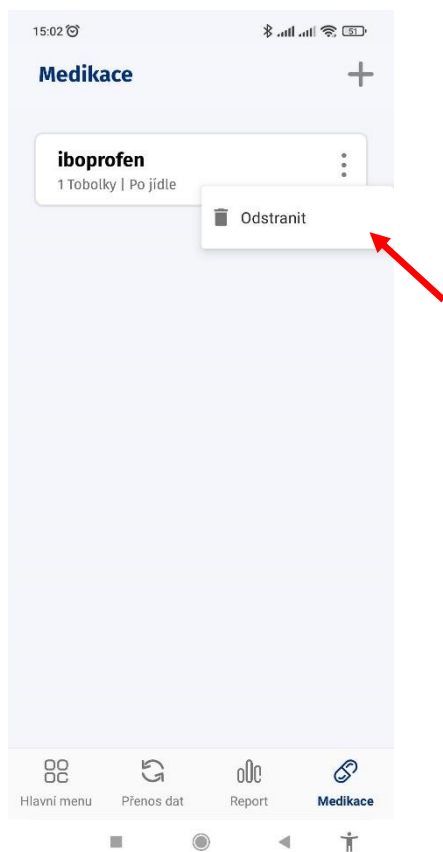

3. Klikněte na „**Odstranit**“.

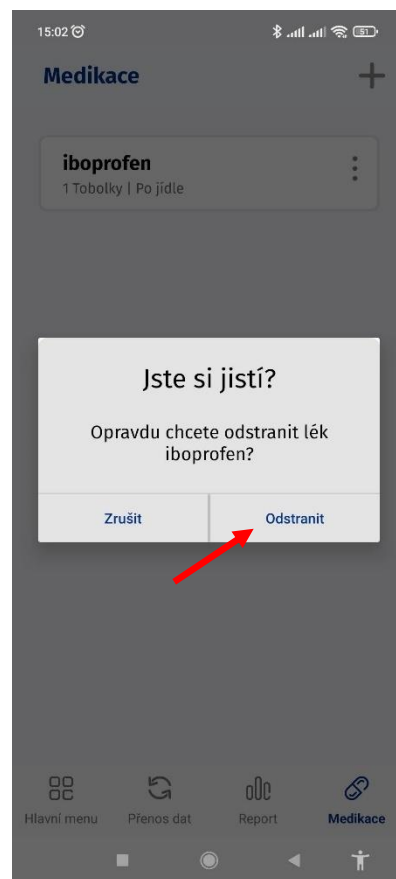


4. Kliknutím na „**Odstranit**“ potvrdíte smazání.

## 13. Změna údajů v profilu



1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky

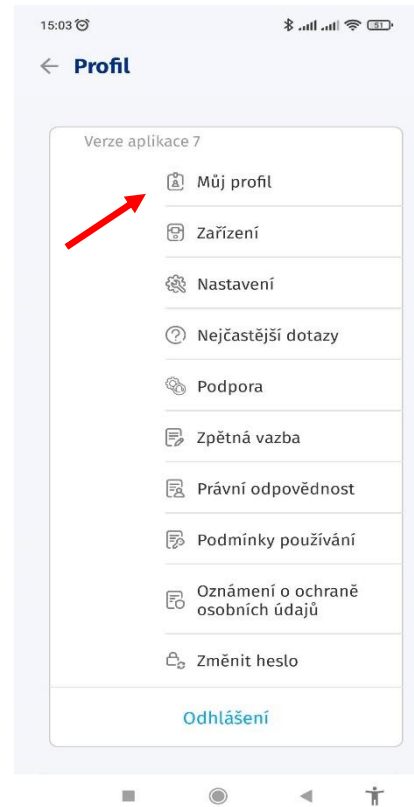

2. Klikněte na „Můj profil“.

15:21

Zpět Můj profil Uložit

Jméno \*  
adam

Příjmení \*  
Person

E-mail \*  
[redacted]

Datum narození \*  
[redacted]

Pohlaví \*  
 Muž  Žena  Ostatní


Výška Hmotnost

3. Změňte vaše údaje a poté klikněte na „Uložit“.

## 14. Změna jazyka




1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

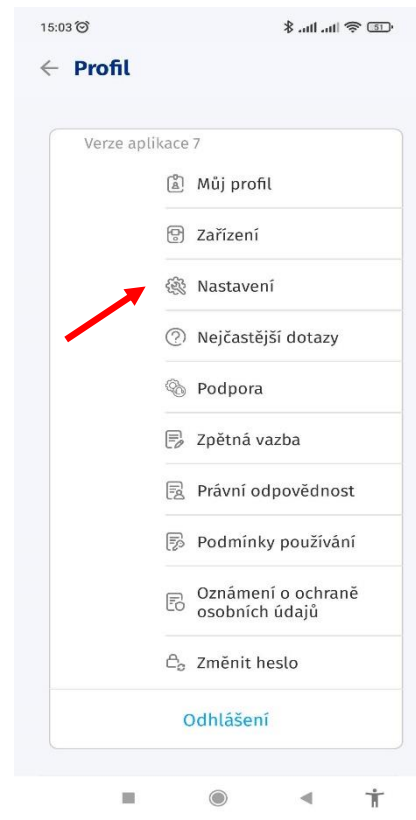


2. Klikněte na „Nastavení“.




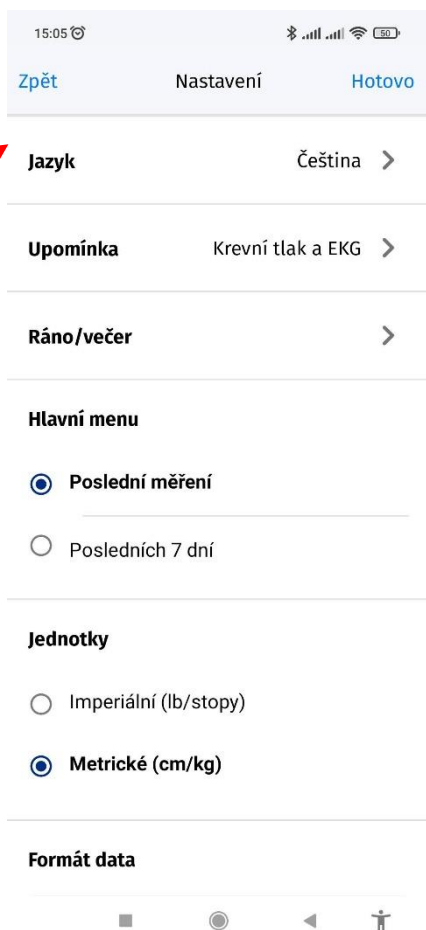


3. Klikněte na „Jazyk“.

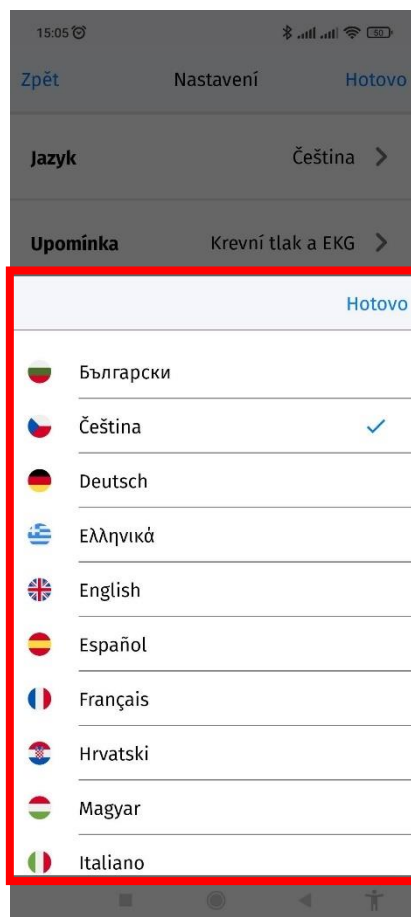

4. Kliknutím vyberte jazyk. Přesunutím dolů můžete vybrat další jazyk.

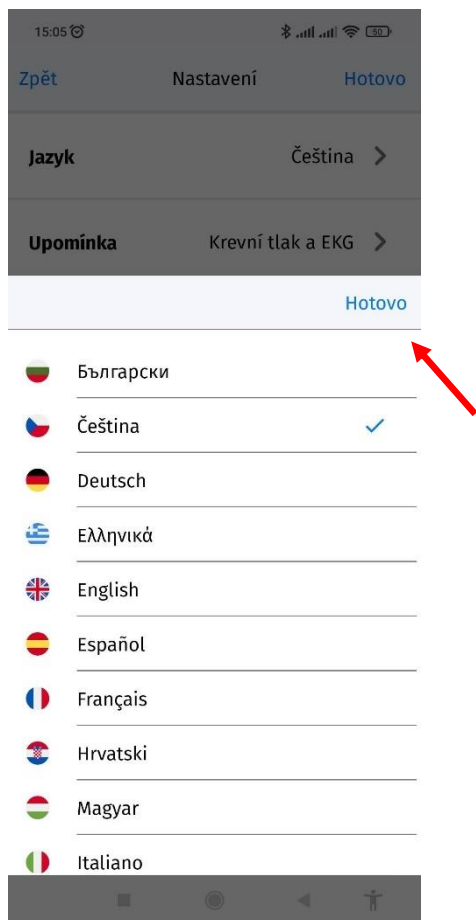



5. Klikněte na **“Hotovo”**.

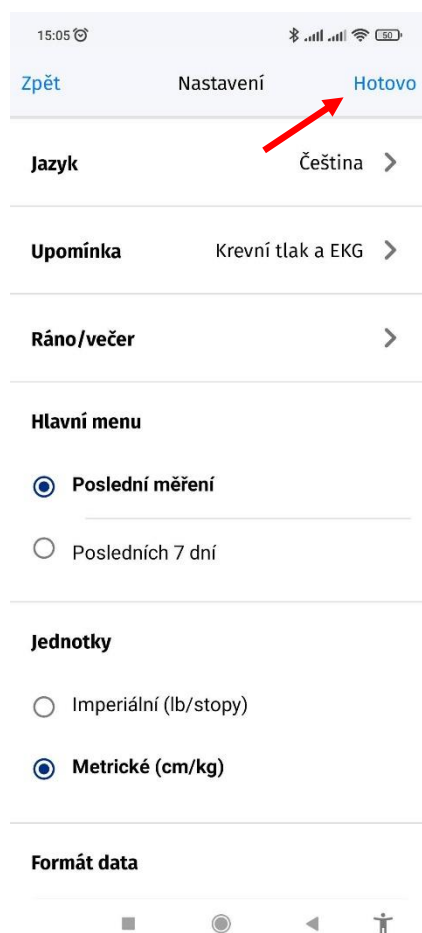

6. Klikněte na **„Hotovo“**.


## 15. Nastavení připomínky

### a. Měření

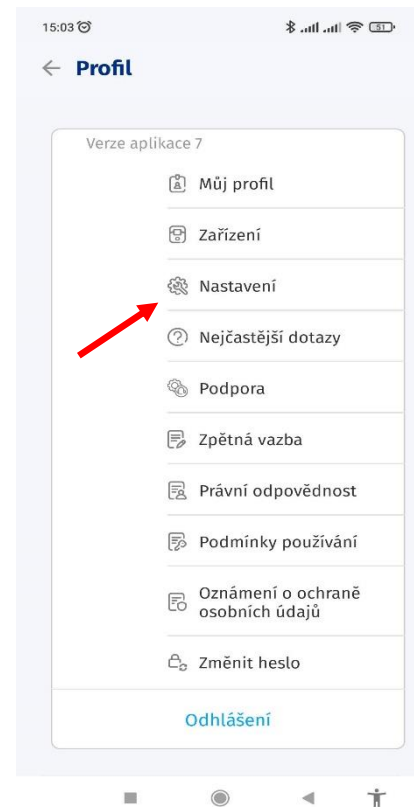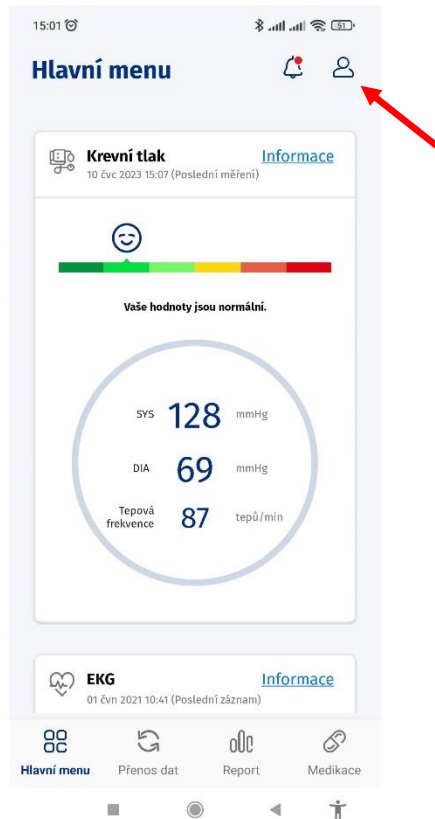


1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.


2. Klikněte na „Nastavení“.

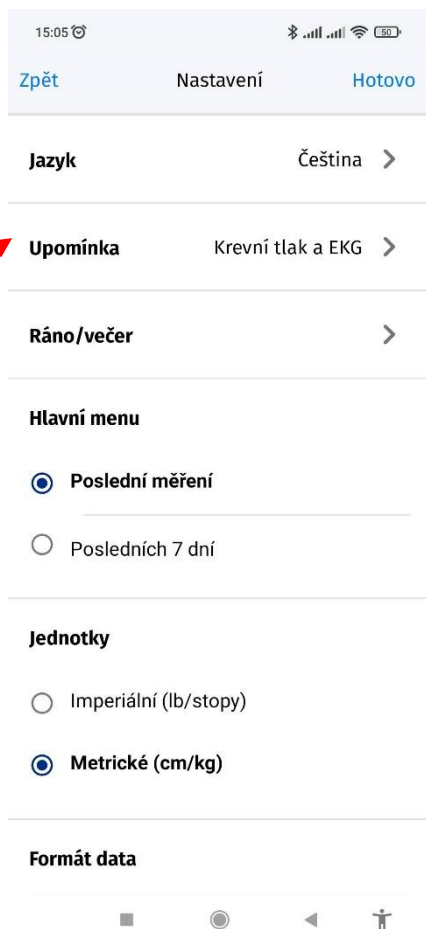

3. Klikněte na **“Upomínka”**.

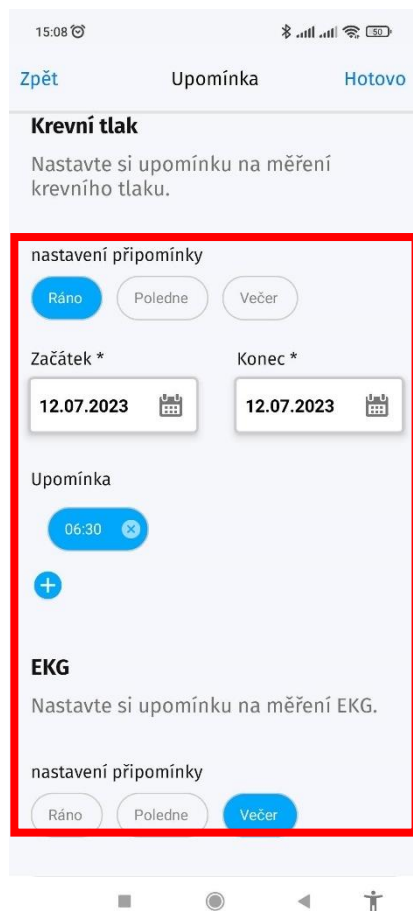


4. Nastavte připomínku výběrem části dne, období a času. Čas zvolíte kliknutím na tlačítko plus.

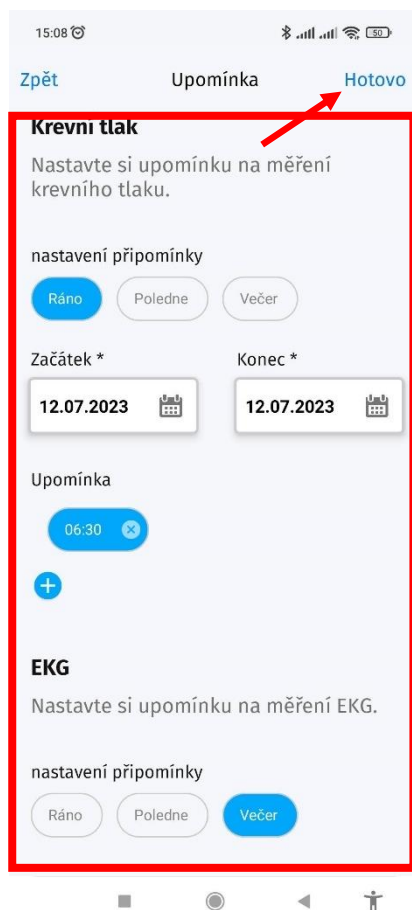


5. Přesunutím dolů můžete zvolit připomínku EKG. Poté klikněte na „Hotovo“.


## b. Medikace

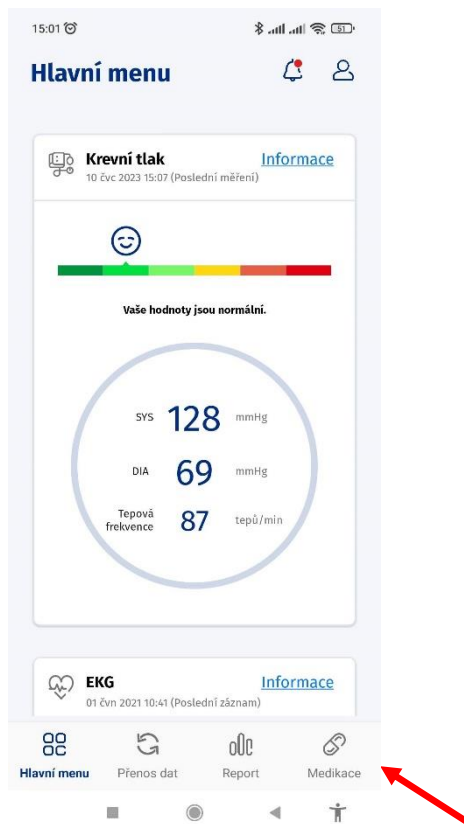

1. Otevřete aplikaci a klikněte na „**Medikace**“.

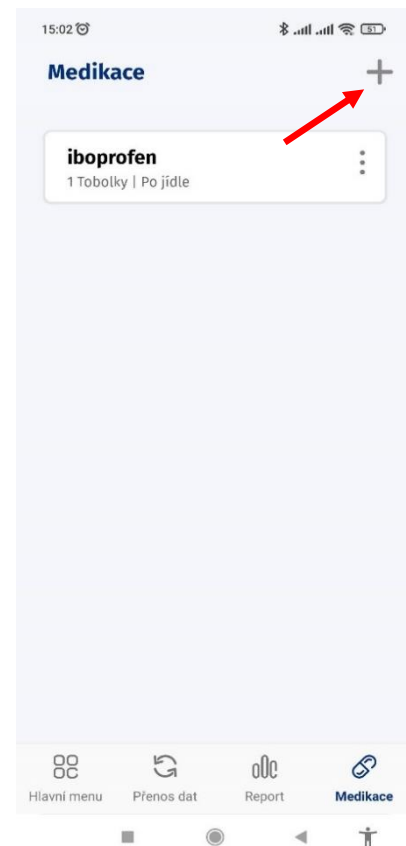


2. Klikněte na medikaci, u které si přejete nastavit připomínku.

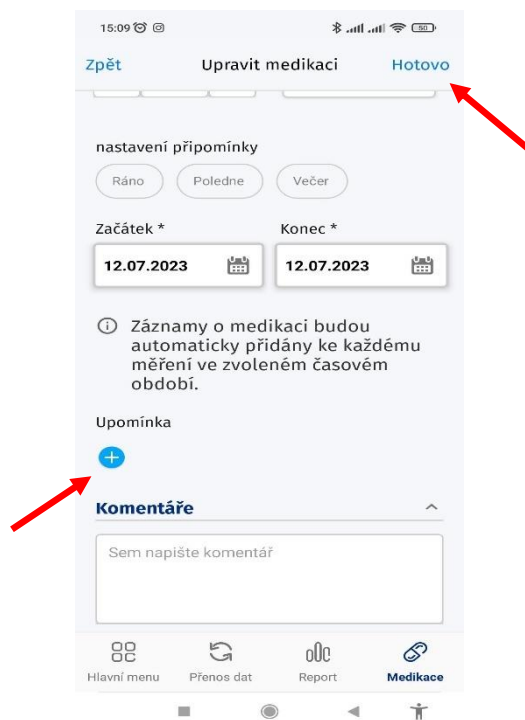


3. Kliknutím na plus nastavíte připomínku. Poté klikněte na „Hotovo“.

## 16. Změna jednotek

### Imperiální / metrické jednotky

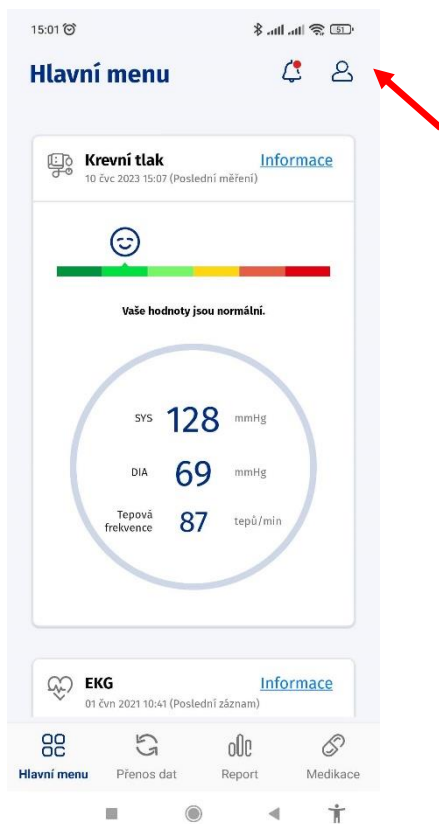


1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

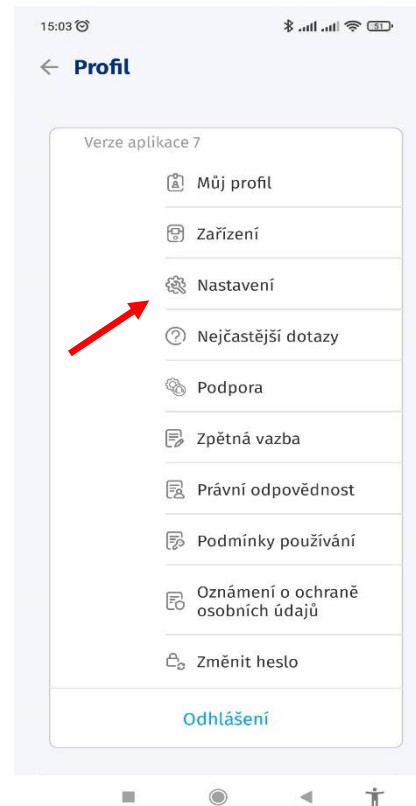


2. Klikněte na „Nastavení“.



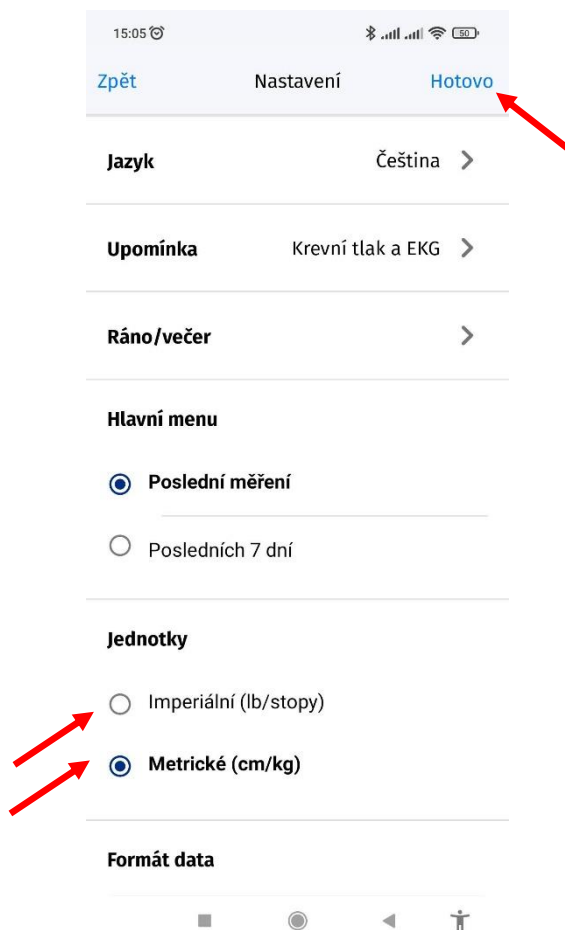


3. Zvolte „**Imperiální**“ nebo „**Metrické**“ jednotky. Poté klikněte na „**Hotovo**“.


## 17. Změna formátu data

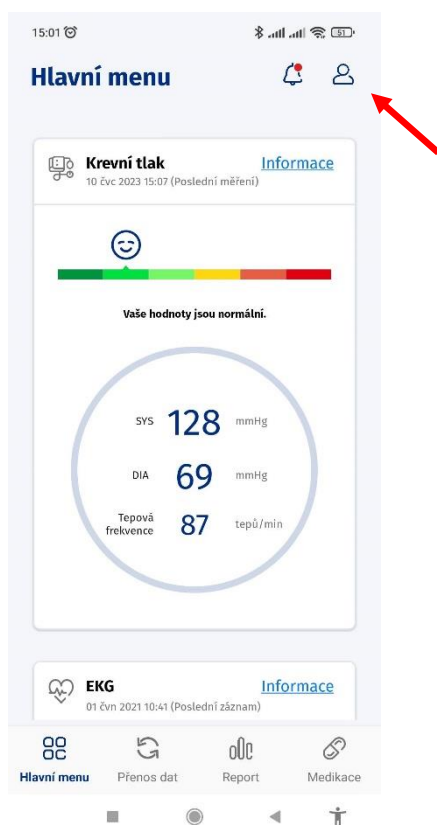

1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.


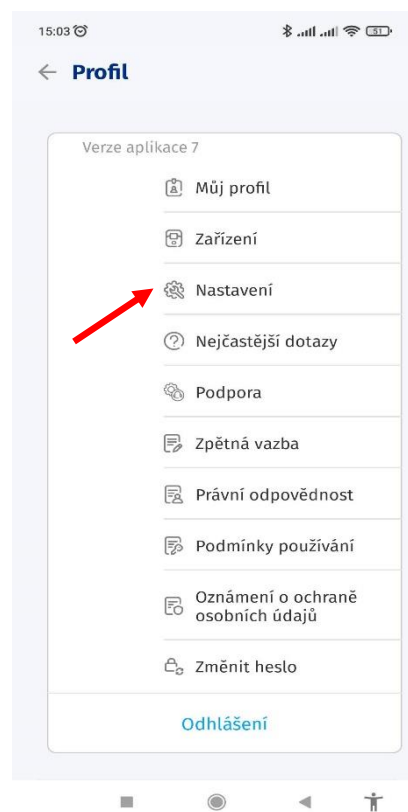


2. Klikněte na „Nastavení“.

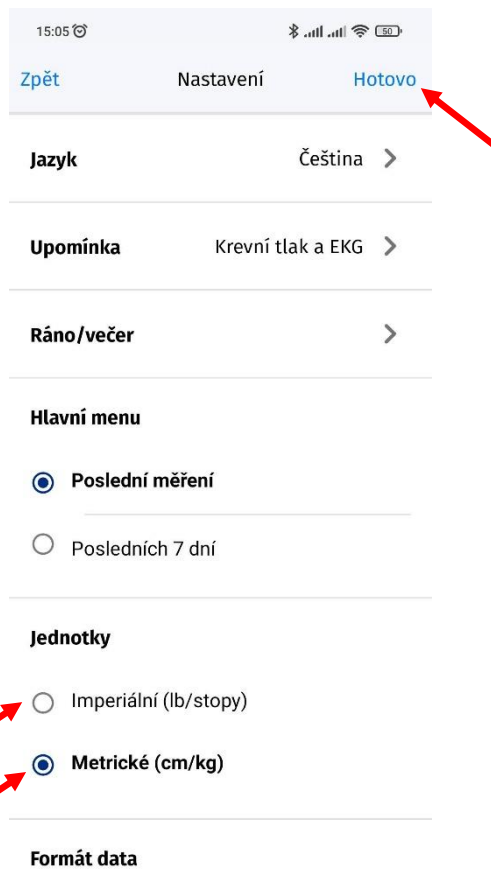


3. Kliknutím vyberte formát data. Poté klikněte na „Hotovo“.

## 18. Nejčastější dotazy

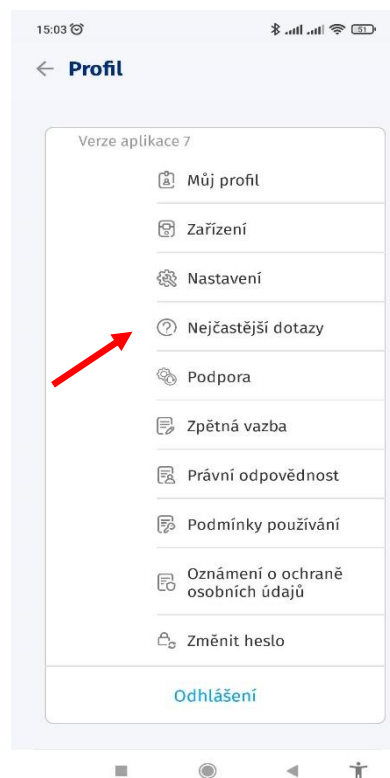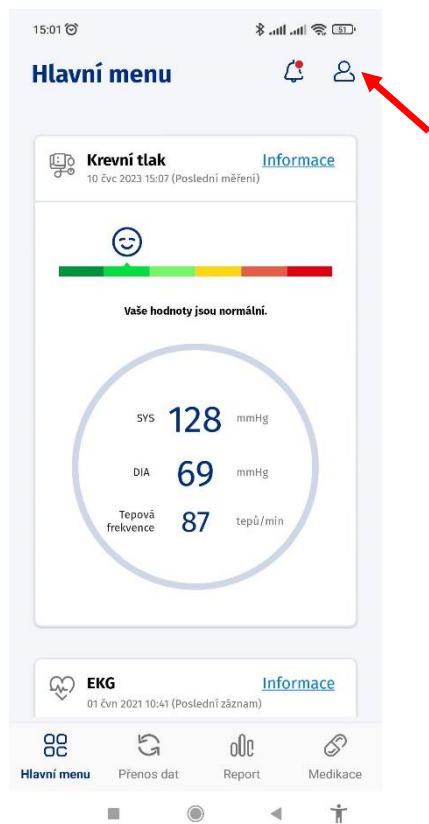


1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

2. Klikněte na „Nejčastější dotazy“.

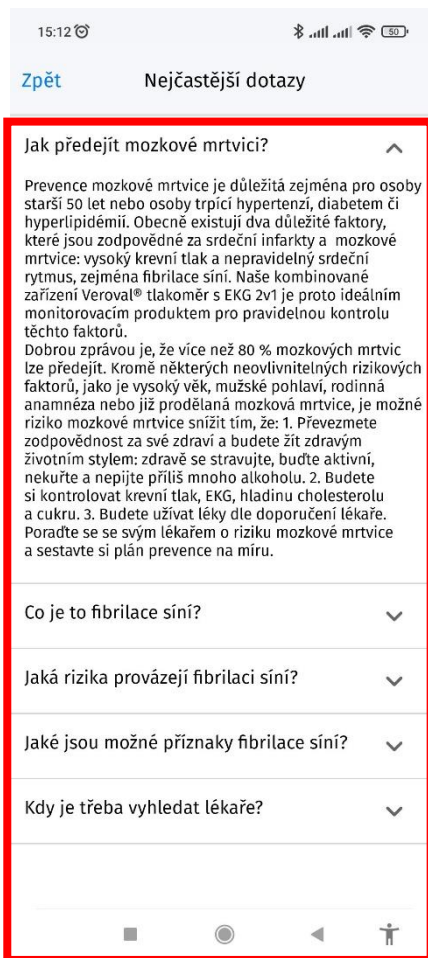


3. Poté, co kliknete na otázku, která vás zajímá, se zobrazí příslušná odpověď.

## 19. Kontaktování podpory

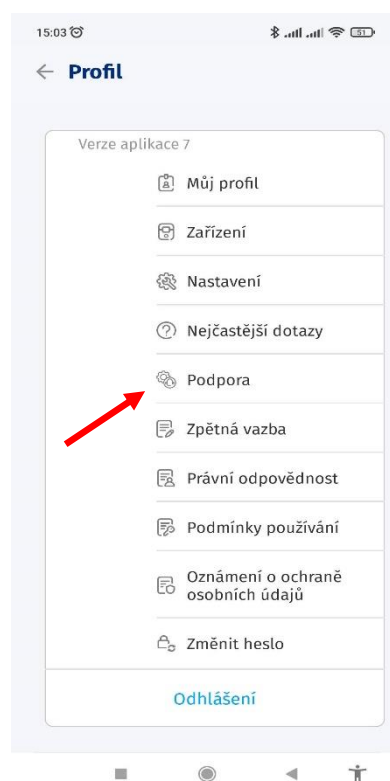

1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

2. Klikněte na „**Podpora**“.

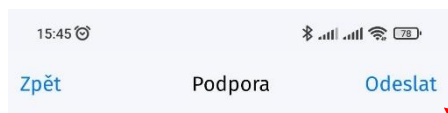


Zadejte e-mailovou adresu spolu s dotazy a popisem problému. Naše podpora vás brzy kontaktuje.


A form with five input fields, all enclosed in a red rectangular border. The fields are: 'Země \*' (Country) with a dropdown arrow; 'Jméno \*' (Name) with the text 'adam'; 'Příjmení \*' (Surname) with the text 'Person'; 'E-mail \*' (Email) with a blacked-out field; and 'Tel.' (Phone) with an empty field. Below the form is an Android-style navigation bar with icons for home, back, and search.

3. Vyplňte prázdná políčka. Přesunutím dolů můžete přidat další informace. Poté klikněte na „Odeslat“.

## 20. Předání zpětné vazby

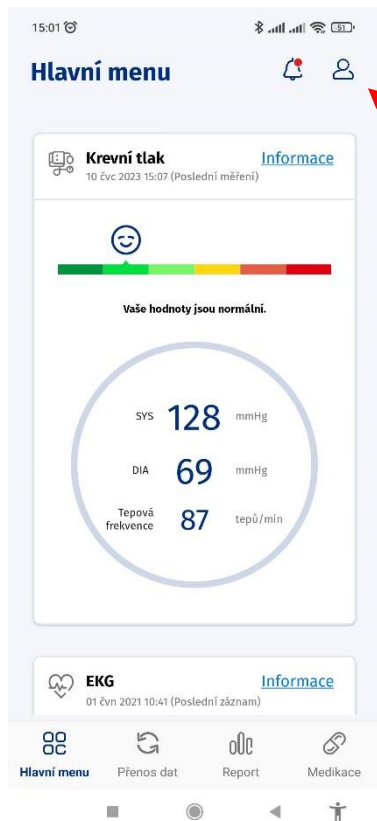


1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

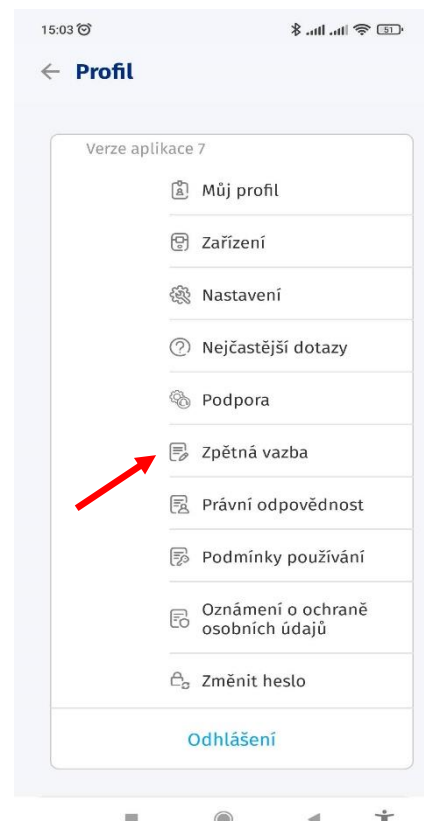


2. Klikněte na „Zpětná vazba“.



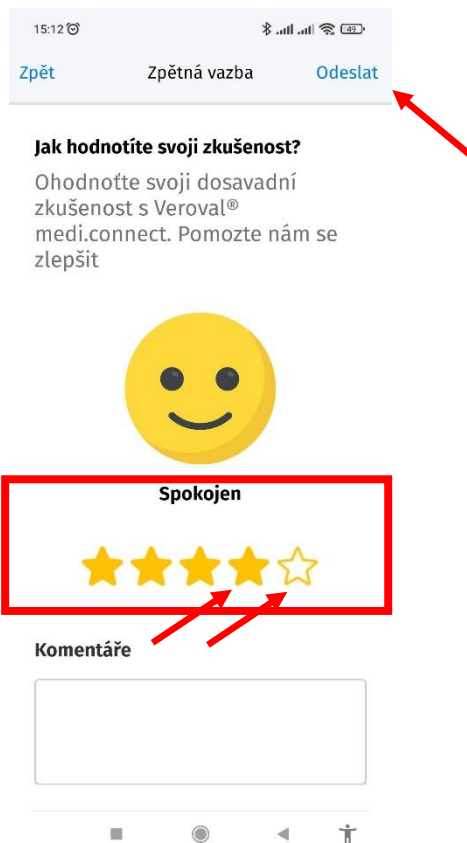


3. Pro hodnocení aplikace vyberte počet hvězdiček, které jí chcete přidělit kliknutím na bílé hvězdičky v nabídce. Kliknutím na vybarvenou hvězdičku, tuto hvězdičku odstraníte. Níže můžete přidat komentář. Poté klikněte na „Odeslat“.

## 21. Odhlášení


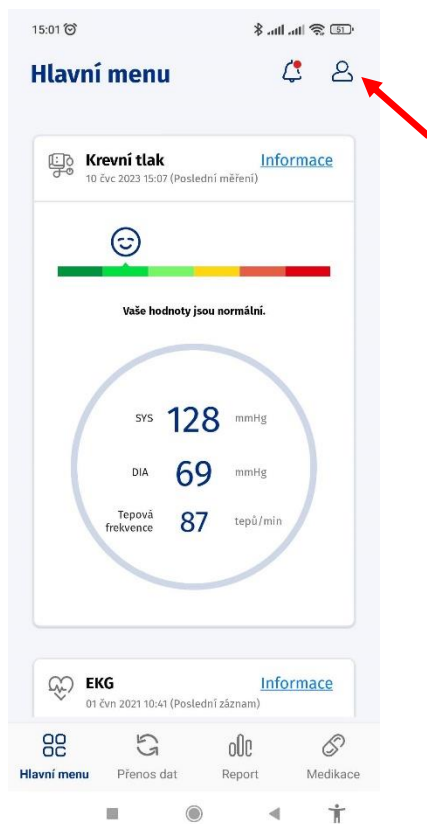


1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

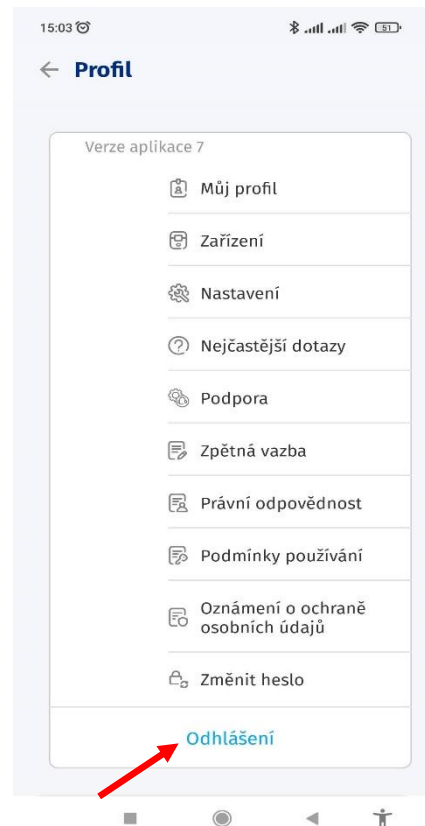

2. Klikněte na „**Odhlášení**“.  
Budete přeměřováni na přihlašovací obrazovku.

## 22. Smazání účtu

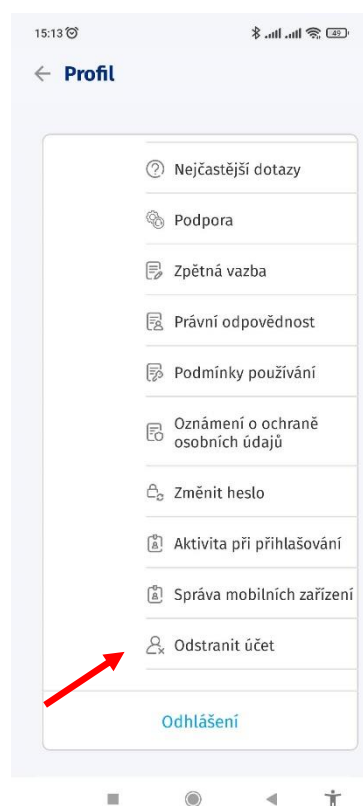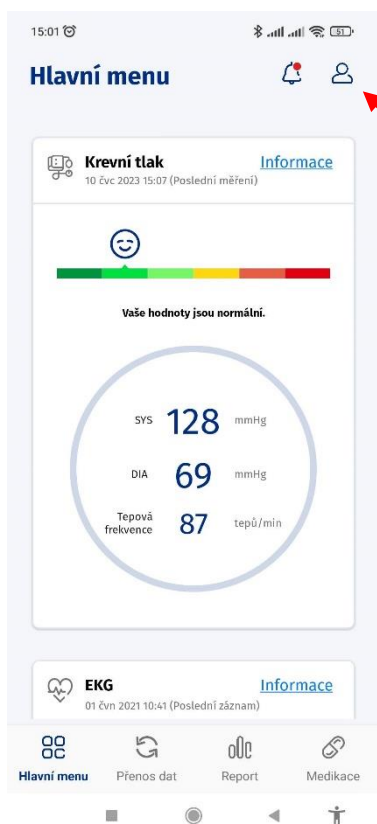


1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

2. Klikněte na „**Odstranit účet**“.





3. Kliknutím přepněte přepínač a poté klikněte na „**Odstranit můj účet**“.

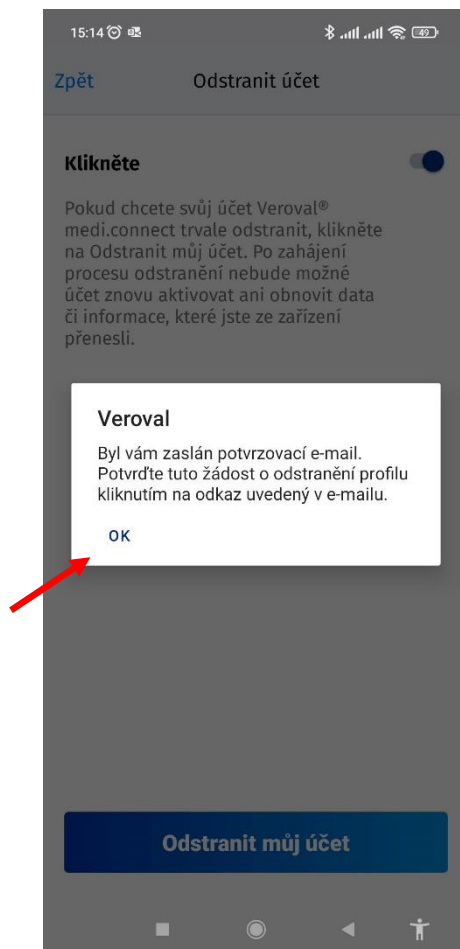

4. Zobrazí se zpráva s oznámením, že vám byl odeslán e-mail. Zprávu zavřete kliknutím na „**OK**“.  
Kliknutím na odkaz v e-mailu proces odstranění účtu dokončíte.

## 23. Podmínky používání

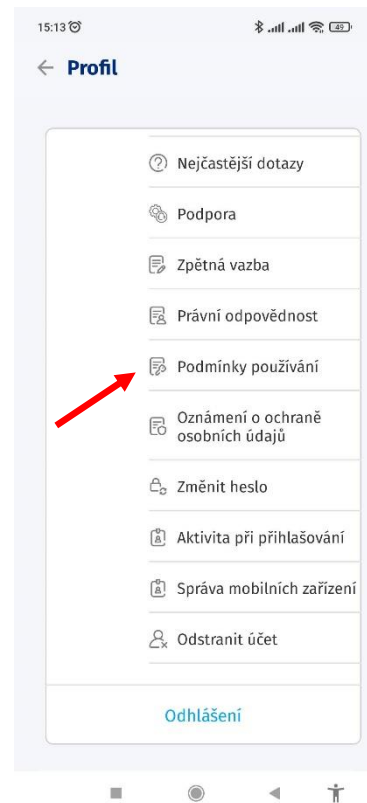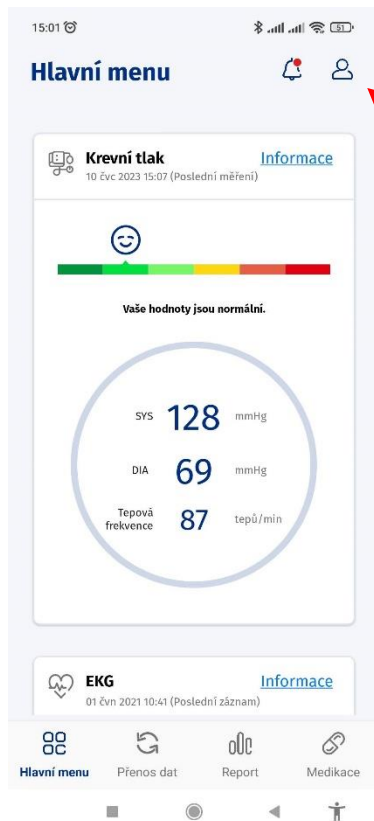

1. Otevřete aplikaci a klikněte na ikonu postavičky.

2. Klikněte na „**Podmínky používání**“. Objeví se obrazovka s podmínkami