

Droge

Hitri test za dokazovanje
6 različnih drog

5 min



Občutljivost
> 96 %



Droge – mamila s stranskimi učinki

Droge so psihoaktivne snovi, ki vplivajo na vedenje in razpoloženje vsakega potrošnika. Z uživanjem ene ali več drog so povezana nezanemarljiva tveganja. Dolgoročno je pričakovati vplive na telesno zdravje ter psihofizične težave zaradi morebitne odvisnosti.

Spoznajte vzrok svojih težav: hitri test za droge

Z hitrim testom lahko v urinskem vzorcu hitro in varno dokažete znake za zlorabo **amfetaminov, benzodiazepinov (pomirjevala), kokaina, marihuane (THC), metadona in opiatov**. Test daje informacije o tem, katere droge so bile zaužite.

Kako zanesljiv je test Veroval®?

Hitri test za droge smo razvili z namenom, da zagotovimo natančnost in zanesljivost moderne diagnostike tudi na domu. Pri testu gre za metodo imunokromatografske analize, ki lahko v urinu dokaže prisotnost drog oz. njenih produktov razgradnje. **Z raziskavo za oceno učinkovitosti je bila dokazana več kot 96 % občutljivost.**

Ali je testiranje zapleteno?

Ne: vse kar potrebujete so čiste roke, ura, lonček in ravna površina. Natančen potek testa najdete na zadnji strani.

Na kaj morate biti pozorni?

Opozorila in pomembni napotki:

- Test je namenjen samo za zunanjo uporabo.
- Ne zaužite sestavnih delov testa.
- Test hranite izven dosega otrok.
- Testa ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali mrazu. Ne zamrzujte. Shranite na suhem mestu pri temperaturi med 4 °C in 30 °C.
- Vlažnost in napačna temperatura lahko neugodno vplivata na rezultate testa.
- Izdelek se lahko uporablja samo do natisnjene roka uporabnosti.
- Če navodil za uporabo ne upoštevate do podrobnosti, so lahko rezultati testa napačni.
- Če je embalaža poškodovana, testa ne uporabljajte. Ne uporabljajte poškodovanih komponent testa.
- V redkih primerih lahko nastopijo lažno pozitivni rezultati² (npr. ob zaužitju določenih živil/prehranskih dopolnil).
- Vse komponente testa so namenjene samo za uporabo pri tem testu. Test je namenjen samo za enkratno uporabo!
- Po odprtju zaščitne folije morate test zaščiti pred nečistočami in ga izvesti nemudoma oz. v roku ene ure.
- Slab vid, barvna slepota ali nezadostna osvetlitev lahko ovirajo pravilno oceno rezultata testa.
- Urinski vzorci so lahko kužni. Uporabljene teste je zato potrebno odstraniti med gospodinjske odpadke in si po uporabi temeljito oprati roke.

Podatki o delovanju:

Hitri test za droge lahko paralelno dokaže razrede substanc navedene v tabeli spodaj. Test je pri tem za zastopnika kalibriran z navedeno občutljivostjo (vrednost Cut-off):

| Test | Kratica | Kalibrator | Vrednost Cut-off (ng/ml) | Dokazljivost v urinu od zadnjega zaužitja ¹ |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Amfetamin | AMP | D-amfetamin | 1.000 | 1 do 3 dni |
| Benzodiazepin | BZO | Oksazepam | 300 | Občasno uživanje: do 3 dni Redno uživanje: do 6 tednov |
| Kokain | COC | Benzoilekgonin | 300 | Kokain je dokazljiv samo nekaj ur, produkt razgradnje 2 do 3 dni |
| Marihuana | THC | 11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH | 50 | Občasno uživanje: 2 do 4 dni Trajno uživanje: 2 do 6 tednov |
| Metadon | MET | Metadon | 300 | 2 do 3 dni |
| Opiati | OPI | Morfij | 300 | Do 8 ur |

Hitri test za droge dodatno k substancam kalibratorjev dokazuje tudi druge sorodne derivate ali metabolite.

¹Prosimo upoštevajte, da gre za grobe orientacijske vrednosti. Pri dokazljivosti drog v urinu igrajo pomembno vlogo številni individualni dejavniki.

Pomembno obvestilo:

Pozitivne in nejasne rezultate je potrebno potrditi z nadaljnjo analitično metodo.

²Lažni pozitivni rezultat = napačno je prikazan pozitiven rezultat testa, čeprav je rezultat dejansko negativen.

www.veroval.si

Materiali

- 1 testna kasetna v zaščitni foliji
- 1 navodila za uporabo

Razlaga simbolov

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Upoštevajte navodila za uporabo | Hranite na suhem mestu pri temperaturi od +4 °C do +30 °C. | Uporabno do (glejte odtis na embalaži) |
| Vsebina zadostuje za 1 testiranje | | Samo za enkratno uporabo |
| Proizvajalec | | Oznaka kompleta (glejte odtis na embalaži) |
| Reakcijski čas v testni kaseti | | Hitri test za samotestiranje |

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg

Distribucija:
SI – PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o.
Letališka cesta 3c
1000 Ljubljana
info@si.hartmann.info

Veroval® TEST ZA SAMOTESTIRANJE

HARTMANN

Droge

Hitri test za samotestiranje

Test izvedete na spodnji način:

1



Priprava

Testno kaseto v zaščitni foliji pred začetkom testa ogrejte na sobno temperaturo (15 °C–27 °C). Test za droge vzemite iz zaščitne folije.

2



- V lonček zberite svež urin. Če je urin moten, počakajte da se urin zbistri.
- Odstranite zaščitni pokrov in test za droge za najmanj 10 sekund do oznake potopite v urin. Prepričajte se, da je testna kaseto potopljena samo do spodnjega roba.
- Pazite na to, da se ne boste dotaknili ocenjevalnega okenca in da nanj ne boste nanесли urina.

3



- Pokrov ponovno namestite na testno kaseto in jo položite na ravno površino. Ne dotikajte se testne kasete in je ne premikajte. Počakajte, da se v reakcijskem polju prikažejo barvne črte.




4

- Rezultat odčitajte po pribl. 5 minutah, vendar ne po več kot 10 minutah.
- Test za droge mora biti ocenjen pri dobrih svetlobnih razmerah, da lahko prepoznate tudi šibke barvne črte.

Za oceno rezultata najprej preverite, ali je v reakcijskem polju (C) vsakič vidna črta. Ni pomembno, ali je kontrolna črta poudarjena ali šibka. Vsak testni trak je potrebno ovrednotiti posamično.

Negativen rezultat

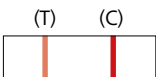

Pri negativnem rezultatu, torej **urinskem vzorcu brez prisotnosti drog**, se v reakcijskih poljih prikažejo **svetlo do temno rdeče testne črte (T)** in **svetlo do temno rdeče kontrolne črte (C)**.

Koncentracija teh specifičnih drog (ali njihovih derivatov) v vzorcu je pod mejno vrednostjo.


Pozitiven rezultat



Pri **pozitivnem rezultatu** se v reakcijskih poljih **ne prikažejo testne črte (T)** in samo **svetlo do temno rdeče kontrolne črte (C)**.

Koncentracija teh specifičnih drog (ali njihovih derivatov) v vzorcu je nad mejno vrednostjo. Sklepanja o višini koncentracije in s tem o resnosti uživanja niso možna.

Neveljaven rezultat

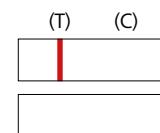

Če so v reakcijskem polju vidne **samo testne črte (T)**, **brez kontrolnih črt (C)** ali **v njem ni nobenih črt**, je **test neveljaven**.

Preverite, ali ste natančno izvedli vse točke v navodilih za uporabo. Izvedite nov test z novim urinskim vzorcem.

Napotki in omejitve

- Hitri test ni medicinski pripomoček in ga zato ni dovoljeno uporabljati za diagnostične namene.
- Test je pozitiven samo, če dejansko ni vidna **nobena testna črta (T)**.
- Na test lahko vplivajo namerno uporabljene primesi. V primeru predvidenega ponarejanja je potrebno test ponoviti z novim urinskim vzorcem.
- Test za samotestiranje ne razlikuje med prepovedanimi drogami in podobnimi zdravili na recept.
- Čeprav lahko vpliv na test izključi široka paleta snovi, ni mogoče izključiti, da rezultata testa ne bi izkrivile druge substance ter tehnične napake in napake povezane s postopkom.