



Veroval®

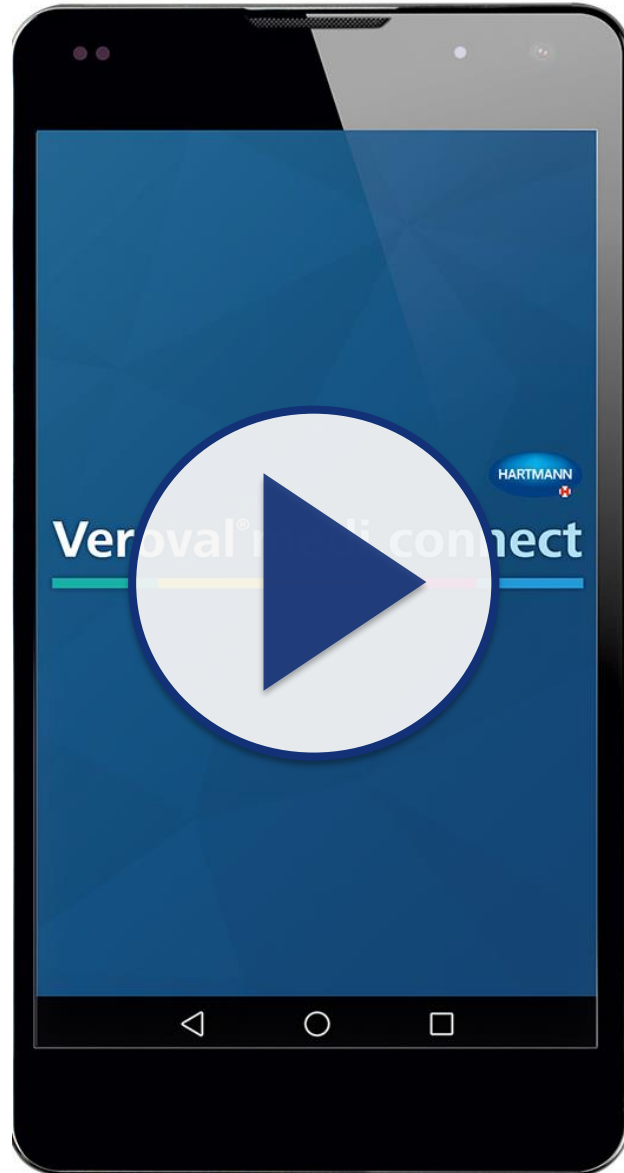

Veroval®

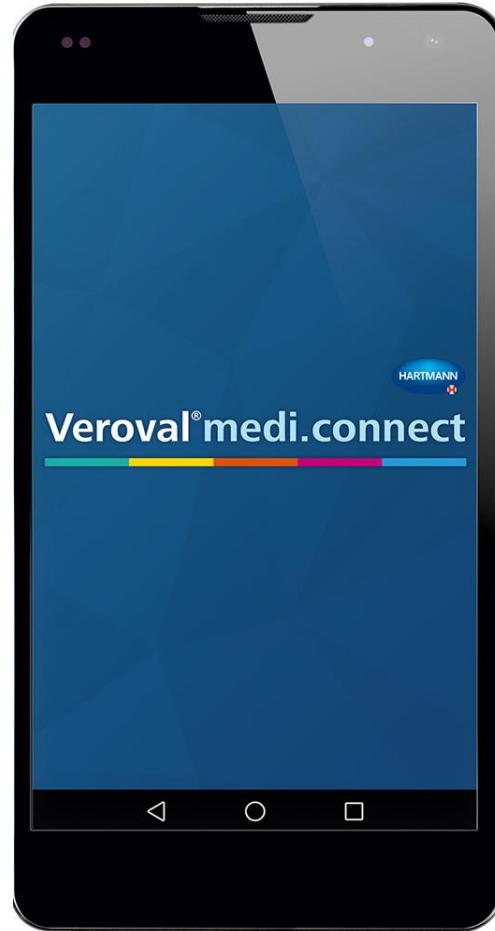


Il contenuto di questo video può anche essere scaricato in formato pdf.

Veroval®




In questo breve video viene spiegato come i dati del vostro dispositivo Veroval® braccialetto intelligente...

Veroval®

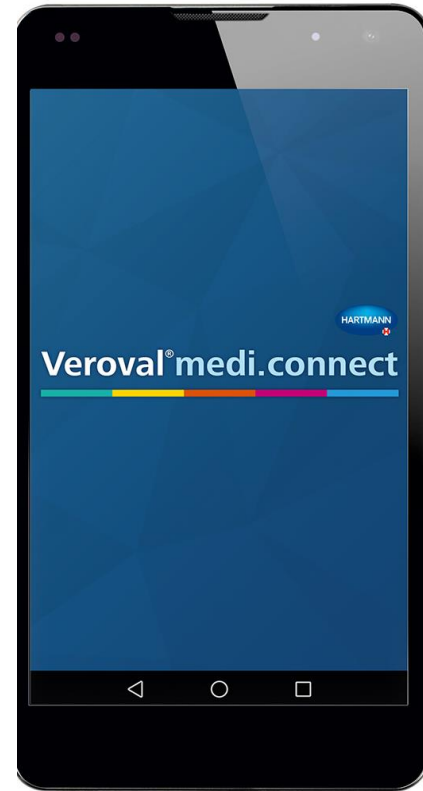


...possono essere trasferiti sull'App veroval medi.connect.

Veroval®

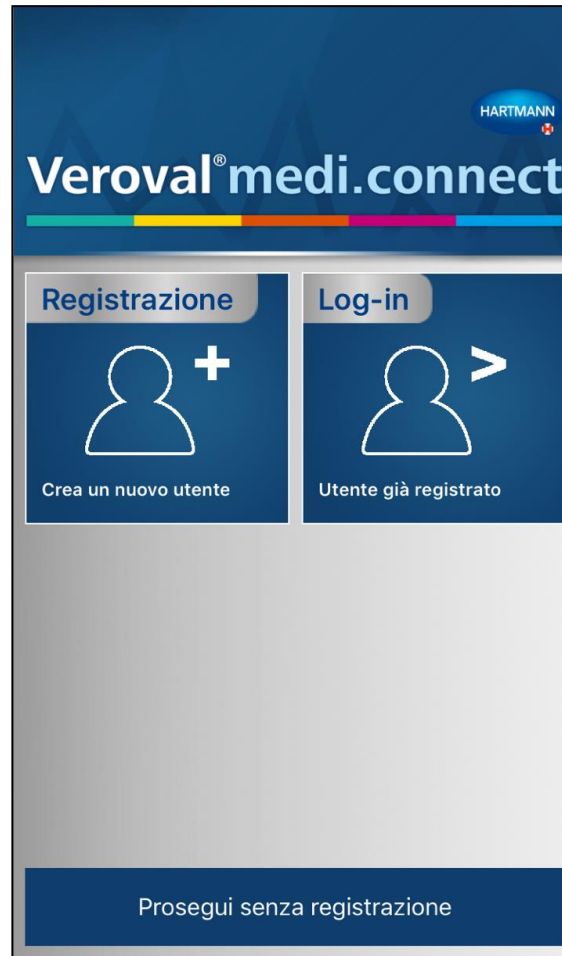


Per prima cosa occorre aprire l'app Veroval Medi.connect, dopo averla scaricata sullo smartphone, e aprire l'account.


Veroval®

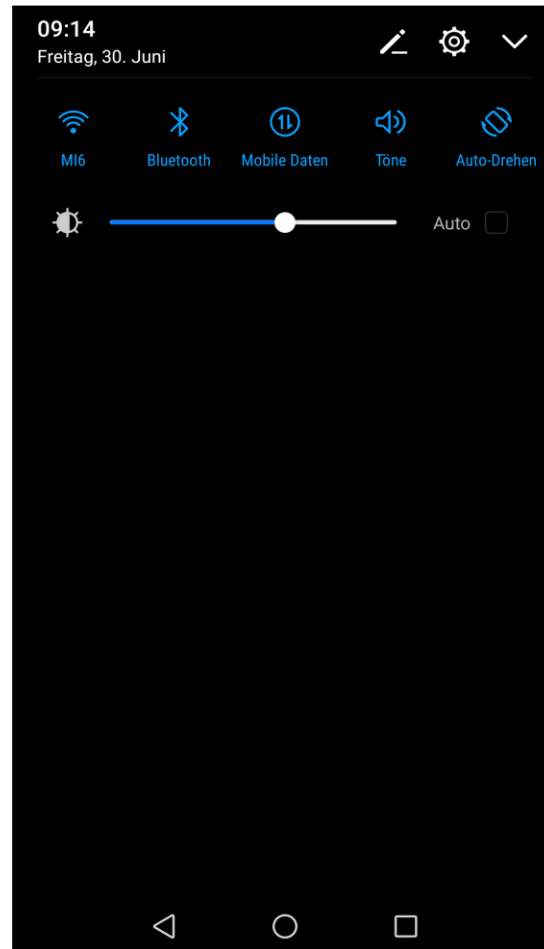


Assicurarsi che il Bluetooth sullo smartphone sia abilitato.

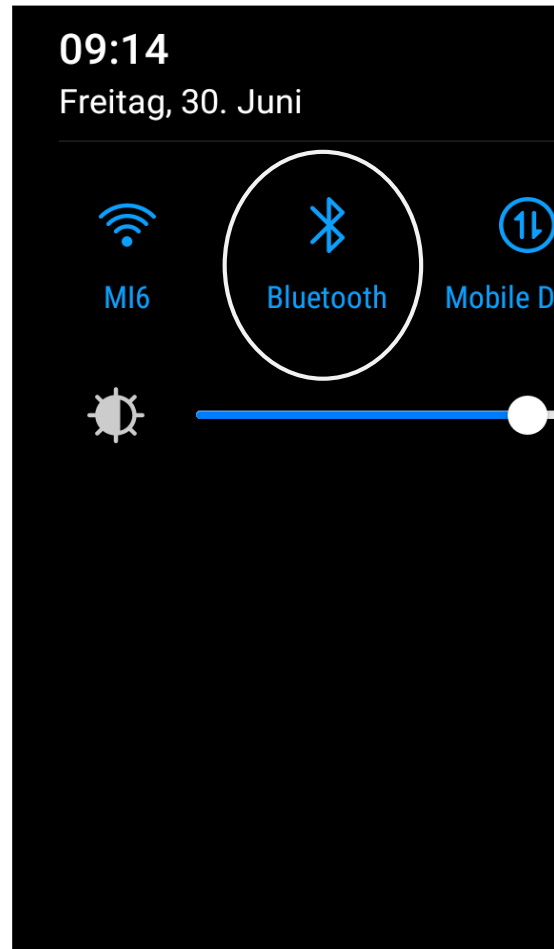

Assicurarsi che il Bluetooth sullo smartphone sia abilitato.

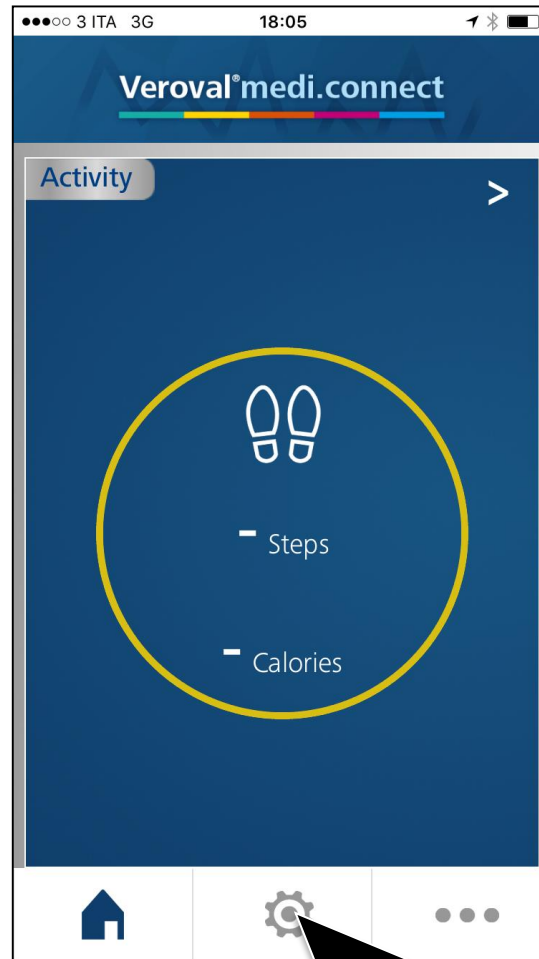


Ora cliccare sul tasto «impostazioni» in basso al centro...

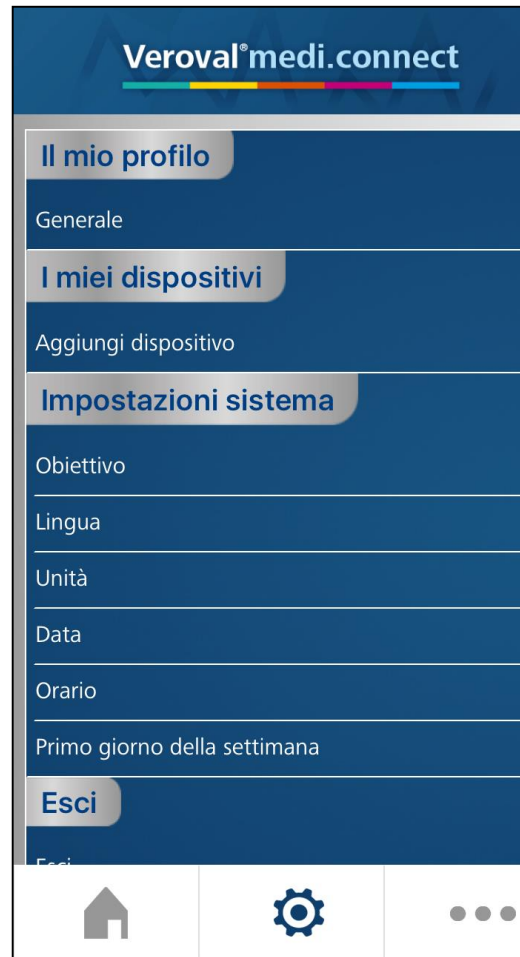

...e cliccare su «aggiungi dispositivo» nella sezione «i miei dispositivi»



...per aggiungere il dispositivo. Questo passaggio deve essere eseguito una sola volta.

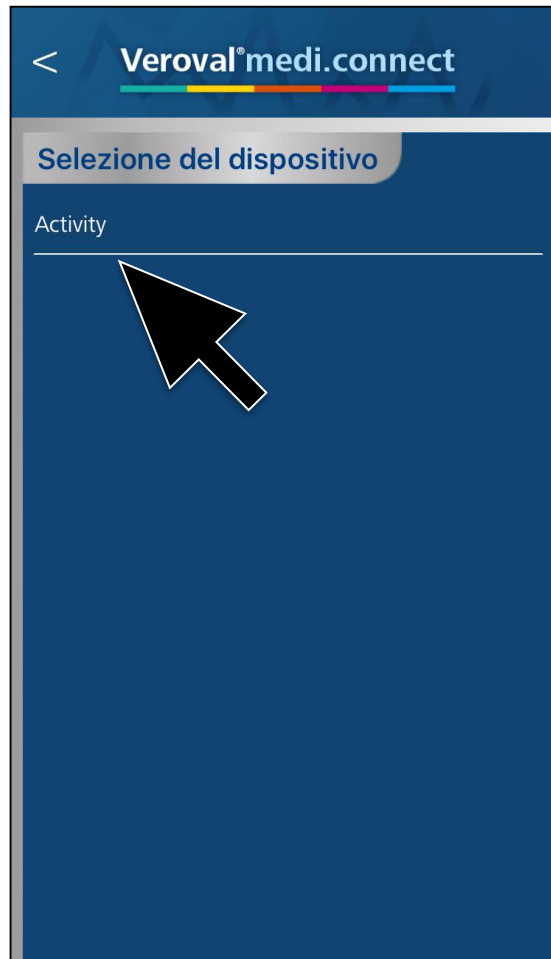


Nella «selezione del dispositivo» cliccare su «Activity»




...per aprire la pagina «**Connetti Activity Tracker**»

Veroval®

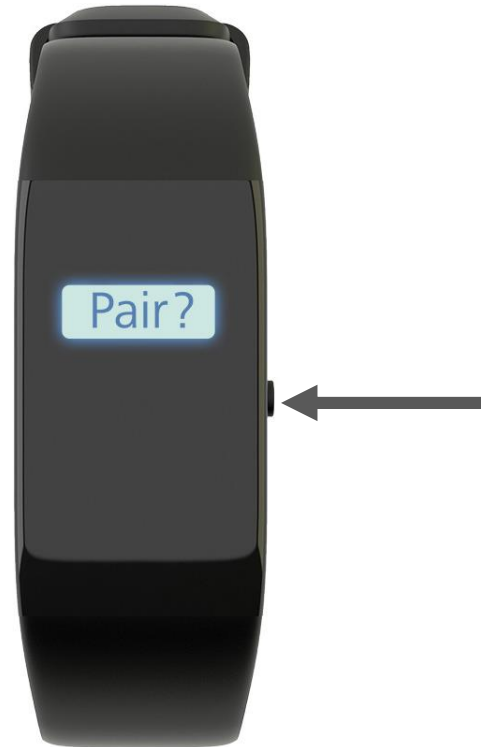

Premere il tasto destro sulla modalità ora finchè non appare il messaggio «Pair?»...

Veroval[®]

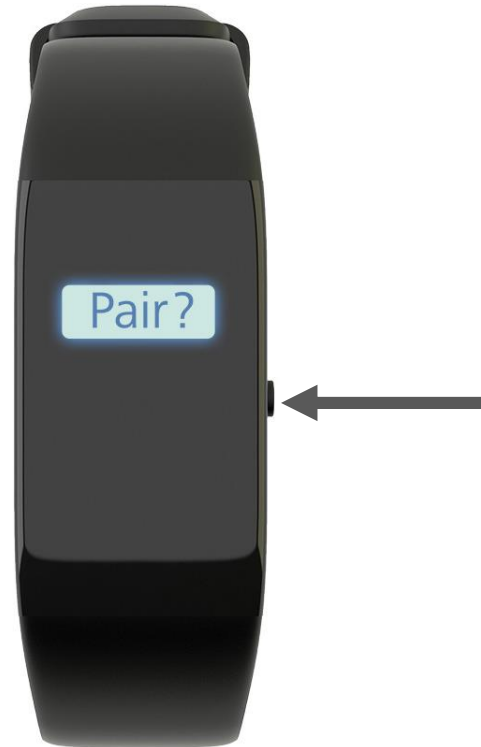

...premere brevemente una volta per confermare...

Veroval®



...la scritta «Pairing» lampeggia durante l'abbinamento.



Ora clicca su «Connettere ora»...



...per iniziare la ricerca del braccialetto.

Veroval®



Se la connessione dopo 30 secondi non è stabilita, appare una «X» e si attiva la modalità stand-by.

Veroval®



Se la connessione dopo 30 secondi non è stabilita, appare una «X» e si attiva la modalità stand-by.

Veroval®



In questo caso, collegare nuovamente il dispositivo.

Veroval®



Quando l'abbinamento avviene con successo un segno di spunta appare sul display.

The screenshot displays the 'Veroval® medi.connect' app interface. At the top, there is a back arrow and the app name. Below this is a section titled 'Activity Tracker'. Underneath, there is a sub-section 'Corsa e camminata' which contains a table with two columns: 'Distanza' and 'Attività target'. The 'Distanza' row shows '5.5 km' and the 'Attività target' row shows '10000 Passi'. Below this table is another row for 'Attività target' with the value 'NaN Calorie'. A section titled 'Modalità allenamento' with a right-pointing arrow follows. Below that is 'Obiettivo del sonno' with the value '08 : 00 Ore'. Another table shows 'Lunghezza passo' with '55 cm' and 'in corsa' with '75 cm'. Below this is 'Peso' with the value '70.0 kg'. At the bottom of the screen is a button labeled 'Aggiungi dispositivo'.

Distanza	Attività target
5.5 km	10000 Passi

Attività target
NaN Calorie

Obiettivo del sonno
08 : 00 Ore

Lunghezza passo	in corsa
55 cm	75 cm


Peso
70.0 kg

Aggiungi dispositivo

Ora è possibile inserire i dati e gli obiettivi personali...




...e sincronizzare il braccialetto facendo clic su «aggiungi dispositivo».

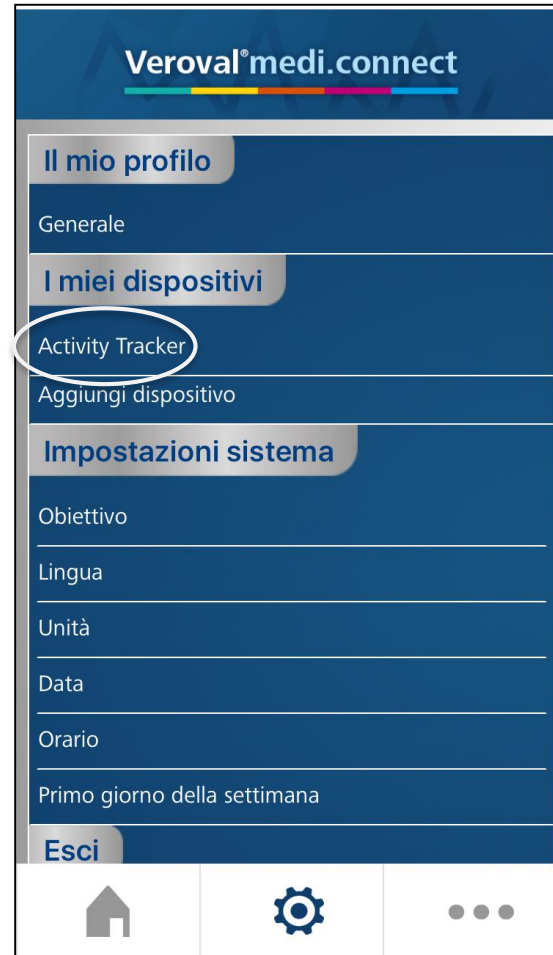

Adesso il tuo braccialetto è disponibile e visibile nella pagina «impostazioni» della app...

Veroval®

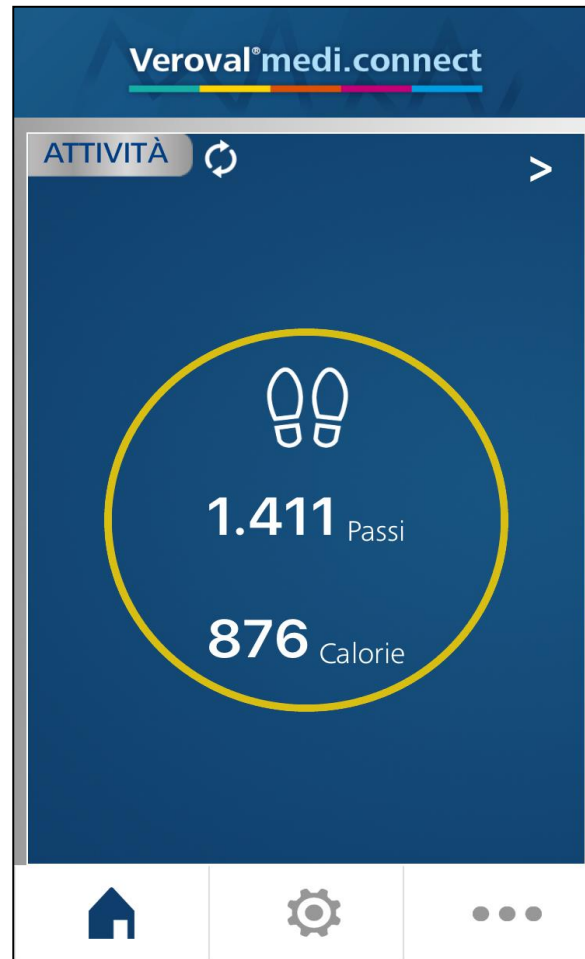

...e puoi visualizzare tutti i tuoi dati.

Veroval®

