

Veroval®



Veroval®




Il contenuto di questo video può anche essere scaricato in formato pdf.

Veroval®



In questo breve video vi spieghiamo come è possibile accedere a Veroval® medi.connect da internet per gestire con efficienza i dati vitali da qualsiasi luogo.


Veroval®

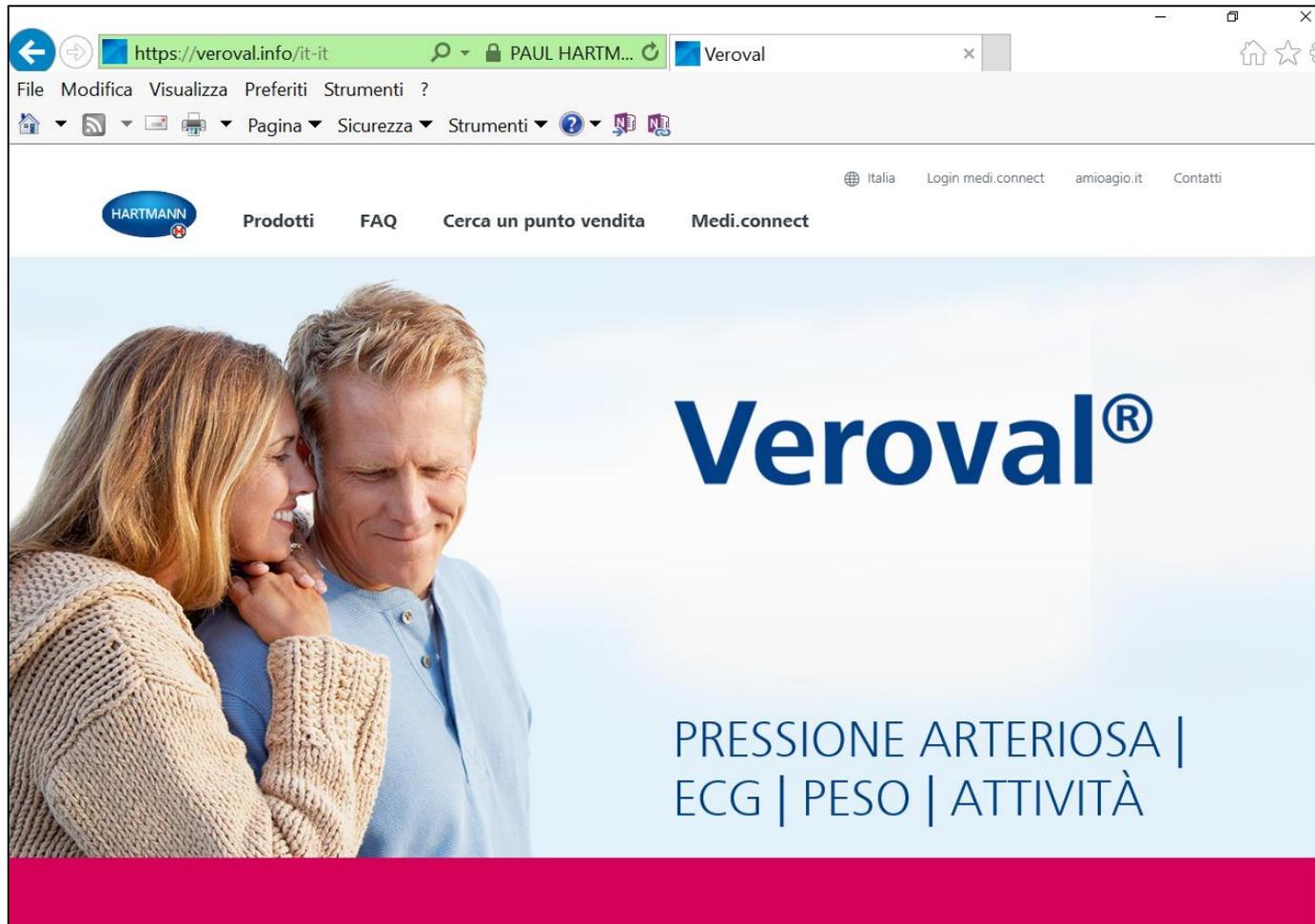

The image shows a screenshot of a web browser displaying the Veroval website. The browser's address bar shows the URL <https://veroval.info/it-it>. The website header includes the HARTMANN logo, navigation links for 'Prodotti', 'FAQ', 'Cerca un punto vendita', and 'Medi.connect', and utility links for 'Italia', 'Login medi.connect', 'amioagio.it', and 'Contatti'. The main content area features a photograph of a woman hugging an elderly man from behind. To the right of the photo, the text 'Veroval®' is displayed in a large blue font. Below this, the text 'PRESSIONE ARTERIOSA | ECG | PESO | ATTIVITÀ' is shown in a smaller blue font. A solid pink horizontal bar is positioned at the bottom of the website's main content area.

Visita il sito www.veroval.it e collegati a medi.connect...

Veroval®

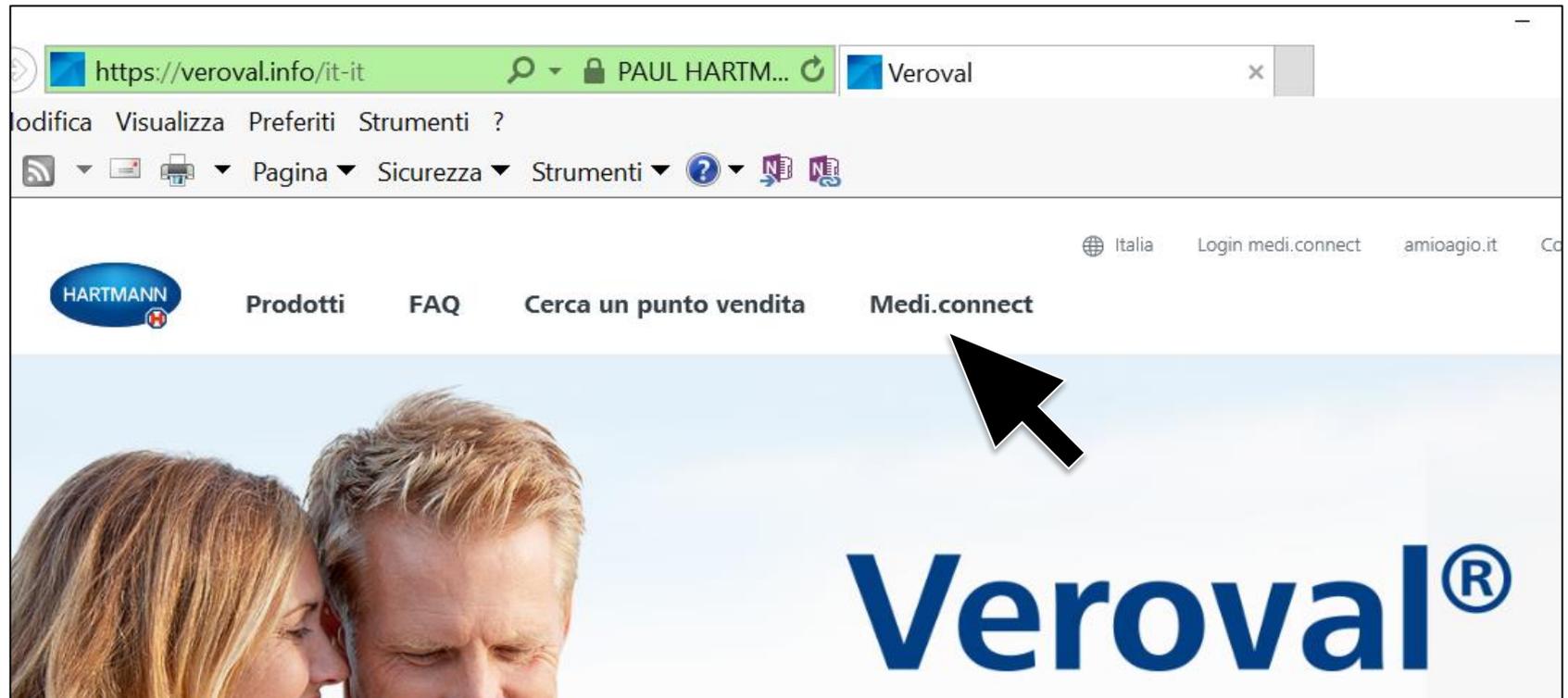

Cliccando su mediconnect nel pannello in alto...

Veroval®

HARTMANN

Prodotti FAQ Cerca un punto vendita Medi.connect

halia Login medi.connect amioeg.it Contatti

Veroval®

PRESSIONE ARTERIOSA |
ECG | PESO | ATTIVITÀ

MEDI.CONNECT
I tuoi dati vitali in un click.

PRESSIONE ARTERIOSA
Precisi, confortevoli, semplici: misuratori di pressione di ultima generazione.

...o nella panoramica.

Veroval®



I tuoi dati vitali in un click.



Login

Clicca qui per effettuare il login su medi.connect



Download Veroval® medi.connect

Clicca qui per scaricare il software Veroval® medi.connect e salvare una copia sul tuo computer.

(compatibile con Windows 7, 8 e 10, se supportato ufficialmente da Microsoft)

La pagina di medi.connect è ora visualizzata.

Veroval®

I tuoi dati vitali in un click.



Login

Clicca qui per effettuare il login su medi.connect



Download Veroval medi.connect

Clicca qui per scaricare il software Veroval® medi.connect e salvare una copia sul tuo computer.

(compatibile con Windows 7, 8 e 10, se supportato ufficialmente da Microsoft)

Cliccare a sinistra su «Login»...

Veroval® medi.connect

English

HARTMANN

Login

Email

Password

Login ▶

[Forgotten your password?](#)

Don't have a Veroval medi.connect account yet? Please register here: [Registration](#)


...per aprire la pagina di login.

Veroval®



Per prima cosa selezionare la lingua in alto a destra.

Veroval®

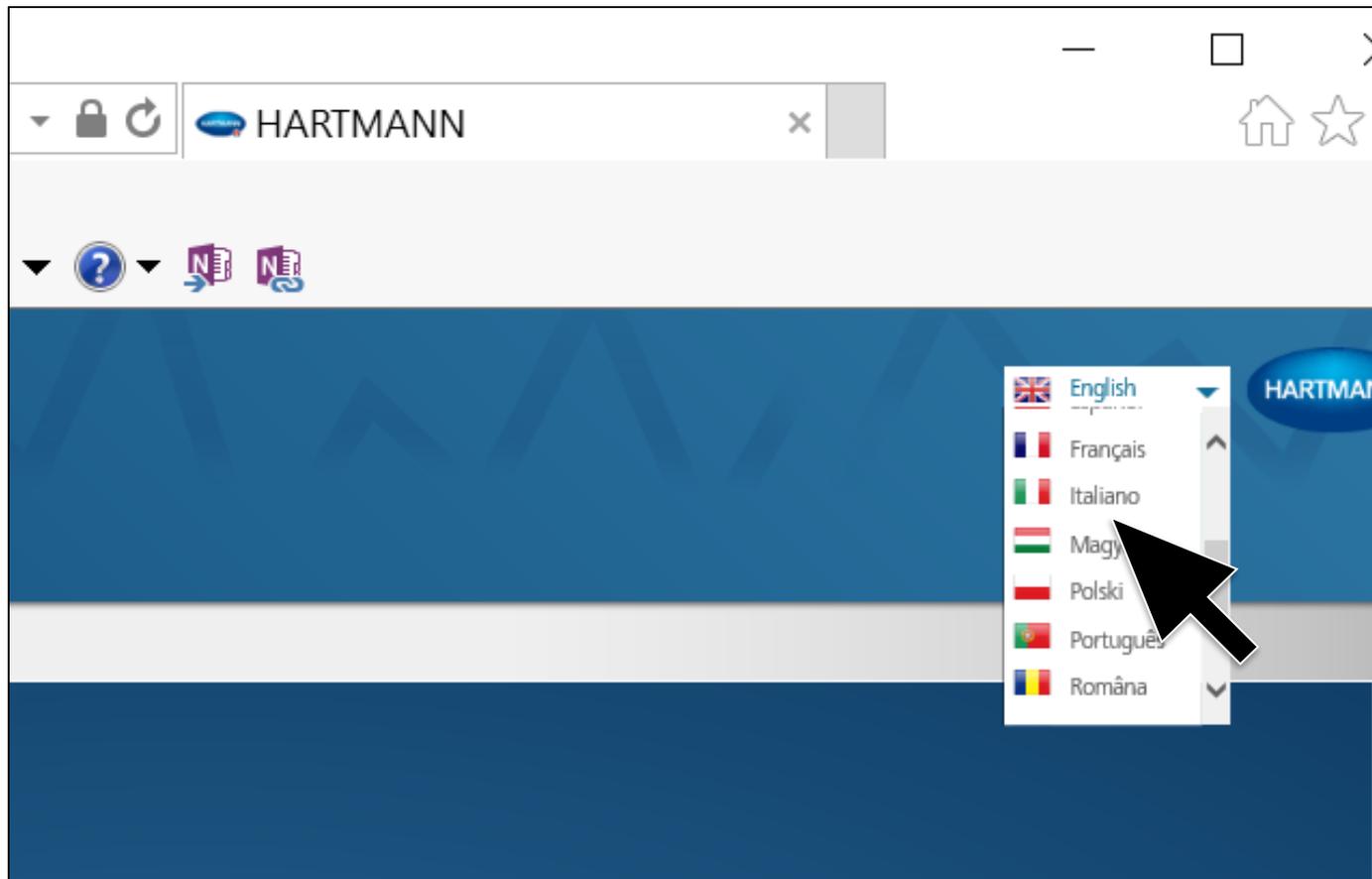

Per prima cosa selezionare la lingua in alto a destra.

Accedi

E-Mail

Password

Accedi ▶

[Password dimenticata?](#)

Non sei ancora registrato a Veroval medi.connect? Ti preghiamo di registrarti qui: [Registrazione](#)



Per poter utilizzare Veroval® medi.connect è necessario registrarsi.

Veroval® medi.connect

Registrazione

Crea nuovo profilo Veroval® medi.connect

Compilare i dati richiesti per creare il proprio profilo.

Sesso *	Signor ▾	E-Mail *	<input type="text"/>
Nome *	<input type="text"/>	Password *	<input type="password"/>
Cognome *	<input type="text"/>	Ripetere la password. *	<input type="password"/>

- Desidero essere informato via e-mail su nuovi prodotti e aggiornamenti di Veroval® medi.connect
- Accetto Condizioni di utilizzo
- Accetto Disposizioni sulla protezione dei dati

 [Registrazione ▶](#)

Compilare tutti i campi...

Veroval® medi.connect

Registrazione

Crea nuovo profilo Veroval® medi.connect
Compilare i dati richiesti per creare il proprio profilo.

Sesso * E-Mail *

Nome * Password *

Cognome * Ripetere la password *

- Desidero essere informato via e-mail su nuovi prodotti e aggiornamenti di Veroval® medi.connect
- Accetto Condizioni di utilizzo
- Accetto Disposizioni sulla protezione dei dati

... e quindi fare clic su «Registrazione». I dati saranno memorizzati in modo sicuro su un server in Germania.



Si riceverà ora una mail di conferma.



grazie per il Suo interesse al nostro Veroval medi.connect. Per attivare il Suo account utente clicchi sul seguente link:
Per attivare l'account utente, fare clic sul link seguente:

<https://veroval-mediconnect.info/Modules/Account/RegistrationCompletion.aspx?Id=7860991a-169c-4605-8654-5130c9d4e561>

In caso di domande o problemi rivolgetevi al seguente indirizzo e-mail:

info@hartmann.info

Attenzione, i collegamenti presenti rimangono validi solo per cinque giorni dopo l'invio di questa e-mail.

Cordiali saluti,

Team Hartmann

Cliccare sul link della mail per confermare la registrazione.

Veroval® medi.connect

Vorbild ansehen Deutsch HA

Registrierung

Neues Veroval® medi.connect Profil anlegen


Bitte füllen Sie die geforderten Daten aus um Ihr Profil anzulegen.

Geburtsdatum * Größe * Zentimeter Ende ▶

Impressum | Kontakt | AGB | Nutzungsbedingungen | Datenschutz
PAUL HARTMANN AG


Inserire data di nascita e altezza.

Veroval®

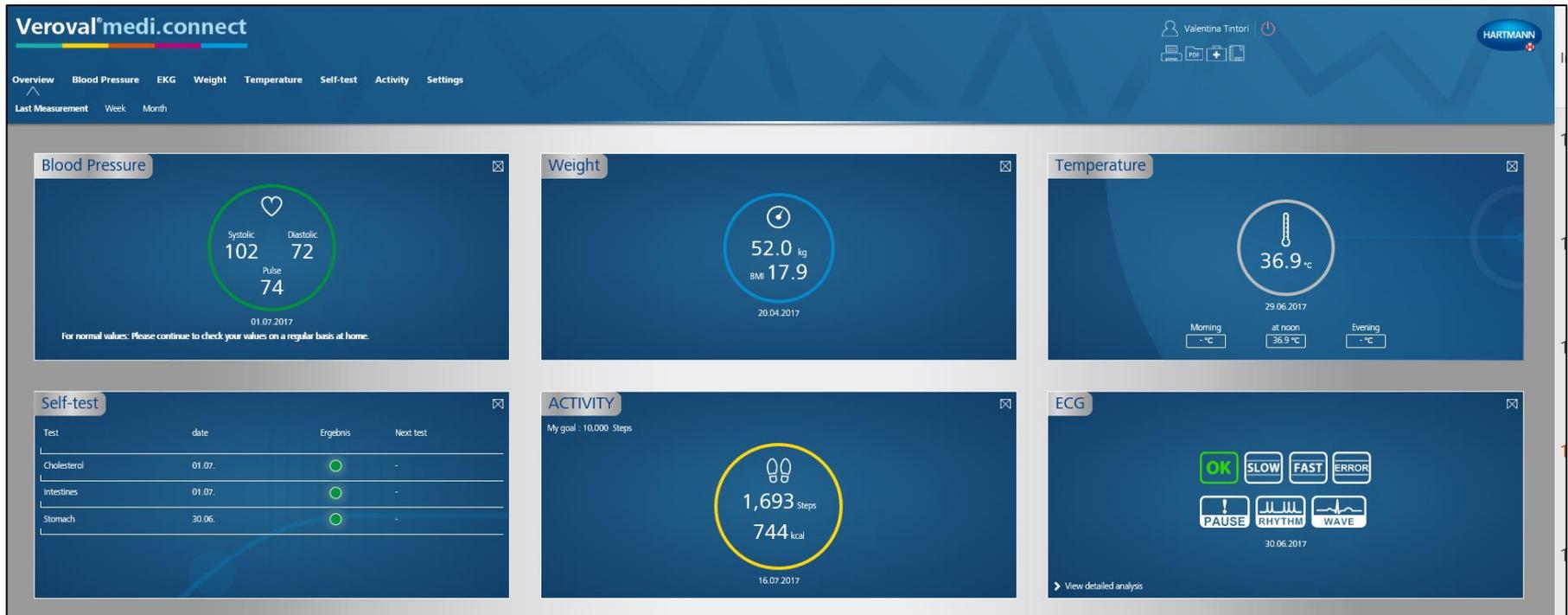

A questo punto la registrazione è avvenuta con successo ed è possibile accedere all'applicazione web con i vostri dati in qualsiasi momento.

Veroval®

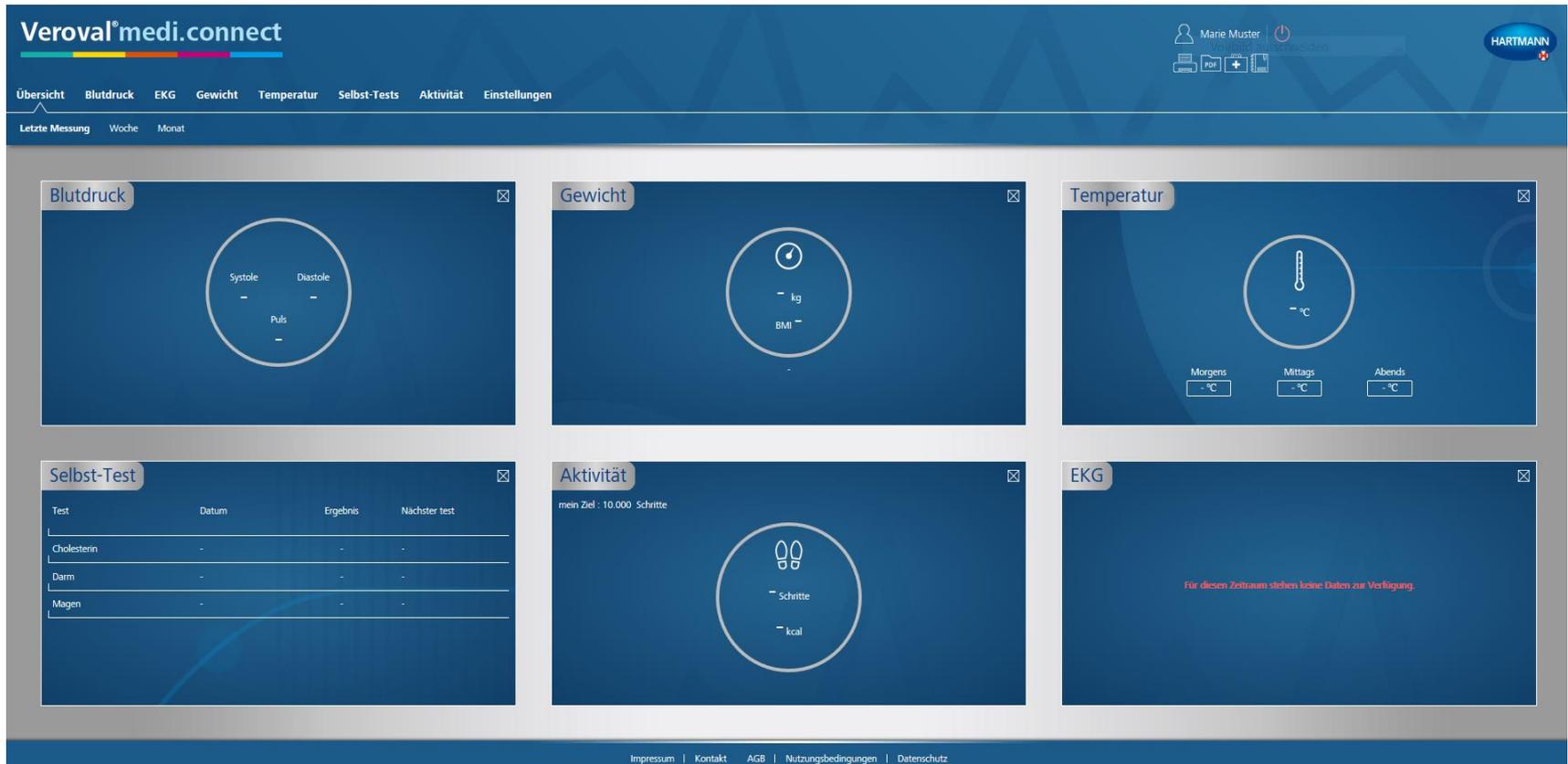

È possibile ora trasferire i dati vitali dal software Veroval® medi.connect all'applicazione web.

Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect software interface. At the top, the user is identified as Marie Muster. The main navigation bar includes sections for 'Übersicht', 'Blutdruck', 'EKG', 'Gewicht', 'Temperatur', 'Selbst-Test', and 'Einstellungen'. Below this, there are filters for 'letzte Messung', 'letzte Woche', 'letzte Monat', and 'Tageszeit'. The interface is divided into several data panels:

- Blutdruck (Blood Pressure):** Shows a heart icon, Systole (128), Diastole (71), and Puls (70) for the date 23.06.2017. A note states: 'Werte im grünen Bereich: Bitte die Werte weiterhin regelmäßig selbst kontrollieren.'
- Gewicht (Weight):** Shows a scale icon, weight in kg, and BMI.
- Temperatur (Temperature):** Shows a thermometer icon and three input fields for 'morgens', 'mittags', and 'abends'.
- Selbst-Test (Self-Test):** A table with columns 'Test', 'Datum', 'Ergebnis', and 'nächster Test'. The rows are for 'Cholesterin', 'Darm', and 'Magen', all with '-' in the 'Ergebnis' column.
- EKG (ECG):** Shows a grid of status indicators: 'OK' (highlighted in green), 'SLOW', 'FAST', 'ERROR', 'PAUSE', 'RHYTHM', and 'WAVE'. The date 23.06.2017 is shown below, along with a link '>> Detaillierte Auswertung ansehen'.

Per far questo occorre aprire il software sul PC...

Veroval®

Veroval® medi.connect

Mario Rossi

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test **Impostazioni**

ultima misurazione ultima settimana Ultimo Mese

Pressione arteriosa

Sistole Diastole

Polso

Peso

Kg

BMI

Temperatura

mattina a mezzogiorno sera

...e cliccare su «impostazioni».

Veroval® medi.connect

Mario Rossi
M1 M2

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test **Impostazioni**

Il mio profilo Sistema Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Promemoria

Il mio profilo

Sesso ^{*} uomo donna

Nome ^{*} Mario

Cognome ^{*} Rossi

Data di nascita ^{*} 01/01/1980 Età (anni) 37

Altezza ^{*} 190 Centimetri

Via

CAP

Città

Password Protezione con password non impostata

^{*} = campo obbligatorio

[Nuovo](#) [Salva](#) [Annulla](#) [Cancellare profilo](#) [Accedere al sito Veroval® medi.connect](#)

Nella pagina «Impostazioni»...

Veroval®

Il mio profilo

Sesso * uomo donna

Nome * CAP

Cognome * Città

Data di nascita * Età (anni) Altezza * Centimetri

Password

* = campo obbligatorio

[Nuovo](#) [Salva](#) [Annulla](#) [Cancellare profilo](#) [Accedere al sito Veroval® medi.connect](#)

...cliccare su «Accedere al sito Veroval® medi.connect».

Il mio profilo

Sesso * uomo donna

Nome * Mario

Cognome * Rossi

Data di nascita * 01/01/1980 Età (anni) 37 Altezza * 190 Centimetri

Password Protezione con password non impostata

Via

CAP

Città

Accedere al sito Veroval® medi.connect

Nuovo utente

Utente esistente

Procedi Cancella

Nella nuova finestra cliccare su «Utente esistente» (se siete già registrati sul web) e cliccare su «Procedi».

Veroval®

Il mio profilo

Sesso * uomo donna

Nome * CAP

Cognome * Città

Data di nascita * Et  (anni) Altezza * Centimetri

Password

E-Mail *

Password *

* = campo obbligatorio

Inserire l'indirizzo email e la password utilizzati per la registrazione e cliccare «Salva».

Veroval®

Il mio profilo

Sesso * uomo donna

Nome *

Cognome *

Data di nascita * Età (anni)

Altezza * Centimetri

Via

CAP

Città


Password

* = campo obbligatorio


Sincronizzazione avviata - attendere prego ...

Inizia così la sincronizzazione...

Veroval®

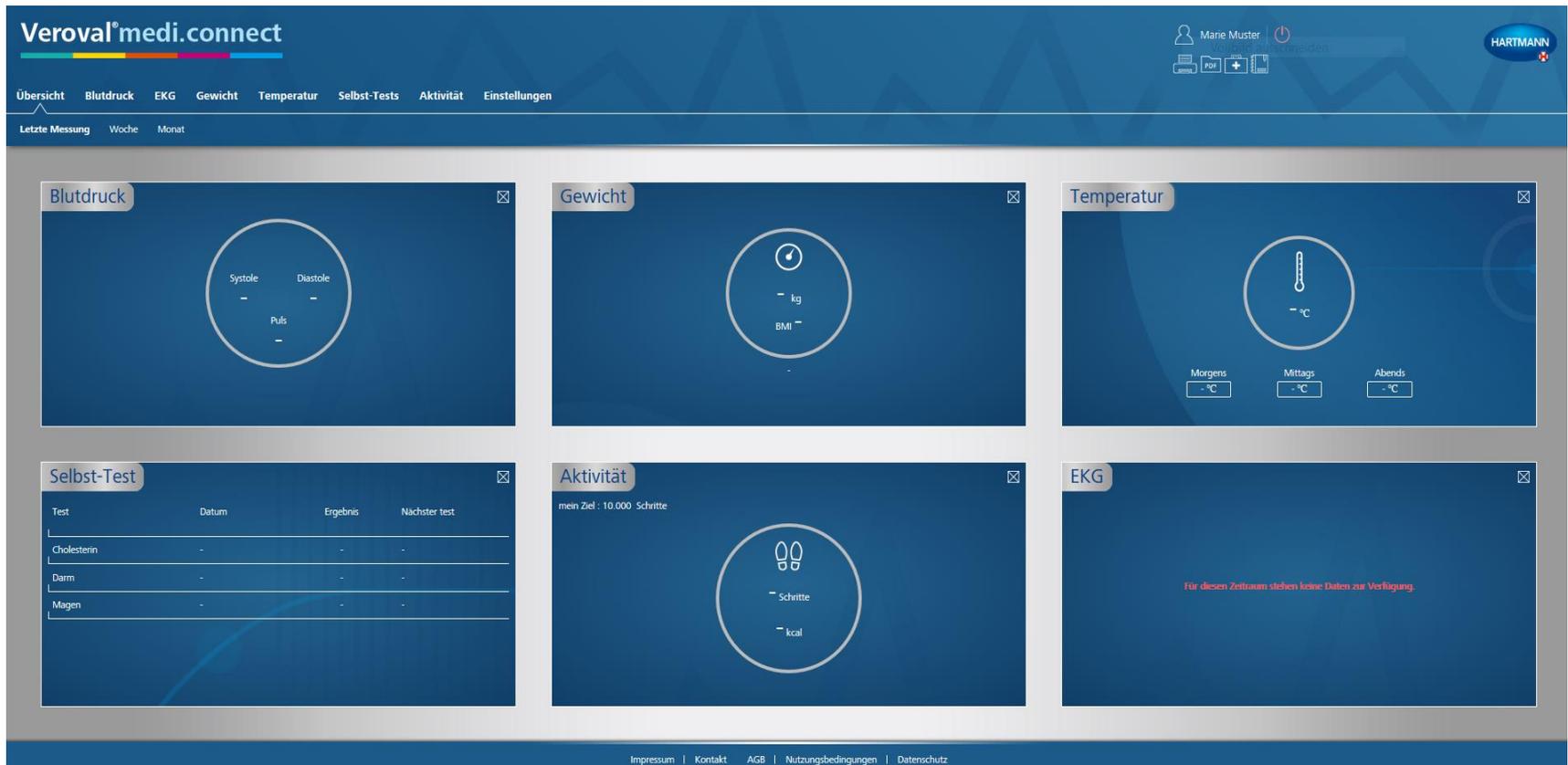

...che permetterà di accedere ai dati anche da internet.

Veroval®

