

# DEZINFEKČNÍ PROGRAM

| OBLAST POUŽITÍ                  | PŘÍPRAVEK                                   | KONCENTRACE                 | EXPOZIČNÍ DOBA  | ÚČINNOST  | ZPŮSOB POUŽITÍ   |  |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|--|--|
| RUCE                            | Hygienická dezinfekce                       | Sterillium®                 | konc.           | 30 s  | AB <sub>1</sub> TM   | vtírat do suchých rukou tak, aby byla pokožka smočena celou dobu působení se zvláštní důrazem na konečky prstů a palce                           |
|                                 |   | Sterillium® classic pure    | konc.           | 30 s  | AB <sub>1</sub> TM   |  |
|                                 |   | Sterillium® med             | konc.           | 30 s  | ABTMV  |  |
|                                 |   | Sterillium® Gel pure        | konc.           | 30 s<br>60 s  | AB <sub>1</sub> TMV<br>ABTMV   |  |
|                                 |   | Sterillium® Virugard        | konc.           | 30 s  | ABTMV  |  |
|                                 | Manusept® basic                             | konc.                       | 30 s            | AB <sub>1</sub> T   |  |  |
|                                 | Mýtí rukou                                  | Baktolin® pure              |                 |   |  | na začátku pracovní směny; při viditelně znečištěných rukách; po použití toalety; před jídlem  |
|                                 |   | Baktolan® lotion            |                 |   |  | po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (normální pokožka)  |
|                                 |   | Baktolan® lotion pure       |                 |   |  | po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka)   |
|                                 |   | Baktolan® balm              |                 |   |  | po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (suchá pokožka)   |
| Baktolan® balm pure             |   |                             |                 |   | po umytí vodou a mýdlem; při pocitu vysušené pokožky (velmi citlivá pokožka) |  |
| Péče o ruce                     | Baktolan® protect                           |                             |                 |   | při příchodu na směnu, před dlouhodobým použitím rukavic                     |  |
|                                 | Baktolan® protect+ pure                     |                             |                 |   | k ochraně, regeneraci a výživě pokožky                                       |  |
|                                 |   |                             |                 |   |  |  |
| KÚŽE A TĚLO                     | Dezinfekce kůže                             | Cutasept® F                 | konc.           | 15 s  | AB <sub>1</sub> T  | před vpichy, zaváděním kanyl apod. na místech s malým počtem tukových žláz   |
|                                 |   | Cutasept® G                 | konc.           | 1 min   |  | před operačními zákroky na místech s malým množstvím tukových žláz   |
|                                 |   | Cutasept® G                 | konc.           | 2 min   |  | vždy na místech s velkým množstvím tukových žláz   |
|                                 | Eradikace MRSA - Dekontaminace těla a vlasů | Stellisept® med             | konc.           | 30 s  | A  | 1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nechat působit, poté opláchnout  |
|                                 |   | Stellisept® med foam        | konc.           | 60 s  | A  | 1x denně nanést na tělo a vlasy pacienta, nemusí se oplachovat   |
| Stellisept® med gloves          | konc.                                       | 60 s                        | A               | 1x denně otřít tělo a vlasy pacienta navlhčenými ubrousky, nemusí se oplachovat |  |  |
| NÁSTROJE                        | Dekontaminace                               | Bomix® plus                 | 0,5%            | 15 min  | AB <sub>1</sub>  | ponořit do pracovního roztoku tak, aby byly smočeny všechny části; po vyjmutí opláchnout tekoucí vodou a osušit                                  |
|                                 |   |                             | 2%              | 5 min   |  |  |
|                                 |   |                             | 3%              | 15 min  |  |  |
|                                 |   | Korsolex® plus              | 2%              | 30 min  | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 |   |                             | 1%              | 60 min  |  |  |
|                                 | Korsolex® med AF                            | 1,5%                        | 15 min          | AB <sub>1</sub> TM  |  |  |
|                                 |   | 0,75%                       | 30 min          |   |  |  |
|                                 | Druhý stupeň dezinfekce                     | Korsolex® basic             | 1%              | 60 min  | ABV  | ponořit do pracovního roztoku tak, aby byly smočeny všechny části; po vyjmutí opláchnout tekoucí vodou a osušit                                  |
|                                 |   |                             | 2%              | 15 min  |  |  |
|                                 | Vyšší stupeň dezinfekce                     | Korsolex® PAA               | konc.           | 15 min  | ABCTMV   | vyšší stupeň - ponořit tak, aby všechna dezinfikovaná místa byla smočena, po uplynutí expoziční doby vyjmout, opláchnout sterilní vodou a osušit |
|                                 |   |                             | Korsolex® basic | 5%  |  |  |
|                                 | Čištění nástrojů                            | Bodedex® forte              | 0,5% - 1%       | 5 - 10 min  |  | čistit ponořené pod hladinou roztoku, opláchnout pitnou vodou  |
| Dezinfekce odsávacích přístrojů | Mikrobac® dent                              | 2%                          | 30 min          | AB <sub>1</sub> TV  | 1x denně - po skončení pracovní směny  |  |
|                                 |   |                             |                 |   |  |  |
| Strojový reprocessing endoskopů | Korsolex® Endo-Cleaner                      | 0,5%                        | 5 min           |   | při teplotě 45 - 55 °C   |  |
|                                 |   | Korsolex® Endo-Disinfectant | 1%              | 5 min   | ABCTMV   | při teplotě 50 - 55 °C   |
| PLOCHY A POVRCHY                | Rychlá dezinfekce postříkáním               | Bacillo® AF                 | konc.           | 30 s  | AB <sub>1</sub> TM   | nastříkat na suchou plochu, rozetřít   |
|                                 |   | Bacillo® 30 Foam            | konc.           | 30 s  | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 | Rychlá dezinfekce otřením                   | Bacillo® Tissues            | utěrka          | 30 s  | AB <sub>1</sub> TM   | otřít plochu nebo předmět utěrkou tak, aby byly vlhké po celou expoziční dobu  |
|                                 |   | Bacillo® 30 Tissues         | utěrka          | 30 s  | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 |   | Kohrsolin® extra Tissues    | utěrka          | 2 h   | ABTMV  |  |
|                                 |   | Mikrobac® Virucidal Tissues | utěrka          | 2 min<br>10 min   | AB<br>ABCV   |  |
|                                 |   | Mikrobac® Tissues           | utěrka          | 1 min   | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 | Čištění a dezinfekce                        | Mikrobac® forte             | 0,5%            | 1 h   | AB <sub>1</sub>  | vytřít nebo otřít, nechat zaschnout  |
|                                 |   |                             | 1%              | 30 min  | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 |   |                             | 2,5%            | 1 h   | AB <sub>1</sub> T  |  |
|                                 |   |                             | 0,5%            | 1 h   | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 |   |                             | 1%              | 15 min  | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 |   | Kohrsolin® FF               | 1,5%            | 1 h   | AB <sub>1</sub> T  |  |
|                                 |   |                             | 4%              | 1 h   | ABTMV  |  |
|                                 |   |                             | 2%              | 6 h   | ABCTMV   |  |
|                                 |   |                             | 0,25%           | 1 h   | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 |   | Kohrsolin® extra            | 0,5%            | 15 min  | AB <sub>1</sub>  |  |
|                                 |   |                             | 2%              | 2 h   | ABTM   |  |
|                                 |   |                             | 3%              | 2 h   | ABTMV  |  |
|                                 |   |                             | 2%              | 4 h   | ABCM   |  |
|                                 |   |                             | 0,4%            | 1 h   | AB   |  |
|                                 |   |                             | 1,2%            | 30 min  | ABT  |  |
|                                 | 0,8%  |                             | 1 h             | ABC   |  |  |
|                                 | Dismozon® plus                              | 0,8%                        | 4 h             | ABCTM   |  |  |
|                                 |   | 2,8%                        | 2 h             | ABCTMV  |  |  |
|                                 |   |                             |                 |   |  |  |
|                                 |   |                             |                 |   |  |  |
| Dismofix® G                     | 0,25% - 100%                                |                             |                 |   | čištění toalet, koupelen, sanitárních místností                              |  |

## Vysvětlivky:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>A</b>             | baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH       |
| <b>B</b>             | fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 ( <i>Candida albicans</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH                    |
| <b>B<sub>1</sub></b> | virucidní podle ČSN EN 14476 ( <i>Adenovirus, Poliovirus, MNV</i> )  |
| <b>B<sub>1</sub></b> | virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN 14476 ( <i>Vacciniavirus</i> ) nebo podle DVV/RKI ( <i>Vacciniavirus, BVDV</i> )  |
| <b>C</b>             | sporicidní podle ČSN EN 14347 nebo na spóry <i>Clostridium difficile</i> ribotyp 027 ( <i>Kohrsolin® FF</i> )                              |
| <b>T</b>             | tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 ( <i>Mycobacterium terrae</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH                        |
| <b>M</b>             | mykobaktericidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 ( <i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH |
| <b>V</b>             | fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 ( <i>Candida albicans, Aspergillus niger</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH             |