

Zavádzanie periférneho žilového katétra

Štandardný ošetrovateľský postup

Periférna žilová katetrizácia je invazívny zákrok, s ktorým sú spojené riziká infekcie. Preto je nutné venovať tejto problematike pozornosť a minimalizovať tieto riziká dodržiavaním správnych postupov zavádzania a ošetrovania periférneho žilového katétra.



1 Vydezinfikujte si ruky



2 Pripravte materiál a pacienta



3 Vyberte miesto vpichu, umiestnite škrtdlo a palpujte



4 Vydezinfikujte pokožku



5 Dodržte expozičný čas (min. 15 s)



6 Nepalpujte miesto vpichu (prípadne dodržte aseptickú techniku)



7 Vydezinfikujte si ruky



8 Nasadte si rukavice



9 Otvorte sterilné balenie kanyly



10 Zaveďte kanylu



11 Odstráňte škrtdlo a vytiahnite ihlu



12 Pripojte sterilnú spojku/infúziu



13 Prekryte miesto vpichu sterilným krytím a zafixujte ho



14 Dajte si dolu rukavice



15 Vydezinfikujte si ruky



16 Vydezinfikujte kontaktné plochy

ŠETRITE SVOJ ČAS A VYUŽITE PRIPRAVENÝ MEDISET® A ĎALŠIE ODPORUČENÉ PRODUKTY



NOVINKA

MediSet® na periférnu žilovú katetrizáciu

- 3× kompres netkaný, 7,5 × 7,5 cm
- 1× lepiace pásiky, 100 × 12,5 mm
- 1× obojsmerný ventil MicroClave® Clear
- 1× predplnená striekačka NaCl, 10 ml
- 1× rúško, 45 × 37,5 cm
- 2× tampón netkaný, veľ. slivka
- 1× pooperačná náplasť Cosmopor I.V., 9 × 7 cm
- 2× vyšetrovacie rukavice, veľ. M
- 1× spojovacia hadička, 30 cm
- 1× škrtdlo
- 1× bezpečnostná kanyla ružová



Sterillium® med

Alkoholový prípravok na chirurgickú a hygienickú dezinfekciu rúk.
500 ml

Číslo výrobku: 981 037



Bacillol®

30 Sensitive Tissues

Utierky napustené alkoholovým roztokom na dezinfekciu povrchov.
Flow pack 80 ks

Číslo výrobku: 981 851