

Eenvoudig reinigen en desinfecteren

- Directe omgeving patiënt/cliënt
- (Medische) hulpmiddelen*



Bacillol® 30 Sensitive Foam



Bed/matras



Stethoscoop



Behandeltafel



Nachtkastje



Po-stoel



Beademings-
apparaat




Werkoppervlak
infuus-,
verbandwagens, etc.



Beeldscherm,
toetsenbord,
touchscreens



Kabels (medisch)
apparatuur

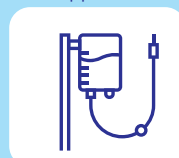

Infuusstandaard/
-pomp

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Bevochtig een doek met Bacillol® 30 Sensitive Foam
- Reinig en desinfecteer het oppervlak
- Laat het oppervlak drogen
- Foam niet direct op het oppervlak sprayen

* Alleen toepassen op niet-invasieve medische hulpmiddelen

Door middel van uitvoerig aangetoonde effectiviteit en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek garanderen wij voor onze hygiëne- en desinfectiegerelateerde producten de hoogst haalbare kwaliteit.