

HARTMANN



# Therapeutische Verbände

Sortimentskatalog



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und  
Schlauchverbände

Wundentlastungs-  
verband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband



# Stützen, komprimieren oder ruhig stellen.

**Therapeutische Verbände haben  
ein breites Indikationsgebiet.**

Als ruhig stellende Verbände sind sie bei der konservativen Behandlung von Frakturen oder zur Immobilisation von Körperbereichen indiziert. Als komprimierende Verbände stellen sie die Basisbehandlung der chronisch venösen Insuffizienz einschließlich venöser Ulzera dar. Als sogenannte „funktionelle“ Verbände, die komprimieren, stützen und entlasten, sind sie bei Verletzungen und Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates oftmals Therapie der Wahl.



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und  
Schlauchverbände

Wundentlastungs-  
verband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband



# INHALT


<b>Tipps &amp; Tricks zum Anlegen eines Kompressionsverbandes</b>	<b>4</b>
<b>Kompressionsbinden</b>	<b>7</b>
Pütterbinde®	7
Pütter®Flex	8
Pütter®Pro 2	9
Pütter®-haft	10
Lastodur®	11
<b>Zinkleimbinde</b>	<b>13</b>
Varolast® Plus	13
<b>Universalbinden</b>	<b>15</b>
Idealflex® Universal	15
Idealast®	16
Idealast®-haft / Idealast®-haft color	17
<b>Fixierbinden</b>	<b>19</b>
Peha-haft®	19
Peha®-Mullbinden	20
Peha-fix®	21
<b>Netz- und Schlauchverbände</b>	<b>23</b>
Stülpa®	23
Stülpa-fix®	24
Coverflex® fast	25
Coverflex® grip	26
<b>Wundentlastungsverband</b>	<b>27</b>
Verba®	27
<b>Gipsbinde</b>	<b>29</b>
Safix® plus	29
<b>Polsterbinde</b>	<b>31</b>
Rolta® soft	31
<b>Tapeverband</b>	<b>33</b>
Omnitape®	33

Das gesamte HARTMANN-Sortiment finden Sie online: [at.catalog.hartmann.info](http://at.catalog.hartmann.info)




# Einfach anwenden. Einfach püttern.


## Kompressionsverband mit HARTMANN

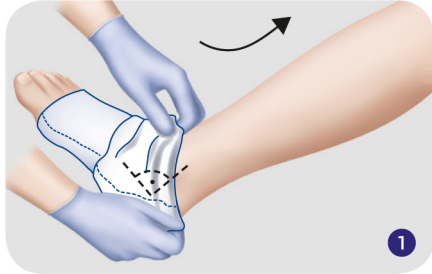


1 Schlauchverband zum Schutz der Haut und zur Fixierung der Wundauflage überziehen.

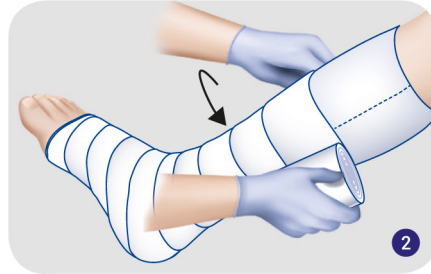


2 Polsterbinde anwickeln und gegebenenfalls Pelotten zum Auf- bzw. Abpolstern platzieren.

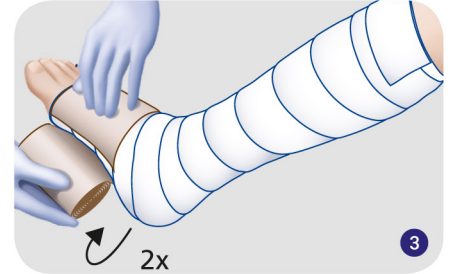


3 Fuß in Funktionsstellung halten und mit der ersten Bindentour an den Zehengrundgelenken beginnen.

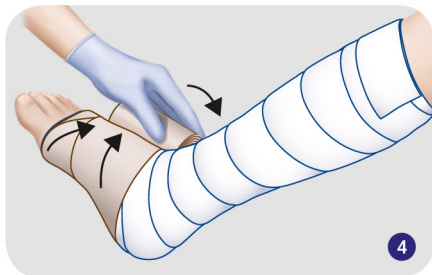


4 Nach zwei bis drei Touren um den Mittelfuß herum...

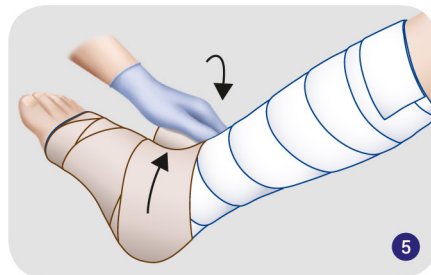


5 ...umschließt die Binde die Ferse. Man führt die Binde über den Knöchel, um den oberen Bindenrand zu fixieren.

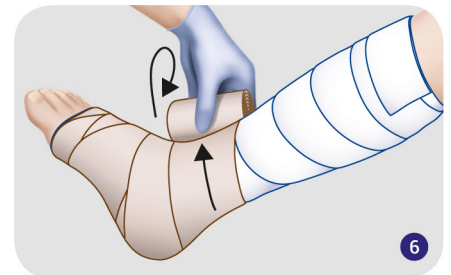


6 Anschließend führt man die Binde über den Rist zur Fußsohle zurück, um den unteren Bindenrand zu fixieren.

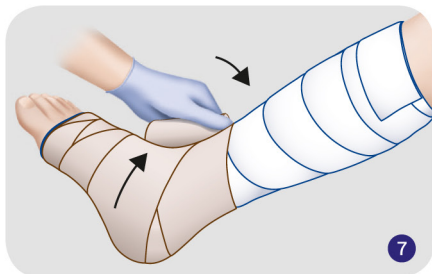


7 Anschließend der Form des Beines folgend die Wade umschließen. Es ist möglich, dass Hautpartien offen bleiben. Wichtig: Um einen gleichmäßigen Anlagerdruck zu erhalten, sollte die Binde in Abrollrichtung angelegt bzw. gezogen werden.

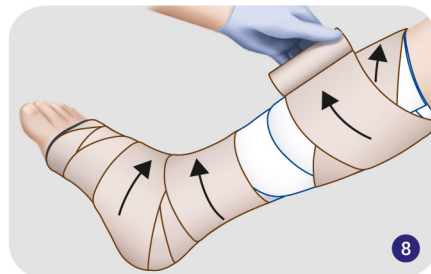


8 Etwa 2 cm (fingerbreit) unterhalb der Kniekehle läuft die Binde einmal um das Bein herum, führt dann der Beinform entsprechend wieder nach unten und schließt vorhandene Lücken im Verband.

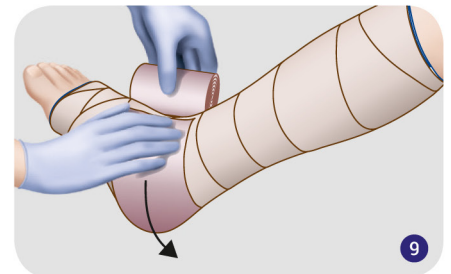


9 Die zweite Kompressionsbinde wird an der Ferse beginnend gegenläufig angelegt.

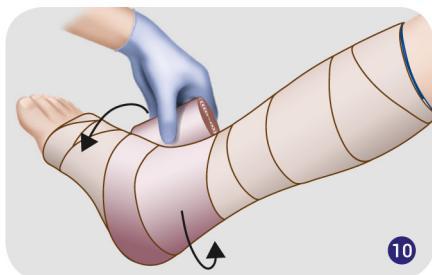

10 Zwei weitere Touren fixieren zuerst den oberen, dann den unteren Rand dieser zweiten Fersentour.

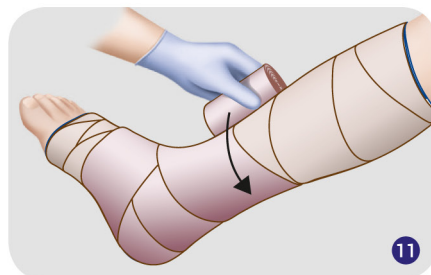

11 Anschließend läuft die Binde in gleicher Weise um den Mittelfuß in weiteren Touren nach oben.

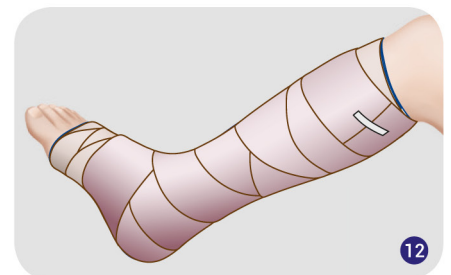


12 Der fertige Verband sitzt etwa 2 cm (fingerbreit) unterhalb der Kniekehle und deckt offene Hautpartien vollständig ab. Zum Schluss wird der Kompressionsverband mit Pflasterstreifen fixiert.



## Glossar

### • Arbeitsdruck – Ruhedruck

Arbeitsdruck nennt man den Druck, den die Binde oder der Strumpf auf das Bein ausübt, wenn der Muskel angespannt wird. Der Druck entsteht durch die Ausdehnung des Muskels beim Anspannen gegen den Widerstand der Binde oder des Strumpfes. Ruhedruck nennt man den Druck, den die Binde oder der Strumpf auf das Bein ausübt, wenn sich das Bein in Ruhestellung befindet. Der Druck entsteht nur allein durch die Rückstellkraft des Bindengewebes.

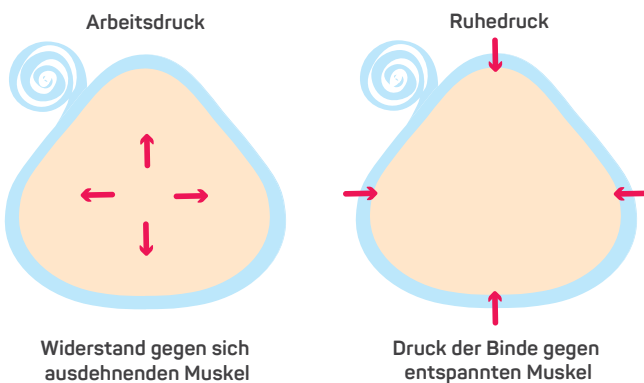

### • Kontraindikationen

Kompressionstherapie sollte zum Beispiel nicht angewendet werden bei:

- Fortgeschrittener arterieller Verschlusskrankheit
- Dekompensierter Herzinsuffizienz
- Einem ABPI über 1,3 oder unter 0,8
- Unverträglichkeit auf verwendete Materialien

Die Kontraindikationen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte vollständig den entsprechenden Packungsbeiliegern.


### • Kurzzug – Langzug

Eine Kurzzugbinde enthält keine elastischen Fäden und hat daher eine geringe Rückstellkraft. Das heißt, die Binde stellt sich nach Ausdehnung nicht mehr in die ursprüngliche Lage zurück. Somit kann die Binde auch keine aktive Kraft auf das Bein ausüben und hat daher einen geringen so genannten Ruhedruck. Sie bietet aber dennoch ein starkes Widerlager für die sich ausdehnende Muskulatur beim Laufen – den so genannten Arbeitsdruck.

Eine Langzugbinde enthält elastische Fäden, die sich nach der Ausdehnung mit Kraft wieder in die ursprüngliche Lage zusammenziehen. Sie erzeugt deshalb einen hohen Ruhedruck. Bei der Muskelkontraktion beim Laufen dehnt sich das Material dagegen stark aus und erzeugt dabei einen nur geringen Arbeitsdruck. Wegen des hohen Ruhedrucks muss die Langzugbinde nachts entfernt werden, da die arterielle Durchblutung beeinträchtigt werden könnte.

### • LaPlace Gesetz


Das LaPlace Gesetz beschreibt das Verhältnis des Drucks zum Radius des umspannten Körpers. Je größer der Kurvenradius desto geringer wird die Kompression. Eine gleichmäßige Druckverteilung wäre somit nur bei einem ideal zylindrisch geformten Bein möglich. Daher ist die Auf- und Abpolsterung des Beines sinnvoll, um den Druck gleichmäßig zu verteilen und so eine gleichmäßige Kompressionswirkung zu erzielen.

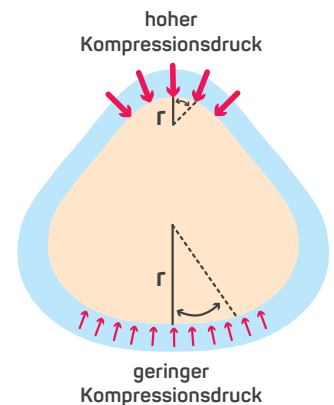

In der Praxis werden daher plane oder konkave Flächen wie Fußrücken oder die Flächen neben den Achillessehnen aufgepolstert, um sie vollständig entstauen zu können. Vorsprünge mit kleinem Radius wie Fußkanten, der Knöchelbereich oder das Schienbein werden abgepolstert, um hier Druckschäden zu verhindern.

### • SSI – Static Stiffness Index

Der Unterschied zwischen dem Druck unter einem Kompressionsverband im Liegen und im Stehen bezeichnet man als SSI. Kurzzugbinden erzeugen einen höheren SSI als Langzugbinden. Je höher der SSI, desto stärker die Kompressionswirkung beim Laufen.

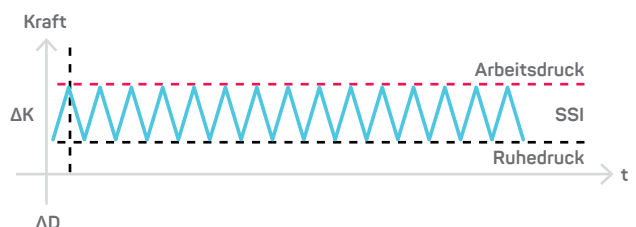



Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalsbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden



# Pütterbinde®

Die besonders kräftige Kurzzugbinde für die gegenläufige Verbandstechnik



Die Pütterbinde kann für die langfristige Kompressionstherapie verwendet werden:

- Behandlung chronisch-venöser Insuffizienz (CVI) mit und ohne venöse Beinulzera
- Thrombose / Thrombophlebitis
- Chronische Ödeme anderen Ursprungs (Knöchel-Arm-Druckindex [ABPI] 0,8–1,3)
- Lymphödeme



Die Pütterbinde kann in Kombination mit allen Wundauflagen bei der Therapie von chronischen Wunden angelegt werden.

### Produkteigenschaften

Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinde, Dehnbarkeit etwa 85 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; waschbar bei 95 °C; hautfarben; aus 100 % Baumwolle

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Pütterbinde®; gedehnt 5 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	931 807	6 cm	1 Binde	40	–
	931 808	8 cm	1 Binde	40	1457552
	931 810	10 cm	1 Binde	40	1457569
	931 812	12 cm	1 Binde	60	1457575
<b>Pütterbinde®; gedehnt 5 m lang, lose in der Faltschachtel</b>	931 806	6 cm	10 Binden	8	–
	931 814	8 cm	10 Binden	8	3424539
	931 815	10 cm	10 Binden	8	3424545
	931 816	12 cm	10 Binden	8	3424551
<b>Pütter-Verband®; gedehnt 5 m lang, in der Faltschachtel; indikationsbezogene Doppelpackung</b>	931 796	1 x 8 cm / 1 x 10 cm	2 Binden	30	–
	931 795	2 x 10 cm	2 Binden	30	0778774





# Pütter®Flex

Die besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde für sehr starke Kompression



PütterFlex kann für die langfristige Kompressionstherapie verwendet werden:

- Behandlung chronisch-venöser Insuffizienz (CVI) mit und ohne venöse Beinulzera
- Thrombose / Thrombophlebitis
- Chronische Ödeme anderen Ursprungs (Knöchel-Arm-Druckindex [ABPI] 0,8–1,3)
- Lymphödeme



PütterFlex kann in Kombination mit allen Wundauflagen bei der Therapie von chronischen Wunden angelegt werden.

Durch das längs- und querelastische Bindenmaterial ist PütterFlex einfach anzulegen, passt sich der Beinform gut an und reduziert so die Faltenbildung, insbesondere im Sprunggelenk, was die Beweglichkeit und den Tragekomfort erhöht. In Kombination mit allen Wundauflagen bei der Therapie von chronischen Wunden geeignet.

## Produkteigenschaften

Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinden, Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich, durch die Quer-elastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen; waschbar bei 95 °C; hautfarben; aus 100 % Baumwolle.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Pütter®Flex; gedehnt 5 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	931 828	8 cm	1 Binde	40	3942576
	931 829	10 cm	1 Binde	40	3942599
	931 830	12 cm	1 Binde	60	3942613
<b>Pütter®Flex; gedehnt 5 m lang, lose in der Faltschachtel</b>	931 832	8 cm	10 Binden	8	3942582
	931 833	10 cm	10 Binden	8	3942607
<b>Pütter®Flex-Duo; gedehnt je 5 m lang, in der Faltschachtel; indikationsbezogene Doppelpackung</b>	931 825	8 / 10 cm	2 Binden	30	4111908
	931 826	10 cm	2 Binden	30	3942642



# Pütter®Pro 2

Das 2-Komponentensystem für konsistent korrekte Kompression und Komfort




Das unsterile 2-Komponenten-Kompressionssystem PütterPro 2 wird verwendet für die langfristige Kompressionstherapie bei der Behandlung chronisch-venöser Insuffizienz (CVI) mit und ohne venöse Beinulzera, Thrombosen bzw. Thrombophlebitis, chronischer Ödeme anderen Ursprungs (Knöchel-Arm-Druckindex – ABPI 0,8–1,3) und Lymphödemem. Der Verband ist zum Einmalgebrauch bestimmt und in Kombination mit allen Wundauflagen bei der Therapie von chronischen Wunden geeignet.



## Produkteigenschaften

Das PütterPro 2 Kompressionssystem-Set umfasst zwei Vliesbinden. Eine der Binden besteht aus Polypropylen und Elastan und ist braun (Kompressionsbinde), die andere besteht aus Polyester und Elastan und ist weiß (Polsterbinde). Die braune Binde ist beidseitig und die weiße Binde einseitig kohäsiv. PütterPro 2 ist als Set verfügbar; beide Binden sind 10 cm breit und von Hand abreißbar. Der visuelle Indikator der Kompressionsbinde (braune Binde) unterstützt das Anlegen.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Pütter®Pro 2; 2 Binden in der Faltschachtel	931 685	10 cm	2 Binden	12	5339393
Pütter®Pro 2; 6 x 2 Binden lose in der Faltschachtel	931 686	10 cm	12 Binden	3	5339401

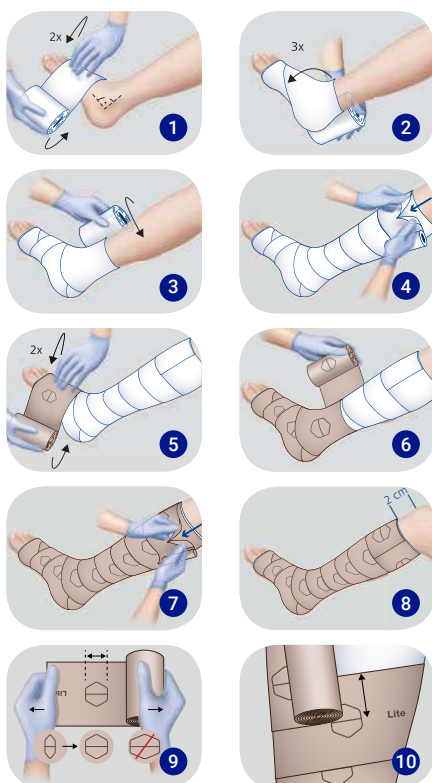

Bitte verwenden Sie dieses System als Set und in der richtigen Reihenfolge. Achten Sie während der Anlage der beiden Binden darauf, dass sich der Fuß des Patienten in einem 90°-Winkel zum Unterschenkel befindet **1**.

Untersuchen Sie vor der Anlage das Bein, um Knochenvorsprünge und potenzielle Druckstellen zu identifizieren, und polstern Sie diese mit der Polsterbinde. Beginnen Sie mit der Anlage der Polsterbinde proximal des Zehengrundgelenks **mit der nicht kohäsiven Seite auf der Haut**. Nach zwei fixierenden Touren (plantar, von medial nach lateral, zur Unterstützung der Pronation) führen Sie die Binde über den Fußrücken und schließen Sie die Ferse in Achtertouren mit ein. Umwickeln Sie den Fuß, ohne Zug auf die Binde auszuüben **1 2**.

Wickeln Sie die Polsterbinde am Unterschenkel unter vollem Zug mit einer Überlappung von 50 % spiralförmig um das Bein **3**. Die Dehnung muss unter Umständen den anatomischen und pathophysiologischen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden. Reißen Sie überschüssiges Bindenmaterial unter der Tuberositas tibiae und etwa 2 cm unterhalb des Fibulaköpfchens ab **4**. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht notwendig; bei Bedarf können Pflasterstreifen verwendet werden.

Beginnen Sie mit der Anlage der Kompressionsbinde, ebenso wie bei der Polsterbinde, proximal des Zehengrundgelenks.

Nach zwei fixierenden Touren führen Sie die Binde über den Fußrücken und schließen die Ferse in Achtertouren mit ein.

Umwickeln Sie den Fuß, ohne Zug auf die Binde auszuüben, und folgen Sie noch nicht dem aufgedruckten Indikator **5**.

Wickeln Sie die kohäsive Kompressionsbinde mit einer Überlappung von 50 % spiralförmig um das Bein. Dehnen Sie die Binde für einen optimalen Druck so weit, bis der aufgedruckte Indikator ein regelmäßiges Hexagon bildet, dessen Seiten alle gleich lang sind **9**. Die Überlappung muss 50 % betragen. Verwenden Sie zur besseren Orientierung die Mittellinie des Hexagons **10**. Reißen Sie überschüssiges Bindenmaterial unter der Tuberositas tibiae und etwa 2 cm unterhalb des Fibulaköpfchens ab.

Drücken Sie den Verband für eine optimale Kohäsion am ganzen Bein vorsichtig fest **7 8**.

Eine zusätzliche Fixierung ist nicht notwendig; bei Bedarf können Pflasterstreifen verwendet werden.



# Pütter®-haft

Die textilelastische Kurzzugbinde mit sicherer Haftkraft



Pütter-haft kann für die langfristige Kompressionstherapie verwendet werden:

- Behandlung chronisch-venöser Insuffizienz (CVI) mit und ohne venöse Beinulzera
- Thrombose/Thrombophlebitis
- chronische Ödeme anderen Ursprungs (Knöchel-Arm-Druckindex [ABPI] 0,8–1,3)
- Lymphödeme



Pütter-haft ist auch in Kombination mit allen Wundauflagen bei der Therapie von chronischen Wunde geeignet.

### Produkteigenschaften

Kohäsive, textilelastische Kurzzugbinde, Dehnbarkeit ca. 65 %; beidseitiger Haft-effekt für rutschfesten Sitz; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungs-aktiv; hautfarben; 100 % Baumwolle, mit einer mikropunktuellen, latexfreien Beschichtung.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Pütter®-haft; gedehnt 5 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	931 840	6 cm	1 Binde	96	4174530
	931 841	8 cm	1 Binde	72	4174547
	931 842	10 cm	1 Binde	64	4174553
	931 843	12 cm	1 Binde	48	5735114
<b>Pütter®-haft; gedehnt 7 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	931 845	20 cm	1 Binde	10	5735120

# Lastodur®

## Die dauerelastische Langzugbinde zum Stützen und Entlasten



Für die Behandlung von Krampfadern, Thrombosen, Thrombophlebitis, chronisch-venöser Insuffizienz (CVI), Primär- und Sekundärprävention von venösen Beingeschwüren, venöser Insuffizienz und für Ödeme anderen Ursprungs (Knöchel-Bein-Druckindex [ABPI] 0,8–1,3). Die Lastodur Binden können auch als Stütz- oder Entlastungsverband bei Verletzungen des Bewegungsapparats verwendet werden. Sie sind als Stütz- und Entlastungsverband nach der Amputation von Gliedmaßen geeignet. Außerdem sind sie als Stützverband bei Verstauchungen, Prellungen, Sehnenverletzungen, Brustverletzungen und Knochendislokationen einsetzbar.

**Lastodur soft** – für leichtere Kompression, Dehnbarkeit ca. 160 %; 82 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 5 % Elastan

**Lastodur strong** – für starke Kompression, Dehnbarkeit ca. 160 %; 84 % Baumwolle, 6 % Polyamid, 10 % Elastan

### Produkteigenschaften

Dauerelastische Langzugbinde mit gut dosierbarer Kompression für anschmiegsame, haltbare Verbände; wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen; atmungsaktiv und hautverträglich; waschbar bis 60 °C; hautfarben.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Lastodur® soft</b> ; gedehnt 7 m lang, einzeln in der Faltschachtel	931 653	6 cm	1 Binde	60	0778544
	931 654	8 cm	1 Binde	60	0778550
	931 655	10 cm	1 Binde	60	0778567
<b>Lastodur® strong</b> ; gedehnt 7 m lang, einzeln in der Faltschachtel	931 663	6 cm	1 Binde	60	0778490
	931 664	8 cm	1 Binde	60	0778509
	931 665	10 cm	1 Binde	60	0778515
	931 666	12 cm	1 Binde	30	0778521







Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalsbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden





# Varolast® Plus

## Die gebrauchsfertige Zinkleimbinde



Die für den Einmalgebrauch vorgesehene, unsterile Zinkleimbinde, wird als halbstarrer Stützverband und als Kompressionsverband verwendet. Sie kann zur Langzeitbehandlung im Rahmen der Kompressionstherapie bei chronischen Venenerkrankungen, thromboembolischen Venenerkrankungen, Ödemen und anderen Indikationen angewendet werden. Diese Zinkleimbinde ist ausschließlich bei einem ABPI von 0,8–1,3 indiziert. Darüber hinaus kann sie als Stütz- und Entlastungsverband nach Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparats bzw. zur Anschlussbehandlung nach einem Gipsverband verwendet werden.

### Produkteigenschaften

Die gebrauchsfertige Zinkleimbinde besteht aus einem Trägermaterial (Viskose und Polyamid) sowie einem Zinkleim (enthält Zinkoxid und Glycerin). Varolast Plus ist gut formbar, passt sich gut an die Anatomie der Extremität an und ist angenehm zu tragen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Varolast® Plus; einzeln im Folienbeutel und einzeln in der Faltschachtel (Länge gedehnt)	931 582	8 cm x 5 m	1 Binde	16	2724038
	931 583	10 cm x 7 m	1 Binde	20	2724067
	931 585	10 cm x 10 m	1 Binde	20	2724096
Varolast® Plus; einzeln im Folienbeutel und in der Multipack-Faltschachtel* (Länge gedehnt)	931589	8 cm x 5 m	16 Binden	2	2724044
	931587	10 cm x 7 m	20 Binden	2	2724073
	931588	10 cm x 10 m	20 Binden	2	2724104

\*Mindestverkaufsmenge = 1 Versandeinheit (= 2 Faltschachteln à 16 bzw. 20 Binden)



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungsverband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband



Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalsbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden





# Idealflex® Universal

Die leichte Universalbinde mit dem hohen Baumwollanteil



Idealflex Universalbinden sind unsterile Binden zur Fixierung primärer und sekundärer Wundverbände, Schienen und Gipsverbände. Zudem werden sie zur Stabilisierung von Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken mit geringfügiger Immobilisationswirkung sowie zur leichten Kompressionswirkung bei Erkrankungen oder Verletzungen des Skelettmuskelsystems (wie Verstauchungen und Zerrungen) oder Hämatomen eingesetzt. Diese Binden sind insbesondere für konische und runde Teile des Körpers bei medizinischen Eingriffen geeignet, auch bei der langfristigen Behandlung von akuten und chronischen Wunden.



### Produkteigenschaften

Dauerelastische, leichte Universalbinde, Dehnbarkeit ca. 95 %; besonders atmungsaktiv und hautfreundlich; leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; 64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Idealflex® Universal; gedehnt 5 m lang, lose in der Faltschachtel	931 271	6 cm	10 Binden	28	2884693
	931 272	8 cm	10 Binden	18	2884701
	931 273	10 cm	10 Binden	21	2884718
	931 274	12 cm	10 Binden	23	2884724
	931 275	15 cm	10 Binden	18	2884730
	931 276	20 cm	10 Binden	8	2884747

Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungsverbände

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband

# Idealast®

Die dauerelastische Idealbinde, die nicht ausleiert



Idealast Binden sind unsterile Binden zur Fixierung primärer und sekundärer Wundverbände, Schienen und Gipsverbände. Zudem werden sie zur Stabilisierung von Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken mit geringfügiger Immobilisationswirkung sowie zur leichten Kompressionswirkung bei Erkrankungen oder Verletzungen des Skelettmuskelsystems (wie Verstauchungen und Zerrungen) oder Hämatomen eingesetzt. Diese Binden sind insbesondere für konische und runde Teile des Körpers bei medizinischen Eingriffen geeignet, auch bei der langfristigen Behandlung von akuten und chronischen Wunden.



#### Produkteigenschaften

Dauerelastische Idealbinde mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 85 %; kein Ausleiern der Binden beim Tragen; waschbar bis 60 °C; 64 % Baumwolle, 34 % Polyamid, 2 % Elasthan.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Idealast®; gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt in Cellophan; 10 Binden unterverpackt in der Faltschachtel*</b>	931 143	6 cm	10 Binden	16 (x 10)	1738162
	931 144	8 cm	10 Binden	12 (x 10)	1738179
	931 145	10 cm	10 Binden	10 (x 10)	1455205
	931 146	12 cm	10 Binden	8 (x 10)	1738185
<b>Idealast®; gedehnt 5 m lang, einzeln in Cellophan; lose im Karton</b>	931 153	6 cm	1 Binde	120	0778337
	931 154	8 cm	1 Binde	90	0778343
	931 155	10 cm	1 Binde	72	0778366
	931 156	12 cm	1 Binde	60	0778372
	931 157	15 cm	1 Binde	48	0778389
	931 158	20 cm	1 Binde	36	2173408

\* Mindestverkaufsmenge 1 Faltschachtel (=10 Binden)







# Idealast®-haft / Idealast®-haft color

Die dauerelastische Idealbinde mit sicherer Haftkraft



Idealast-haft Binden sind unsterile Binden zur Fixierung primärer und sekundärer Wundverbände, Schienen und Gipsverbände. Zudem werden sie zur Stabilisierung von Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken mit geringfügiger Immobilisationswirkung sowie zur leichten Kompressionswirkung bei Erkrankungen oder Verletzungen des Skelettmuskelsystems (wie Verstauchungen und Zerrungen) oder Hämatomen eingesetzt. Diese Binden sind insbesondere für konische und runde Teile des Körpers bei medizinischen Eingriffen geeignet, auch bei der langfristigen Behandlung von akuten und chronischen Wunden.

### Produkteigenschaften

Kohäsive, dauerelastische Idealbinde mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt, mit mikropunktuelle latexfreier Beschichtung für rutschfesten Sitz; atmungsaktiv; aus 93 % Baumwolle, 5 % Polyamid, 2 % Polyurethan.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Farbe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Idealast®-haft; gedehnt 4 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	931 110	6 cm	weiß	1 Binde	40	1457500
	931 111	8 cm	weiß	1 Binde	40	1457517
	931 112	10 cm	weiß	1 Binde	40	1457523
	931 113	12 cm	weiß	1 Binde	40	1457546
<b>Idealast®-haft color; ungedehnt 2,5 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	931 090	4 cm	blau	1 Binde	70	4174576
	931 091	6 cm	blau	1 Binde	48	4174582
	931 092	8 cm	blau	1 Binde	27	4174599
	931 093	10 cm	blau	1 Binde	30	4174607
	931 095	4 cm	rot	1 Binde	70	4174613
	931 096	6 cm	rot	1 Binde	48	4174636
	931 097	8 cm	rot	1 Binde	27	4174642
	931 098	10 cm	rot	1 Binde	30	4174659

Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungsverband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband



Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalsbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden



# Peha-haft®

## Die kohäsive, elastische Fixierbinde



Peha-haft ist geeignet zur kurz- und langfristigen Versorgung von akuten oder chronischen Wunden sowie zur leichten Immobilisation in Kombination mit anderen Medizinprodukten; insbesondere zum Fixieren aller Arten von Primär- und Sekundärverbänden, Schienen, Gipsverbänden, Kathetern und Kanülen etc., speziell an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen.



### Produkteigenschaften

Die kohäsive, elastische Fixierbinde ist sehr angenehm zu tragen – sie haftet nur auf sich selbst und nicht auf Haut, Haaren und Kleidung; das Material ist luftdurchlässig und besteht zu 37 % aus Baumwolle. Bereits wenige Touren bieten einen sicheren Halt ohne zu verrutschen. Peha-haft ist in weiß, rot und blau erhältlich.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Farbe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Peha-haft®; gedehnt 4 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	932 441	4 cm	weiß	1 Binde	140	3328215
	932 442	6 cm	weiß	1 Binde	140	3328221
	932 443	8 cm	weiß	1 Binde	140	3328238
	932 444	10 cm	weiß	1 Binde	140	3328244
	932 445	12 cm	weiß	1 Binde	140	3328250
<b>Peha-haft®; gedehnt 20 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	932 446	4 cm	weiß	1 Rolle	24	3328273
	932 447	6 cm	weiß	1 Rolle	24	3328296
	932 448	8 cm	weiß	1 Rolle	24	3328304
	932 449	10 cm	weiß	1 Rolle	24	3328310
	932 450	12 cm	weiß	1 Rolle	24	3328327
<b>Peha-haft®; gedehnt 20 m lang, Rollen lose in der Faltschachtel</b>	932 437	6 cm	weiß	6 Rollen	12	3328356
	932 438	8 cm	weiß	6 Rollen	12	3328362
	932 439	10 cm	weiß	6 Rollen	8	3328385
<b>Peha-haft® Color; gedehnt 20 m lang, einzeln in der Faltschachtel</b>	932 460	6 cm	rot	1 Rolle	24	3879783
	932 461	8 cm	rot	1 Rolle	24	3879808
	932 462	10 cm	rot	1 Rolle	24	3879814
	932 473	6 cm	blau	1 Rolle	24	3879820
	932 474	8 cm	blau	1 Rolle	24	3879837
932 475	10 cm	blau	1 Rolle	24	3879843	





# Peha®-Mullbinden

Die traditionelle und universelle Fixierbinde



**Peha-Mullbinden sind geeignet für Fixierungen aller Art, z. B. von Wundauflagen.**

### Produkteigenschaften

Die starre Fixierbinde besteht zu 40 % aus Baumwolle und zu 60 % aus Viskose. Das Bindengewebe ist luftdurchlässig und besteht aus gewebten Kanten.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Peha®-Mullbinde; 4 m lang, einzeln in Cellophan verpackt; 20 Binden unterverpackt in der Faltschachtel</b>	304 040	4 cm	20 Binden	36 (x 20)	4174429
	304 041	6 cm	20 Binden	24 (x 20)	4174435
	304 042	8 cm	20 Binden	18 (x 20)	4174441
	304 043	10 cm	20 Binden	8 (x 20)	4174458
	304 044	12 cm	20 Binden	18 (x 20)	4174464
<b>Peha®-Mullbinde; 4 m lang, lose in der Faltschachtel</b>	304 050	4 cm	20 Binden	36 (x 20)	4174470
	304 051	6 cm	20 Binden	24 (x 20)	4174487
	304 052	8 cm	20 Binden	18 (x 20)	4174493
	304 053	10 cm	20 Binden	8 (x 20)	4174501
	304 054	12 cm	20 Binden	20 (x 20)	4174518
	304 055	15 cm	20 Binden	10 (x 20)	4174524





# Peha-fix®

Die superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil



Die hochelastische Fixierbinde ist geeignet für Fixierungen aller Art, besonders an Gelenken, sowie an konischen und runden Körperteilen.

### Produkteigenschaften

Das weiche Spezialgewebe von Peha-fix besteht zu 70 % aus Viskose und 30 % Polyamid; es ist leicht, luftdurchlässig und angenehm zu tragen. Peha-fix ist schnell und einfach anzulegen; sie bietet einen zuverlässigen und rutschfesten Sitz.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Peha-fix®; gedehnt 4 m lang, einzeln in Cellophan verpackt; 20 Binden in der Faltschachtel unterverpackt</b>	303 070	4 cm	20 Binden	8 (x 20)	4902797
	303 071	6 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902805
	303 072	8 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902811
	303 073	10 cm	20 Binden	6 (x 20)	4902828
	303 074	12 cm	20 Binden	4 (x 20)	4902834
<b>Peha-fix®; gedehnt 4 m lang, lose in der Faltschachtel</b>	303 075	4 cm	20 Binden	8 (x 20)	4902840
	303 076	6 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902857
	303 077	8 cm	20 Binden	10 (x 20)	4902863
	303 078	10 cm	20 Binden	6 (x 20)	4902886
	303 079	12 cm	20 Binden	4 (x 20)	4902892





Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden



# Stülpa®

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz



Stülpa Schlauchverbände können als Unterzug zum Schutz der Haut bei Zinkleim-, Gips-, Pflaster- und Klebeverbänden oder als Überzug zum Schutz und zur Fixierung von Verbänden eingesetzt werden.

### Produkteigenschaften

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband besteht zu 30 % aus Baumwolle und 70 % aus Viskose. Stülpa ist leicht anzulegen und kann an jeder beliebigen Stelle geschnitten werden, ohne dass Laufmaschen entstehen. Stülpa ist erhältlich auf der Rolle oder als Fertigverband gebrauchsfertig abgemessen.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Stülpa® Rollen; Rollen zu 15 m, im Entnahmekarton	427 110	Gr. 0 R	1 Rolle	33	0823813
	427 111	Gr. 1 R	1 Rolle	27	0823836
	427 112	Gr. 2 R	1 Rolle	12	0711942
	427 113	Gr. 3 R	1 Rolle	9	0711959
	427 114	Gr. 4 R	1 Rolle	17	0823842
	427 115	Gr. 5 R	1 Rolle	6	0711965
	427 146	Gr. 6 R	1 Rolle	4	5229078
	427 147	Gr. 7 R	1 Rolle	6	5229084
	427 148	Gr. 8 R	1 Rolle	6	5229090
Stülpa® Fertigverbände; einzeln in Cellophan verpackt und unterverpackt in der Faltschachtel	427 211	Gr. 1	20 Stück	20 (x 20)	0823747
	427 213	Gr. 3	10 Stück	30 (x10)	0823776
	427 214	Gr. 4	10 Stück	25 (x 10)	0823799
Stülpa® Fertigverbände; lose in der Faltschachtel	427 261	Gr. 1	50 Stück	20 (x50)	0823753
	427 253	Gr. 3	10 Stück	33 (x10)	0823782
	427 254	Gr. 4	10 Stück	16 (x10)	0823807

### Größentabelle (Breiten ungedehnt)

- Gr. 0 (1,5 cm breit) = Kinderfinger- & Zehenverbände
- Gr. 1 (2,5 cm breit) = Fingerverbände
- Gr. 2 (6,0 cm breit) = Arm-, Kinderfuß- & Kinderbeinverbände
- Gr. 3 (8,0 cm breit) = Hand-, Fuß- & Beinverbände, Kinderkopf- & Achselhöhlenverbände
- Gr. 4 (10 cm breit) = Kopf-, Bein- & Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
- Gr. 5 (12 cm breit) = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel & Achselhöhlenverbände, Streckverbände
- Gr. 6 (15 cm breit) = Kinderrumpf- & Oberschenkelverbände
- Gr. 7 (21 cm breit) = Desault-, Rumpf- & übergroße Oberschenkelverbände
- Gr. 8 (24 cm breit) = Desault- & Rumpfverbände



# Stülpa-fix®

Der hochelastische Netzschlauchverband mit dem hohen Baumwollanteil



Für Fixierverbände aller Art und Größe.

### Produkteigenschaften

Hochelastischer Netzschlauchverband mit 68 % Baumwollanteil; ohne komplizierte Verbandstechniken schnell und einfach anzulegen; sichere und dauerhafte Fixierung; lässt sich an jeder beliebigen Stelle durchtrennen, ohne weiter einzureißen oder auszufransen; aus 68 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 8 % Elastan.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Stülpa-fix®; Rollen zu 25 m, im Entnahmekarton	932 541	Gr. 1	1 Rolle	19	1734566
	932 542	Gr. 2	1 Rolle	16	1734572
	932 543	Gr. 3	1 Rolle	12	1734589
	932 544	Gr. 4	1 Rolle	8	1734595
	932 545	Gr. 5	1 Rolle	6	1734603
	932 546	Gr. 6	1 Rolle	4	1734626
	932 547	Gr. 7	1 Rolle	4	4792570

### Größentabelle (Breiten ungedehnt)

- Gr. 1 (ca. 1 cm breit) = Einfingerverbände
- Gr. 2 (ca. 2 cm breit) = Mehrfingerverbände
- Gr. 3 (ca. 3 cm breit) = Hand- und Armverbände, Kinderkopfverbände
- Gr. 4 (ca. 4 cm breit) = Bein- und Fußverbände, Kinderrumpfverbände
- Gr. 5 (ca. 6,5 cm breit) = Kopf- und Kinderrumpfverbände
- Gr. 6 (ca. 8,5 cm breit) = Rumpfverbände
- Gr. 7 (ca. 11 cm breit) = große Rumpfverbände



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungsverband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband





# Coverflex® fast

## Der ideale Schlauchverband zur Fett-Feucht-Therapie



Als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems, als Trockenverband in der chronischen Phase zur Abdeckung von Salben und Cremes; als Unter- oder Überzug bei Zinkleim und Gipsverbänden; zur Fixierung von Primärverbänden bei der Behandlung von akuten und chronischen Wunden.



### Produkteigenschaften

Coverflex fast ist ein dauerelastischer Schlauchverband, nahtlos rundgestrickt und besteht zu 91 % aus Viskose, die elastischen Fäden aus Polyurethan sind mit Polyamid-Garn überzogen. Coverflex fast ist einfach anzulegen und schützt die Haut und Wundauflage vor Schmutz und Feuchtigkeit von außen; in Kombination mit Salben wird das Durchsickern auf Wäsche und Kleider verhindert. Coverflex fast ist in mehreren Größen erhältlich – eingewebte Farbstreifen geben die entsprechende Größe an.

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Coverflex® fast; Rollen zu 10 m im Entnahmekarton	931 025	Gr. 1 (3,5 cm)	1 Rolle	81	4902900
	931 026	Gr. 2 (5 cm)	1 Rolle	54	4902917
	931 027	Gr. 3 (7,5 cm)	1 Rolle	36	4902923
	931 028	Gr. 4 (10,75 cm)	1 Rolle	27	4902946
	931 029	Gr. 5 (17,5 cm)	1 Rolle	18	4902952

### Größentabelle

- **Gr. 1 Farbcode rot;** für Umfang 8-15 cm bei Kinderarm, -fuß
- **Gr. 2 Farbcode grün;** für Umfang 10-25 cm bei Kinderbein, Arm
- **Gr. 3 Farbcode blau;** für Umfang 20-45 cm bei Kinderkopf, Arm, Unterschenkel
- **Gr. 4 Farbcode gelb;** für Umfang 35-65 cm bei Kinderrumpf, Kopf, Bein
- **Gr. 5 Farbcode beige;** für Umfang 50-120 cm bei Rumpf

Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalsalbinde

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungs-  
verband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband

# Coverflex® grip

Die dauerelastische Schlauchbandage zum Stützen und Fixieren



Die elastische Schlauchbandage wird zur stärker komprimierenden Fixierung von Verbänden, als Hautschutz unter Gipsverbänden und zur Unterstützung und Entlastung von Gelenken und Bändern verwendet. Das Produkt ist nicht zur Kompressionstherapie vorgesehen.

### Produkteigenschaften

Coverflex grip ist schnell und einfach anzulegen – durch den hohen Anteil an Baumwolle (82 % ungebleichte Baumwolle) ist die Schlauchbandage sehr angenehm zu tragen und hautfreundlich. Coverflex grip ist in mehreren Größen erhältlich.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Coverflex® grip; Rollen zu 10 m im Entnahmekarton	931 065	Gr. A	1 Rolle	36	4902969
	931 066	Gr. B	1 Rolle	24	4902975
	931 067	Gr. C	1 Rolle	24	4902981
	931 068	Gr. D	1 Rolle	20	4902998
	931 069	Gr. E	1 Rolle	18	4903006
	931 070	Gr. F	1 Rolle	14	4903012
	931 071	Gr. G	1 Rolle	14	4903029
	931 072	Gr. J	1 Rolle	8	4903035
	931 073	Gr. K	1 Rolle	8	4903041
	931 074	Gr. L	1 Rolle	6	4903058
	931 075	Gr. M	1 Rolle	6	4903064

### Größentabelle (Breiten ungedehnt)

- **Gr. A (ca. 4,2 cm breit)** = Kinderhand- & Kinderarmverbände
- **Gr. B (ca. 6,25 cm breit)** = kleine Hand-, Arm- & Fußverbände
- **Gr. C (ca. 6,75 cm breit)** = mittelgroße Hand-, Arm-, Fuß- & Unterschenkelverbände
- **Gr. D (ca. 7,5 cm breit)** = große Hand-, Arm-, Fuß- & Unterschenkelverbände
- **Gr. E (ca. 8,75 cm breit)** = für Beinverbände, große Arm- & kleine Oberschenkelverbände
- **Gr. F (ca. 10 cm breit)** = Bein- & Oberschenkelverbände
- **Gr. G (ca. 12 cm breit)** = große Oberschenkelverbände
- **Gr. J (ca. 17,5 cm breit)** = kleine Rumpfverbände
- **Gr. K (ca. 21,5 cm breit)** = mittelgroße Rumpfverbände
- **Gr. L (ca. 32,5 cm breit)** = große Rumpfverbände
- **Gr. M (ca. 37,5 cm breit)** = sehr große Rumpfverbände

# Verba®

## Der postoperative Stützverband mit der flächenhaften Druckverteilung



Zur postoperativen Versorgung nach Thorax- und Abdomenoperationen, zur Entlastung der Wunden, zur Verhinderung von Narbenbrüchen und zur Frühmobilisation des Patienten. Als Stützverband bei Thoraxtraumen wie Brustkorbprellungen oder Rippenbrüchen, zur Korrektur bei Statik der Wirbelsäule bei Wurzelischias und Bandscheibenvorfall.



### Produkteigenschaften

Der postoperative Stützverband ist 25 cm breit, mit Klettverschluss; die Längselastizität und Querstabilität gewährleisten eine gleichmäßige, flächenhafte Druckverteilung, die die Atmung nicht behindert; Verba sitzt sicher ohne Wulst- und Faltenbildung und kann einfach angelegt werden – durch den Klettverschluss kann die Wundauflage schnell gewechselt werden; Farbstreifen kennzeichnen die Größen; Verba ist gut hautverträglich, luftdurchlässig und ist waschbar bei 95°C (liegend trocknen).

Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Verba®	932 531	Gr. 1	1 Stück	15	1164620
	932 532	Gr. 2	1 Stück	15	1164637
	932 533	Gr. 3	1 Stück	15	1164643
	932 534	Gr. 4	1 Stück	15	1164666
	932 535	Gr. 5	1 Stück	15	1164672

### Größentabelle (Breiten ungedehnt)

- **Größe 1:** 65-75 cm Körperumfang
- **Größe 2:** 75-85 cm Körperumfang
- **Größe 3:** 85-95 cm Körperumfang
- **Größe 4:** 95-105 cm Körperumfang
- **Größe 5:** 105-115 cm Körperumfang



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungsverband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband



Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalsbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden





# Safix® plus

## Die Gipsbinde und -longuette



**Für zirkuläre Gipsverbände, Anschienung bzw. externe Immobilisation.**

### Produkteigenschaften

Safix plus besteht aus Naturgips ( $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2 \text{H}_2\text{O}$ ) und einem Trägermaterial aus Baumwolle. Der gleichmäßige Gipsauftrag gewährleistet eine schnelle Durchfeuchtung, eine ausgezeichnete Geschmeidigkeit und Modellierbarkeit. Die Gipsbinde zeichnet sich durch eine kurze Tauchzeit von ca. 3 Sekunden bei 20 °C Wassertemperatur aus – die Modellierzeit beträgt ca. 2-3 Minuten, die Abbindezeit ca. 4-5 Minuten. Nach 30 Minuten sind die Gips- und Longuettenverbände vorsichtig belastbar. Safix plus kann mit einer Gipsschere oder Gipssäge geschnitten und entfernt werden.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
<b>Safix® plus; 2 m lang, Gipsbinden eingesiegelt zu 2 Binden</b>	332 730	6 cm	2 Binden	28	4250478
<b>Safix® plus; 2,7 m lang, Gipsbinden eingesiegelt zu 2 Binden</b>	332 731	8 cm	2 Binden	15	4250484
	332 732	10 cm	2 Binden	12	4250490
	332 733	12 cm	2 Binden	10	4250509
	332 734	15 cm	2 Binden	8	4250515
	332 735	20 cm	2 Binden	6	4250521
<b>Safix® plus; 3 m lang, Gipsbinden eingesiegelt zu 2 Binden</b>	332 739	5 cm	2 Binden	24	4250538
	332 740	8 cm	2 Binden	15	4250544
	332 741	10 cm	2 Binden	12	4250550
	332 742	12 cm	2 Binden	10	4250567
	332 743	14 cm	2 Binden	10	4250573
	332 744	15 cm	2 Binden	8	4250596
	332 745	20 cm	2 Binden	6	4250604
<b>Safix® Gipslonguetten; Zickzack-Lagen zu 20 m, 4fach, in Entnahmekartons</b>	332 790	10 cm	1 Stück	1	4250610
	332 791	12 cm	1 Stück	1	4250627
	332 792	15 cm	1 Stück	1	4250633
	332 793	20 cm	1 Stück	1	4250656

Mindestbestellmenge entspricht 1 kompletten Versandeinheit!



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungsverband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband



Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalsbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden



# Rolta® soft

Die Synthetik-Wattebinde für perfektes Polstern



Rolta soft wird als Polstermaterial, z. B. zur Kompressionstherapie oder bei Immobilisierung mit steifen Materialien, wie Schienen oder Gipsverbänden, verwendet.

### Produkteigenschaften

Rolta soft ist eine Synthetik-Wattebinde aus gekräuselten Polyesterfasern, ist luftdurchlässig und von Hand abreißbar. Rolta soft schützt die abgedeckten Körperteile dank der Eigenschaften der Synthetikfasern vor mechanischen Schäden.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Rolta® soft; 3 m lang, einzeln banderoliert, in der Faltschachtel	932 048	6 cm	50 Binden	1	2368980
	932 049	10 cm	30 Binden	1	2368997
	932 050	15 cm	20 Binden	1	2369005
	932 051	25 cm	10 Binden	1	2369011



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungsverbände

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband





Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalsbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden





# Omnitape®

Das starke Tape für professionelle Verbände



Für funktionelle Verbände, z. B. zur Gelenkstabilisierung, insbesondere bei Bänderschädigungen; zur Stützung und Entlastung verletzter Muskeln; zur konservativen Behandlung von Luxationen usw.; zur Prophylaxe und zum Aufbau-training in der Sportmedizin.

### Produkteigenschaften

Das Trägermaterial besteht aus einem Viskose-Textil-Gemisch, beschichtet mit einem Zinkoxid-Kautschuk-Kleber (latexhältig!); außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung von Gelenken und Bändern; starke Haftung, durch die gezackten Kanten mühelos von Hand abreißbar; in weiß.



Artikel	Art.-Nr.	Größe	Originalpackung	Versand-Einh. in Pkg.	PHZNR
Omnitape®; 10 m lang, auf Kunststoffspulen, einzeln in der Faltschachtel	500 058	2 cm	1 Spule	96	1520322
	500 059	3,75 cm	1 Spule	96	1520339
	500 060	5 cm	1 Spule	48	1520345



Kompressionsbinden

Zinkleimbinde

Universalbinden

Fixierbinden

Netz- und Schlauchverbände

Wundentlastungs-  
verband

Gipsbinde

Polsterbinde

Tapeverband







# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## HARTMANN Österreich

Für die Lieferungen der PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. sind die folgenden Geschäftsbedingungen verbindlich: Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

### Preise und Lieferbedingungen

1. Lieferungen erfolgen zu den Preisen der jeweils gültigen Preisliste. Die Preise schließen die Verpackungskosten ein und verstehen sich exkl. MWSt. Die Lieferung ab einem Wert von EURO 150,- erfolgt frachtfrei Bestimmungsort. Unter einem Auftragswert von EURO 150,- wird eine Versandpauschale von EURO 15,- verrechnet. Wir behalten uns vor, den Versand jeweils auf die für uns günstigste Frachtart durchzuführen.
2. Verlangt der Käufer eine von der gewöhnlichen Versandart abweichende Beförderung, zum Beispiel als Eilgut, so gehen die Mehrkosten zu seinen Lasten.
3. Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Kunden. Versicherungen aller Art erfolgen nur auf Anordnung und Kosten des Bestellers.
4. Unvorhergesehene Ereignisse wie höhere Gewalt, Brandschaden, Maschinenschaden, Betriebsstörung, unverschuldeter Mangel an Rohstoffen usw. entbinden uns von jeder Lieferpflicht.

### Mängelansprüche

5. Die von uns gelieferte Ware ist nach Möglichkeit zeitnah auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu kontrollieren. Eine diesbezügliche Reklamation wird von uns nur bis 3 Tage nach der Lieferung anerkannt.
6. Rücksendungen, die nicht auf Mängeln beruhen, werden ohne unsere vorherige Zustimmung nicht angenommen. Für die Bearbeitung dieser Rücksendungen werden die Fracht- und Handlingkosten allenfalls in Rechnung gestellt.
7. Sonderanfertigungen, Anbruchpackungen und nicht mehr verkaufsfähige Ware sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

### Zahlungsbedingungen

8. Der Kaufpreis ist innerhalb der vereinbarten Fristen zur Zahlung fällig. Ein Skontoabzug ist nur nach Maßgabe der einschlägigen Angaben auf der Rechnung zulässig. Als Zahlung für den Skontoabzug gilt der Tag des Geldeinganges bei uns bzw. der Tag der Gutschrift auf einem unserer Bankkonten.
9. Bei Zielüberschreitungen werden die gesetzlichen Verzugszinsen (<https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991716.html>) berechnet.
10. Der Kunde verpflichtet sich, die Kosten einer etwaigen Eintreibung voll zu ersetzen.
11. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.

### Allgemeines

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wiener Neustadt.
13. Landesgericht Wiener Neustadt F.Nr. 108-527-Z
14. DVR Nr. 052-1159
15. UID Nr. ATU 1944 7506
16. Durch diese Bestimmungen werden alle früheren Ausgaben außer Kraft gesetzt

### Elektronische Werbung

17. Wir senden unseren Kunden elektronische Post (per E-Mail, SMS, Messenger etc.) zur Bewerbung unserer Produkte oder Dienstleistungen („werbliche Nachrichten“) zu.
18. Der Kunde kann der Zusendung werblicher Nachrichten jederzeit widersprechen, indem dieser eine E-Mail mit dem Widerspruch an uns sendet. Wir werden Ihnen auch mit jeder werblichen Nachricht die Möglichkeit eröffnen, die Zusendung weiterer werblicher Nachrichten abzulehnen.
19. Rechtsgrundlage für die Zusendung werblicher Nachrichten ist § 174 Abs 4 TKG 2021.

### Allgemeine Regulatorische Bedingungen (Persönliche Schutzausrüstung)

Diese Allgemeinen Regulatorischen Bedingungen („ARB/PSA“) beziehen sich auf Produkte, die als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) i.S.v. Art. 3 Nr. 1 der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 klassifiziert sind und deren Hersteller die Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, oder eine ihrer Konzerngesellschaften ist („Produkte“).

Die ARB/PSA werden gestellt von der Paul Hartmann AG, wenn diese selbst Produkte an den Händler verkauft, oder von einer ihrer Konzerngesellschaften, wenn diese Produkte an den Händler verkaufen (gemeinsam „HARTMANN“).

Die ARB/PSA gelten für „Händler“, d.h. solche natürlichen oder juristischen Personen in der Lieferkette, die Produkte bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem Markt bereitstellen, ohne dabei selbst Hersteller oder Importeure solcher Produkte zu sein.





Die ARB/PSA erfassen die Tätigkeiten von Händlern bezüglich des Erwerbs, Besitzes und der Lieferung von Produkten.

Die ARB/PSA gelten unbeschadet der Liefer- und Zahlungsbedingungen von HARTMANN. Der Händler erkennt die Geltung dieser ARB/PSA durch die Erteilung des Auftrages für die Produkte oder die Entgegennahme der Produkte an. Diese ARB/PSA gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte über Produkte mit dem Händler.

1. Wenn dem Händler bezüglich von ihm auf dem Markt bereit gestellter Produkte irgendwelche Beschwerden, Berichte über mutmaßliche Risiken und/oder Fälle nicht-konformer Produkte, insbesondere Verfehlung grundlegender Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen (gemeinsam „besondere Vorfälle“) bekannt werden, so unterrichtet der Händler HARTMANN hierüber unverzüglich und leitet dabei - mit Schwärzung personenbezogener Daten - mindestens folgende Informationen an HARTMANN weiter: [a] Betroffenes Produkt (nach Artikel-/ Chargen-Nr., Anzahl), [b] Art und Hintergründe des besonderen Vorfalles, [c] aktueller bekannter Aufenthaltsort des betroffenen Produkts, [d] Art und Umfang etwaig berichteter Gesundheitsschäden. Die unverzügliche Unterrichtung muss spätestens 36 Stunden nach Bekanntwerden des besonderen Vorfalles erfolgen; bei Bedarf sind ausführliche Berichte an HARTMANN nachzureichen.
2. Das Begriffsverständnis von „Beschwerden“, „Risiken“, „nicht-konformen Produkt“, „grundlegender Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen“ richtet sich nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
3. Der Händler führt systematische Aufzeichnungen, welche die Rückverfolgbarkeit der an den Händler gelieferten und von ihm auf dem Markt bereit gestellten Produkte gewährleisten („Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen“). Hierbei dokumentiert der Händler mindestens: [a] Art des Produkts (nach Artikel-/ Chargen-Nr.), [b] Empfänger, [c] Menge, [d] Versanddatum, [e] eigener Lagerort, falls noch nicht versandt.
4. Sofern der Händler von Behörden Ersuchen um Unterlagen oder Informationen zum Nachweis der Konformität von Produkten erhält, leitet er diese Ersuchen unverzüglich an HARTMANN weiter; der Händler wird sich bei Beantwortung des behördlichen Ersuchens vorab mit HARTMANN abstimmen. Der Händler informiert HARTMANN ebenso unverzüglich, falls er von Behörden dahingehende Ankündigungen oder Aufforderungen erhält, dass korrektive Maßnahmen (wie Rückrufe oder Rücknahmen) vorzunehmen sind.
5. Ist der Händler der Auffassung oder hat Grund zur Annahme, dass mit einem von ihm auf dem Markt bereitgestellten Produkt ein Risiko verbunden ist oder dass es sich um ein nicht-konformes handelt und er deshalb dafür sorgen muss, dass Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, so informiert der Händler HARTMANN unverzüglich über den betreffenden Vorgang; hierbei legt der Händler gegenüber HARTMANN konkret dar, welche konkreten Umstände ihn zu der Auffassung bzw. Annahme bewegen. Dasselbe gilt, wenn der Händler aus vorgenannten Gründen beabsichtigt, Behörden über den Vorgang zu informieren. Der Händler führt Präventiv- oder Korrekturmaßnahmen (wie Rückrufe oder Rücknahmen von Produkten) nur in Abstimmung mit dem Hersteller durch.
6. Sofern der Hersteller von Produkten eine Präventiv- oder Korrekturmaßnahme trifft oder im Zusammenwirken mit Behörden eine solche durchführt (einschließlich Rücknahmen, Rückrufen, Versendung von sog. Field Safety Notices), wird der Händler hierbei HARTMANN (in dessen Eigenschaft als Hersteller oder als Wirtschaftsakteur im Lager des Herstellers) die gebotene Unterstützung leisten; dies geschieht insbesondere dadurch, dass der Händler unverzüglich mittels seiner Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen die Lieferwege betroffener Produkte identifiziert und vom Hersteller vorbereitete Benachrichtigungen (wie Field Safety Notices) an Stellen bzw. eigene Kunden, denen er die Produkte geliefert hat, weiterleitet.
7. Während sich Produkte in der Sachherrschaft des Händlers befinden, stellt der Händler sicher, dass die Lagerungs- und Transportbedingungen die Konformität der Produkte mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen nicht beeinträchtigen und mitgeteilten Vorgaben des Herstellers entsprechen; HARTMANN kann ggfs. vom Hersteller beauftragt werden, solche Vorgaben zu konkretisieren.
8. Bei Bereitstellung von Produkten auf dem Markt muss der Händler stets die geltende regulatorische Anforderung (insbes. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425) beachten und mit der erforderlichen Sorgfalt agieren.
9. Bevor der Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellt, überprüft er die Erfüllung folgender Anforderungen: Die/Den Produkte/n [a] tragen CE-Kennzeichnungen, [b] korrespondieren mit vom Hersteller beigefügten oder online bereitgestellten Konformitätserklärungen, [c] sind mit Identifikations-Kennzeichnungen (z.B. Chargen-Nr.) versehen, [d] sind Anleitungen und Informationen des Herstellers in (den) Landessprache(n) beigefügt, [e] sind im Falle von importierten Produkten mit den Angaben der Importeurs versehen (Name/Firma, Anschrift). HARTMANN trägt Sorge, dass dem Händler Kopien der Konformitätserklärungen gemäß obiger Anforderung [b] zur Verfügung gestellt werden, soweit diese nicht online gestellt wurden.
10. Dem Händler steht es frei, den für die Produkte zuständigen Wirtschaftsakteuren gesetzlich vorgesehene Informationen zu geben, Mitteilungen zu machen bzw. Berichte an diese weiterzuleiten und/oder mit diesen zusammenzuarbeiten, etwa für den Fall, dass - aufgrund Verschiedenheit von HARTMANN mit solchen Wirtschaftsakteuren - derartige Aktivitäten des Händlers nicht schon durch diese ARB/PSA dargestellt werden.



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## HARTMANN Österreich

### Allgemeine Regulatorische Bedingungen (Medizinprodukte)

Diese Allgemeinen Regulatorischen Bedingungen („ARB/MP“) beziehen sich auf Medizinprodukte (i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745) einschl. Zubehör, deren Hersteller die Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim oder eine ihrer Konzerngesellschaften ist („Produkte“).

Die ARB/MP werden gestellt von der Paul Hartmann AG, wenn diese selbst Produkte an den Händler verkauft, oder von einer ihrer Konzerngesellschaften, wenn diese Produkte an den Händler verkaufen (gemeinsam „Hartmann“).

Die ARB/MP gelten für „Händler“, d.h. solche natürliche oder juristische Personen in der Lieferkette, die Produkte bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem Markt bereitstellen, ohne dabei selbst Hersteller oder Importeure solcher Produkte zu sein.

Die ARB/MP erfassen die Tätigkeiten von Händlern bezüglich des Erwerbs, Besitzes und der Lieferung bzw. der Bereitstellung auf dem Markt von Produkten.

Die ARB/MP gelten unbeschadet der Liefer- und Zahlungsbedingungen von Hartmann und sind für alle Produkte, die der Händler ab dem 26. Mai 2021 auf dem Markt bereitstellt, anwendbar. Der Händler erkennt die Geltung dieser ARB/MP durch die Erteilung des Auftrages für die Produkte oder die Entgegennahme der Produkte an. Diese ARB/MP gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte über Produkte mit dem Händler.

1. Wenn dem Händler bezüglich von ihm auf dem Markt bereit gestellter Produkte irgendwelche Beschwerden, mutmaßliche Vorkommnisse und/oder Fälle nicht-konformer Produkte (gemeinsam „besondere Vorfälle“) bekannt werden, so unterrichtet der Händler Hartmann hierüber unverzüglich und leitet dabei - mit Schwärzung personenbezogener Daten - mindestens folgende Informationen an Hartmann weiter: [a] Betroffenes Produkt (nach Artikel-/ Lot-Nr., ggfs. UDI, Anzahl), [b] Art und Hintergründe des besonderen Vorfalles, [c] aktueller bekannter Aufenthaltsort des betroffenen Produkts, [d] Art und Umfang etwaig berichteter Gesundheitsschäden. Die unverzügliche Unterrichtung muss spätestens 36 Stunden nach Bekanntwerden des besonderen Vorfalles erfolgen; bei Bedarf sind ausführliche Berichte an Hartmann nachzureichen.
2. Dieselbe Pflicht zur Unterrichtung wie nach Ziffer 1 gilt, und zwar gleichgültig, ob der Händler betreffende Produkte schon auf dem Markt bereit gestellt hat oder nicht, wenn der Händler der Auffassung ist oder Grund zur Annahme hat, dass es sich bei einem an ihn gelieferten Produkt um ein nicht-konformes Produkt handelt und/oder von einem Produkt eine schwerwiegende Gefahr ausgeht und/oder ein gefälschtes Produkt vorliegt.
3. Das Begriffsverständnis von „Beschwerden“, „Vorkommnissen“, „Konformität“, „nicht-konformen Produkt“, „schwerwiegender Gefahr“ und „gefälschtem Produkt“ richtet sich nach der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.
4. Der Händler führt systematische Aufzeichnungen (sog. „Register“), worin mindestens alle aus dem Markt eingegangenen Beschwerden und alle Fälle nicht-konformer Produkte registriert werden. Das Register soll dabei die Informationen nach Ziffer 1 [a], [b], [c], [d] beinhalten. Der Händler gewährt Hartmann Einsicht in das Register und stellt Hartmann aus gegebenem Anlass und auf Verlangen Kopien davon zur Verfügung.
5. Der Händler führt neben dem Register auch systematische Aufzeichnungen, welche die Rückverfolgbarkeit der an den Händler gelieferten und von ihm auf dem Markt bereit gestellten Produkte gewährleisten („Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen“). Hierbei dokumentiert der Händler mindestens: [a] Art des Produkts (nach Artikel-/ Lot-Nr., ggfs. UDI), [b] Empfänger, [c] Menge, [d] Versanddatum, [e] eigener Lagerort, falls noch nicht versandt. Der Händler bewahrt die Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen für zehn Jahre auf, nachdem er das letzte Produkt auf dem Markt bereit gestellt hat.
6. Sofern der Händler von Behörden Ersuchen um Unterlagen oder Informationen zum Nachweis der Konformität von Produkten erhält, leitet er diese Ersuchen unverzüglich an Hartmann weiter; Hartmann darf die Beantwortung des behördlichen Ersuchens an sich ziehen. Der Händler informiert Hartmann ebenso unverzüglich und stimmt sich mit Hartmann ab, falls er von Behörden dahingehende Ankündigungen oder Aufforderungen erhält, dass korrektive Maßnahmen (wie Rückrufe oder Rücknahmen) vorzunehmen oder unentgeltliche Produkt-Proben abzuliefern sind.
7. Ist der Händler der Auffassung oder hat Grund zur Annahme, dass von einem Produkt eine schwerwiegende Gefahr ausgeht oder dass es sich um ein nicht-konformes oder gefälschtes Produkt handelt und er deshalb das Produkt nicht auf dem Markt bereitstellen darf, so informiert der Händler Hartmann unverzüglich über den betreffenden Vorgang; hierbei legt der Händler gegenüber Hartmann konkret dar, welche konkreten Umstände ihn zu der Auffassung bzw. Annahme bewegen. Dasselbe gilt, wenn der Händler aus vorgenannten Gründen beabsichtigt, Behörden über den Vorgang zu informieren. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Aussetzung der Bereitstellung von Produkten auf dem Markt und/oder einer Information an Behörden wird der Händler sich mit Hartmann vorab über die Aussetzung bzw. Information abstimmen.
8. Sofern der Hersteller von Produkten eine Präventiv- oder Korrekturmaßnahme trifft oder im Zusammenwirken mit Behörden eine solche durchführt (einschließlich Rücknahmen, Rückrufen, Versendung von sog. Field Safety Notices), wird der Händler hierbei dem Hartmann (in dessen Eigenschaft als Hersteller oder als Wirtschaftsakteur im Konzern des Herstellers) die gebotene Unterstützung leisten; dies geschieht insbesondere dadurch, dass der Händler unverzüglich mittels seiner Rückverfolgbarkeits-Aufzeichnungen die Lieferwege betroffener Produkte identifiziert und vom Hersteller vorbereitete Benachrichtigungen (wie Field



Safety Notices) an Stellen bzw. eigene Kunden, denen er die Produkte geliefert hat, weiterleitet. Dessen unbeschadet ist der Händler bereit, dem Hersteller der Produkte Informationen (wie z.B. Feedback von Produkt-Anwendern) bereit zu stellen, die im PMS (Post-Market-Surveillance) Plan des Herstellers vorgesehen sind.

9. Während sich Produkte in der Sachherrschaft des Händlers befinden, stellt der Händler sicher, dass die Lagerungs- und Transportbedingungen den Vorgaben des Herstellers entsprechen; Hartmann kann ggfs. vom Hersteller beauftragt werden, solche Vorgaben zu konkretisieren.
10. Bei Bereitstellung von Produkten auf dem Markt muss der Händler stets die geltenden regulatorischen Anforderungen (insbes. der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745) beachten und mit der erforderlichen Sorgfalt agieren.
11. Bevor der Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellt, überprüft er die Erfüllung folgender Anforderungen: Die/Den Produkte/n [a] tragen CE-Kennzeichnungen, [b] korrespondieren mit vom Hersteller ausgestellten Konformitätserklärungen, [c] sind mit Kennzeichnungen bzw. Etiketten (i.S.v. Abschn. 23.1 der Medizinprodukte-Verordnung) versehen, [d] sind Gebrauchsanweisungen in (den) Landessprache(n) beigefügt, [e] sind im Falle von importierten Produkten mit den Angaben der Importeurs versehen (Name/Firma, Anschrift). Für die Prüfung vorgenannter Anforderungen [a] bis [d] kann der Händler ein repräsentatives Probenahmeverfahren anwenden. Hartmann trägt Sorge, dass dem Händler Kopien der Konformitätserklärungen gemäß obiger Anforderung [b] zur Verfügung gestellt werden.
12. Dem Händler steht es frei, den für die Produkte zuständigen Wirtschaftsakteuren gesetzlich vorgesehene Informationen zu geben, Einsicht in Register zu gewähren, Mitteilungen zu machen bzw. Berichte an diese weiterzuleiten und/oder mit diesen zusammenzuarbeiten, etwa für den Fall, dass - aufgrund Verschiedenheit von Hartmann mit solchen Wirtschaftsakteuren - derartige Aktivitäten des Händlers nicht schon durch diese ARB/MP dargestellt werden.



Hilft. Pflegt. Schützt.

**PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.**  
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64  
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 2236 64630-0  
office@at.hartmann.info  
www.at.hartmann.info



NF (05/23) 084826/9

Tapeverband

Polsterbinde

Gipsbinde

Wundentlastungs-  
verband

Netz- und  
Schlauchverbände

Fixierbinden

Universalbinden

Zinkleimbinde

Kompressionsbinden

