



HARTMANN

 Risk
Prevention

MediSet[®] Perfusie

Vasculaire toegang,
eenvoudig en veilig



Mediset® Verband Picc line

Alles voor het onderhoud en de verbandwissel van een Picc line

Definitie

De Picc line is een perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter.

Het is een soepele katheter geplaatst in een ader boven de elleboogplooï, waarvan het uiteinde tot in de vena cava superior wordt gepositioneerd, bij de opening van het rechter atrium.

De hygiënevoorschriften die moeten worden toegepast zijn deze voor een centrale veneuze katheter.

Indicaties

Met de Picc line kunnen volgende intraveneuze behandelingen zowel thuis als in de instelling worden uitgevoerd:

- Antibioticatherapie
- Parenterale voeding
- Chemotherapie
- Pijnbehandeling
- Hydratatie

Ook een bloedafname kan via een Picc line gebeuren.





Mediset® Poortkatheter / Plaatsen van Hubernaald

Alles voor het onderhoud en het plaatsen van een Hubernaald

Definitie

De poortkatheter is een hulpmiddel dat onderhuids wordt ingeplant. Het bestaat uit twee delen, een injectiereservoir waarvan de bovenzijde bedekt is met een soepel membraan, en een lange katheter die in een grote ader wordt ingebracht en waarvan het uiteinde tot in de vena cava superior wordt gepositioneerd, bij de opening van het rechter atrium. De injectie gebeurt via de huid. Met een naald die door het membraan gaat, wordt de poort aangeprikt*.


De hygiënevoorschriften die moeten worden toegepast zijn deze voor een centrale veneuze katheter.

Indicaties

Via de poortkatheter kunnen volgende intraveneuze behandelingen zowel thuis als in de instelling worden uitgevoerd:

- Chemotherapie
- Pijnbehandeling
- Antibioticatherapie
- Parenterale voeding
- Transfusie

Ook een bloedafname kan via een poortkatheter gebeuren.

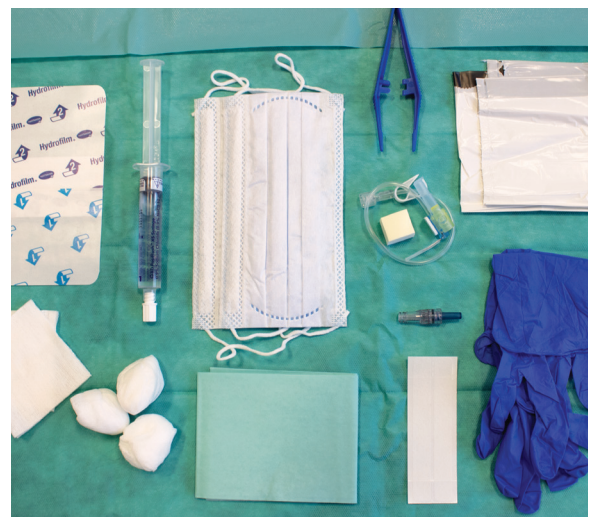

*SF2H, Aanbevelingen voor de hygiëne : « Preventie van infecties geassocieerd aan centraal veneuze katheters ». Maart 2012,p 23



De specifieke componenten van de Mediset® Verband Picc line

- » Een beveiligde, druk-neutrale, **naaldloze connector** met anti-reflux ventiel.

Desinfecteer steeds het uiteinde voor injectie of aansluiting van een infuus (gedurende min. 30"). De naaldloze connector vermijdt het gebruik van een naald, voorkomt reflux en reduceert het risico op infectie.

De connector zal na 7 dagen worden vervangen of telkens wanneer het verband nat of vuil is of volgens het voorgeschreven protocol.

- » **Het Grip-lok® verband** zorgt ervoor dat de Picc line makkelijk kan worden gefixeerd zonder hechtingen en zorgt ervoor dat de katheter goed blijft zitten.

Het verband na 7 dagen wisselen of als het vuil is.

- » **Voorgevulde spuiten** met NaCl 0,9 % om de manipulaties te vereenvoudigen en te beperken.



De specifieke componenten van de Mediset® Poortkatheter / Plaatsen van Hubernaald

De Europese aanbevelingen pleiten voor het gebruik van:

- » **Een beveiligde Hubernaald** om elk ongeval door blootstelling aan bloed te vermijden. Deze is tevens voorzien van een verlengstuk om de manipulaties ter hoogte van het aanzetstuk van de naald te beperken en laat toe de naald onder positieve druk te verwijderen om elk risico op reflux en obstructie van de katheter te vermijden.

De naald zal na 7 dagen worden vervangen of telkens wanneer het verband nat of vuil is of volgens het voorgeschreven protocol.

- » Een beveiligde, druk-neutrale, **naaldloze connector** met anti-reflux ventiel.

Desinfecteer steeds het uiteinde voor injectie of aansluiting van een infuus (gedurende min. 30"). De naaldloze connector vermijdt het gebruik van een naald, voorkomt reflux en reduceert het risico op infectie.

De connector zal na 7 dagen worden vervangen of telkens wanneer het verband nat of vuil is of volgens het voorgeschreven protocol.

- » **Voorgevulde spuiten** met NaCl 0,9 % om de manipulaties te vereenvoudigen en te beperken.





Algemene aanbevelingen

- Lees voorafgaand aan de verzorging eerst aandachtig de bijsluiter.
- Installeer de patiënt comfortabel in rugligging.
- Als het verband losraakt of bevuild is: volledig wisselen.
- Als het infuus traag loopt: de ziekenhuisafdeling verwittigen.
- Geen reflux? De Picc line of de Poortkatheter is misschien verstopt, verwittig de ziekenhuisafdeling.
- Op het einde van de infusie, de injectie of de transfusie, pulserend spoelen met 10 ml NaCl 0,9 % of 20 ml indien het bloed of parenterale voeding betreft (gebruik een spuit van minimum 10 ml).
- In geval van roodheid, oedeem, pijn op de insteekplaats of lekken, beëindig de verbandwissel en verwittig de arts van de patiënt of de ziekenhuisafdeling.
- De patiënt vertoont koorts, rillingen, risico op infectie: verwittig de arts en/of de ziekenhuisafdeling.
- Hanteer de connector met kompressen doordrenkt met een voorgeschreven antisepticum en desinfecteer steeds het uiteinde voor injectie of aansluiting van een infuus (gedurende min. 30").
- Buiten de behandelingsperiodes: het systeem pulserend spoelen met 10 ml NaCl 0,9 %, 1 maal per week (samen met de verbandwissel en het wisselen van de connector).

Aanbevelingen voor de patiënt:

- Propere kleding dragen.
- Geen druk op de arm waarop de Picc line is geplaatst, geen last optillen langs deze kant.
- Niet baden. Tijdens het douchen moeten het verband en de katheter door een extra waterdicht verband worden beschermd.

MediSet® Perfusie

Vasculaire toegang, eenvoudig en veilig

- » De garantie van een zorgprocedure conform de hoogste vereisten voor het beheer van centrale katheters.
- » Optimale veiligheid en asepsis.
- » Optimalisering van de tijd voor de verzorging dankzij het gebruiksgemak van de sets.



Mediset® Verband Picc line

REF 479 303

CNK 3804762

Mediset® Verband poortkatheter /
Plaatsen van Hubernaald

REF 479 304

CNK 3804754